


Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Bruksanvisning

Viktigt, läs innan användande!

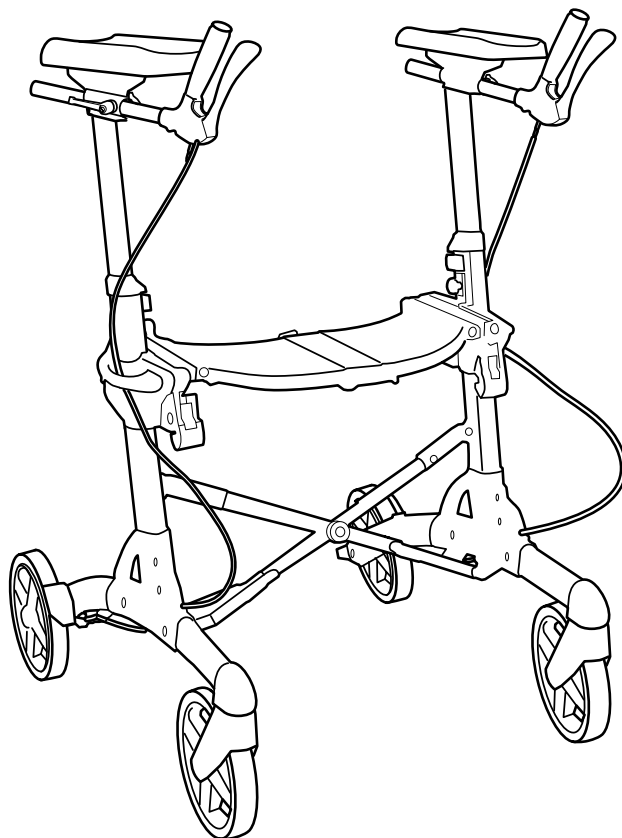

VOLARIS

RA
RA Outdoor

Grattis till din nya RA-rollator!

För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning. Rätt användning och skötsel ger ökad trygghet och en längre livslängd på rollatorn.

Volaris är en stabil och lättkörd rollator. Den kan enkelt fällas ihop för att ta mindre plats eller för hantering vid transport.

Produkten kan utrustas med olika tillbehör efter personliga behov.

Volaris rollatorer är utvecklade och tillverkade i Sverige för bästa funktion och hög kvalitet.

Avsedd användning Volaris RA / RA Outdoor

RA ger stöd vid förflyttning och ska enbart användas som gångstöd för personer med begränsad eller nedsatt rörlighet. Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Sitsen kan användas för vila när rollatorn är i stillastående läge.

Volaris RA / RA Outdoor är avsedd för bruk av vuxna personer.

Egna ingrepp eller anpassningar, vid sidan av de som beskrivs i denna manual, är inte tillåtna.

Begränsningar i användning

RA ska inte användas av personer som inte har styrka att gå eller stå med hjälp av rollatorn.

Produkten får inte användas av personer som överskrider den maximala vikten för den specifika modellen.

Standarder

Rollatorn Volaris RA / RA Outdoor uppfyller kraven i svensk standard SS-EN 11199-3:2005 (Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna - Del 3: Gåbord). Volaris är CE-märkt och uppfyller kraven enligt den medicintekniska förordningen MDR 2017/745.

Garanti

Garantitid är två (2) år vilken omfattar material- och tillverkningsfel. För förslitningsdetaljer såsom hjul, bromsdelar och handtag är garantin ett (1) år. Garantin förutsätter att produkten har använts på avsett sätt enligt denna bruksanvisning. Förväntad livslängd är **sju (7)** år vid användning i enlighet med anvisningar och regelbunden underhållsöversyn.

Kontakt

Vid frågor om produkten och hur den används, kontakta din återförsäljare eller Hjälpmiddelscentral.



Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38
332 35 Gislaved
Telefon: 0371 39 01 00
E-post: info@eurovema.se
Webb: www.eurovema.se

Säkerhetsföreskrifter



Varning! Var uppmärksam på handhavande för att undvika eventuella personskador.



Viktigt! Läs instruktionen för att undvika skador på produkten.



Symbol som illustrerar att parkeringsbromsen är låst.



Symbol som illustrerar att parkeringsbromsen är frigjord.



Varning! Rollatorn ska vara i parkerat läge (med parkeringsbroms) när du sätter dig och reser dig från sitsen.



Varning! Kör aldrig rollatorn med någon som sitter på rollatorsitsen.



Viktigt! Sitsen ska vara plan, det vill säga ligga i samma höjd på båda sidorna när rollator fälls ihop.


Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	s 2	Justera bromsen	s 9
Garanti	s 2	Rengöring	s 9
Tillverkad i Sverige	s 2	Rekonditionering	s 9
Innehåll	s 3	Profilsnäppe	s 9
Kontakt	s 3	Smörj vajern	s 10
Justering av sitsen	s 4	Felsökning	s 10
Justering av handtagshöjd	s 4	Tillbehör för din säkerhet	s 11-12
Justering av handtagen	s 4-5	Tillbehör för din komfort	s 13-15
Armstödet position och riktning	s 5	Teknisk fakta	s 16
Att fälla ut	s 6	Tillbehör	s 16
Att fälla ihop, fällspärr	s 6		
Fast transportband	s 6		
Så här bromsar du	s 7		
Stabilitetsband	s 8		
Körtips - "comfortchassi"	s 8		
Lär dig "saxtekniken"	s 8		
Underhåll	s 9		

Höjdjusteringar


Justera höjden på sitsen

Ta bort eventuella profilsnåppen (se sidan 9). Ändra en sida i taget. Drag ut knappen under sitsen. Lyft samtidigt upp eller tryck ner sitsen till önskad höjd. Känn efter att knappen klickar tillbaka så att sitsen är låst. Gör om samma sak på den andra sidan. Kontrollera noggrant att sitsen är plan innan rollatorn används. Tryck ner mittenplattan på sitsen. Placera profilsnåppen i hacken på profilen både över och under sitsen (se sidan 9).

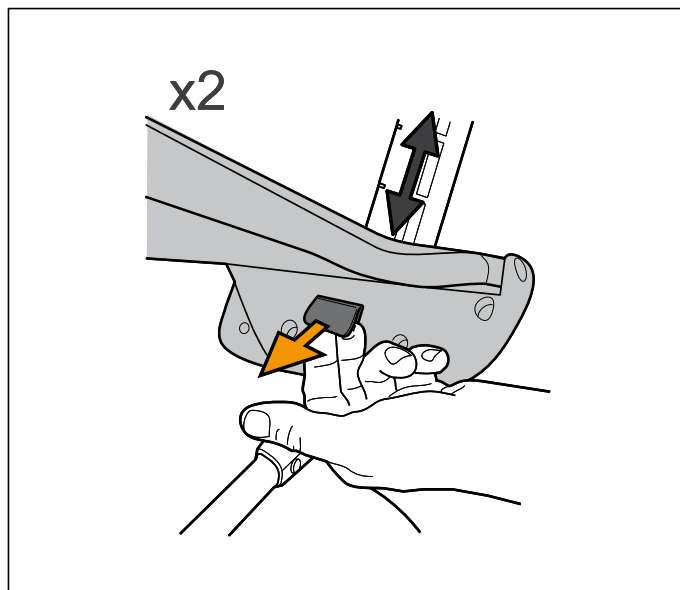


Handtagshöjd

Handtagshöjden är rätt när underarmen vilar bekvämt i armstödet, ca 90 grader mellan under- och överarmen. När du går med rollatorn bör du gå utan att böja dig framåt, ha rollatorn nära kroppen, håll ryggen rak och titta framåt.

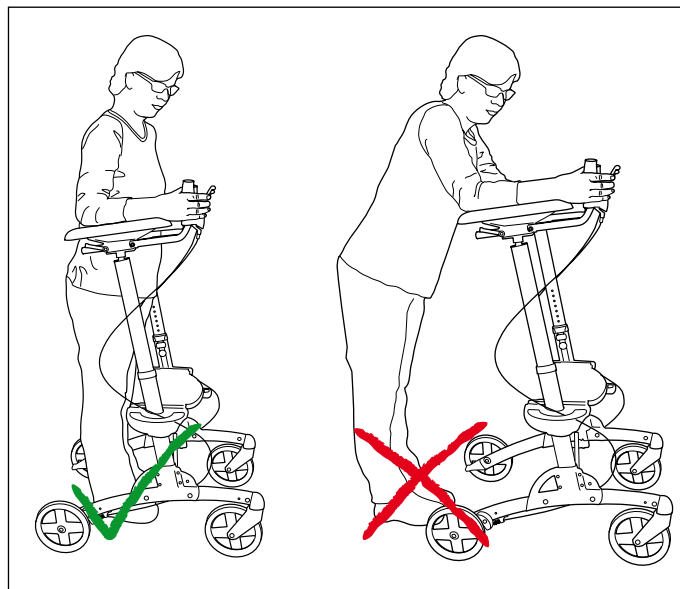

Justera höjden på handtagen


Lossa på ratten. Genom att dra ut knappen kan du ändra höjden på handtagen, se intervallerna på sidan 16. Justera därefter höjden och kontrollera sedan att knappen "klickar tillbaka" och drag åt ratten. Efter att ha använt RA ett tag känner du själv om du vill justera ytterligare. Det ska kännas bekvämt när du går med din rollator. Mekaniskt stopp för maximal handtagshöjd. Antal synliga hål utgör markerad höjdintervall.

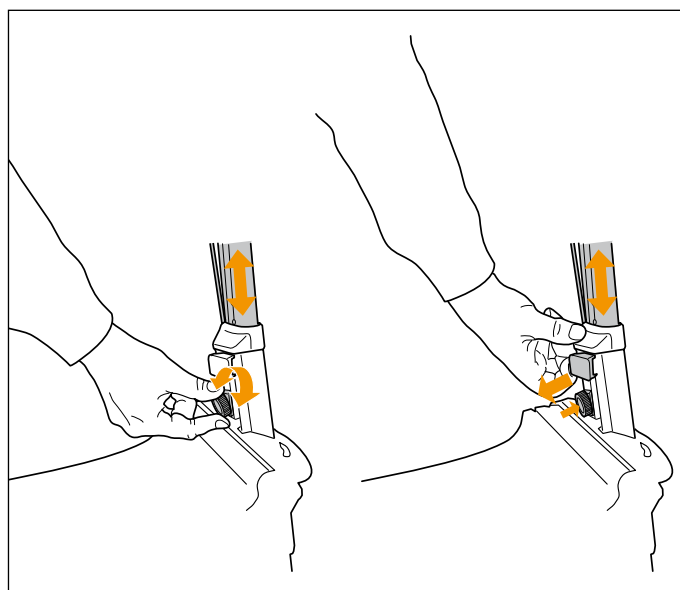

Justering


Justera handtagen i djupled och vinkel

Lossa vredet under armstödsdynan. Skjut och vinkla bromshandtaget till önskad position.

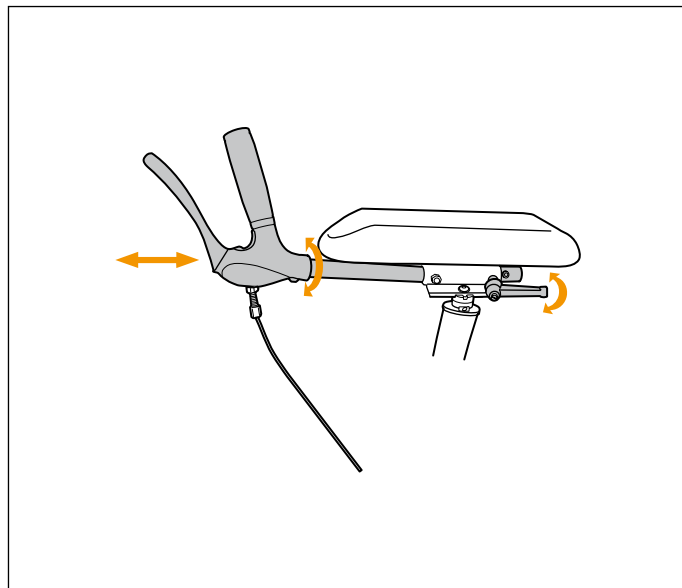


Armstödetets position

Genom att lossa skruvarna under armstödsdynan kan den skjutas i djupled. För att underlätta justeringen kan handtaget avlägsnas efter att vredet lossats. Fäst skruvarna och justera handtaget då dessa åter sätts på plats.

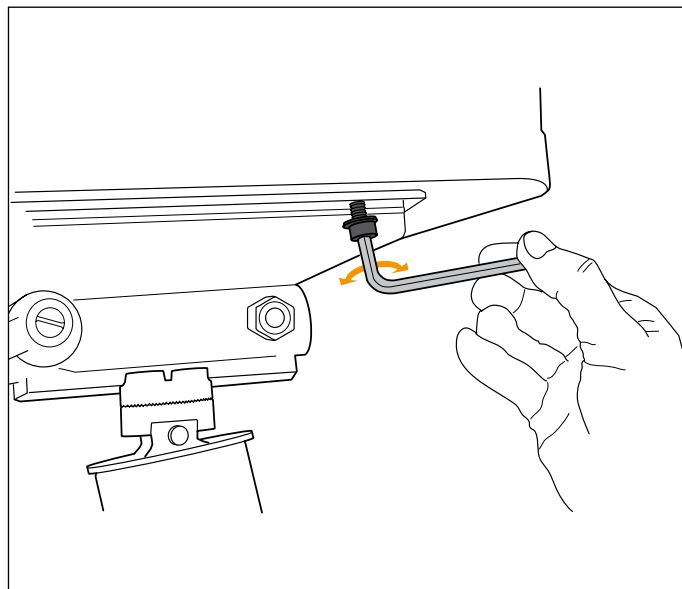

Armstödetets riktning


Armstödet (armstödsdyna inklusive handtag) kan vridas inåt genom att lossa kugghjulet. Vrid armstödet max 90 grader.

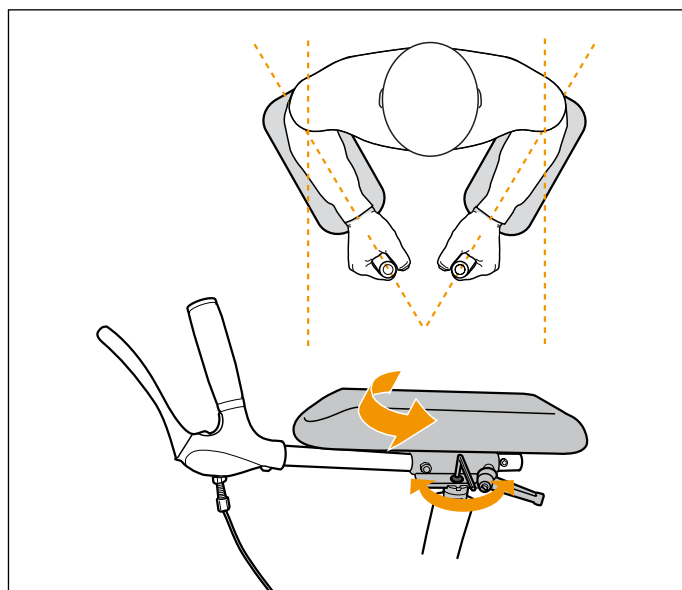

Fäll ut och fäll ihop

Att fälla ut din rollator


1. Fatta med en hand i det ena körhandtaget och luta RA lätt åt samma håll så att hjulet lyfter några centimeter.
2. Drag utåt i det grå lyfthandtaget på andra sidan. En fjäder hjälper till att fälla ut rollatorn.
3. Tryck ner mittenplattan på sitsen för att låsa rollatorn.

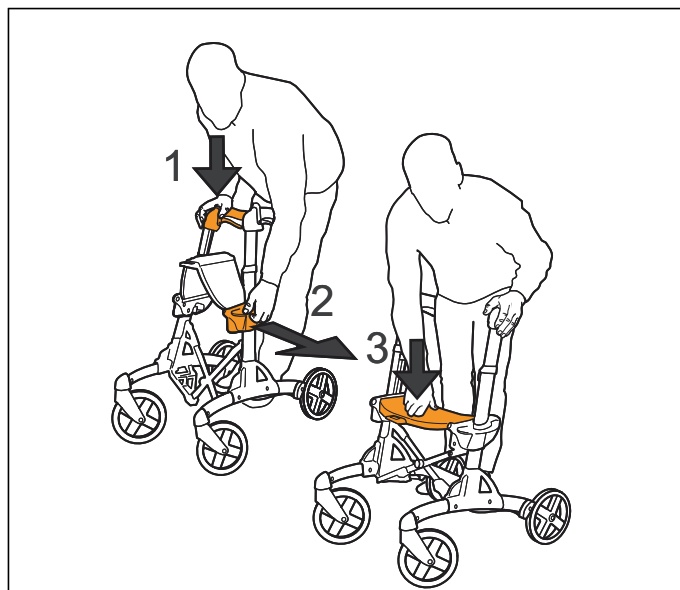

Att fälla ihop


Tag bort en eventuell korg.

1. Drag i bandet mot dig.
2. Lyft i bandet.
3. Tryck ihop RA med handtagen på sidan.

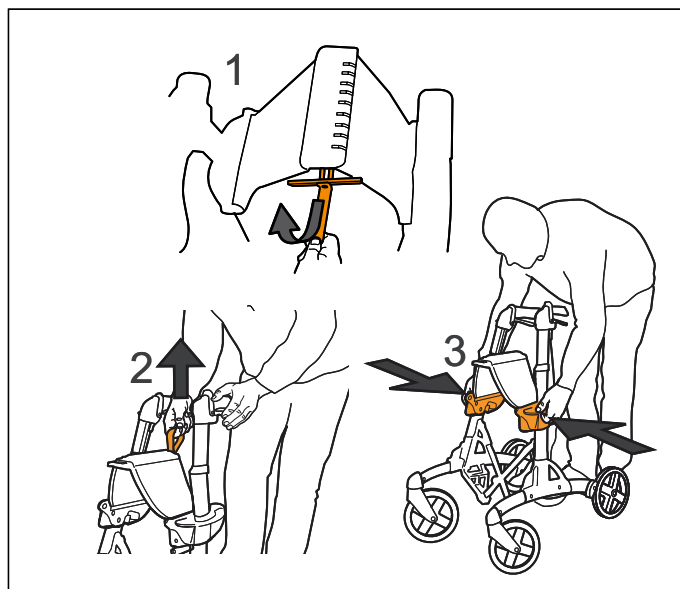

Fast transportband


Är rollatorn utrustad med fast transportband, fälls rollatorn ihop (se punkterna ovan) och blir hopfälld genom tryckknappen. Lossa knappen och rollatorn kan fällas ut.

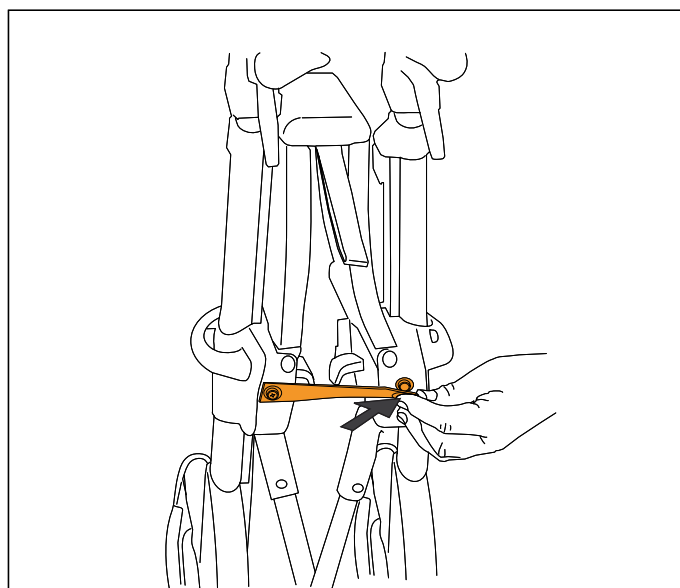

Så här bromsar du säkert

Färdbromsen

Bromsen aktiveras genom att bromsspaken framför handgreppet dras innåt mot handgreppet.

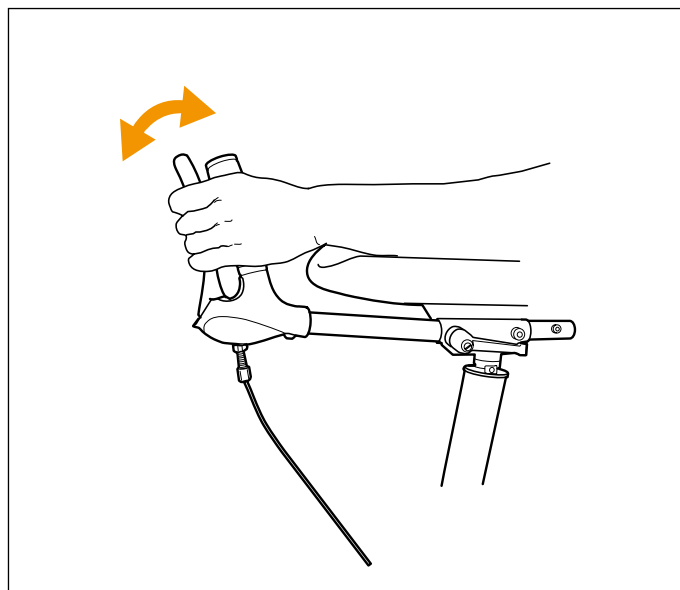


Parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen aktiveras genom att bromsspaken trycks utåt tills bromsspaken automatiskt låser sig.


Parkeringsbromsen skall ej vara låst vid justering av bromsen.

Parkeringsbromsen skall vara aktiverad när man sitter på sitsen.

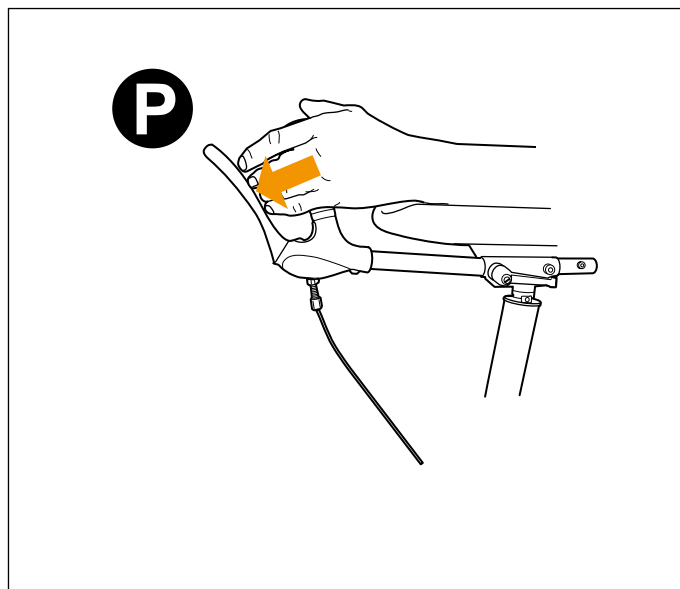

Frigör parkeringsbromsen

Bromsen frigörs genom att bromsspaken framför handgreppet dras inåt tills ett klick hörs och samtidigt släpps spärren.

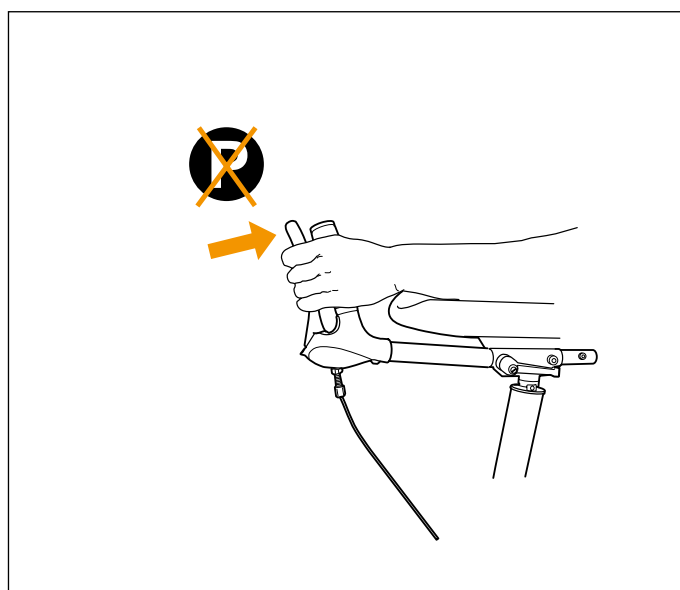


Körtips

Stabilitetsband

Stabilitetsbandet ger en stadigare upplevd hantering genom att effekten av krysskonstruktionens flexibilitet begränsas. Stabilitetsbandet levereras som standard på RA och RA Outdoor.

RA-rollatorn går att använda utan bandet.

Stabilitetsbandet är monterat med karbinhakar för enkel montering och demontering. För att lossa karbinhaken tryck in låsklacken enligt bilden till höger. Genom att trycka armstöden något mot varandra blir bandet mindre spänt, vilket underlättar montering/demontering. Vid behov av temporär demontering, exempelvis då sitsen ska användas lossas karbinhaken på ena sidan. Bandet hänger då kvar i den andra karbinhaken.

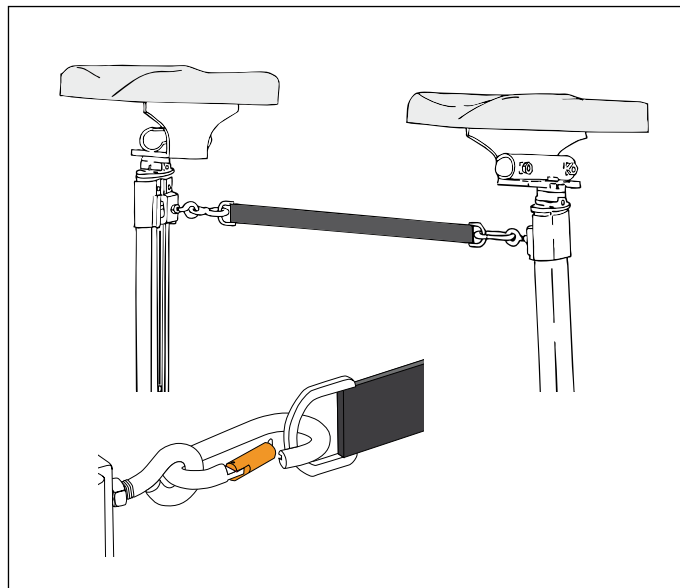


Comfortchassi

RA är byggd med ett Comfort Frame™, "comfortchassi" som gör att den går mjukt över ojämnheter i vägen. När du behöver komma över ett större hinder eller komma upp på en trottoarkant kan du få hjälp av "tipphjälpen" som sitter vid bakhjulen. Tryck ner den ena trampan samtidigt som du lyfter i handtagen.




Lyft inte i sitsen när du vill gå över ett hinder, då fälls rollatorn ihop!

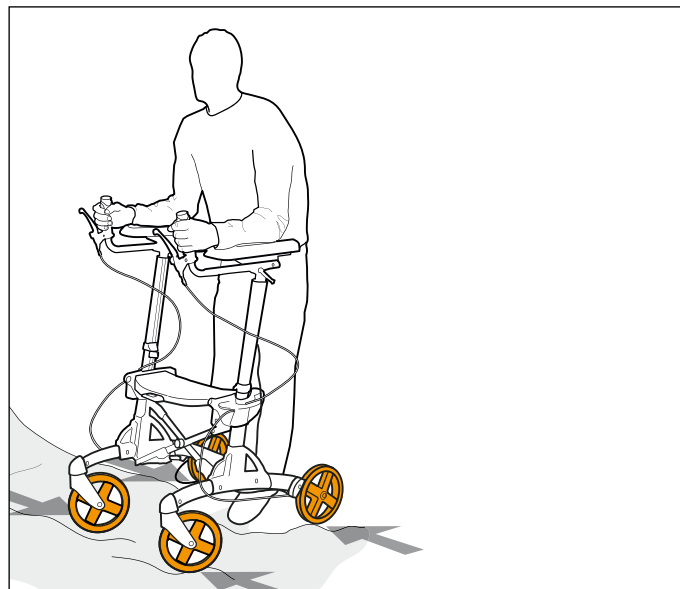

Lär dig "saxtekniken"

Kör snett fram mot hindret. Bromsa den ena sidan. Luta rollatorn något bakåt så att framhjulen lyfts, sväng upp framhjulen över hindret. Det går enkelt när du har lärt dig det!

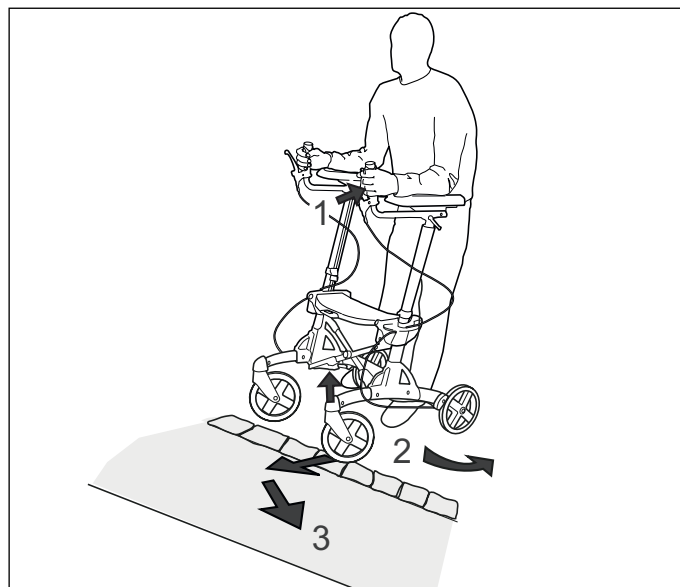


Underhåll

Justera bromsen på RA för rätt funktion

Bromseffekten kan justeras genom att justera vajerreglaget på undersidan av ramen och/eller vid bromshandtaget.


1. Frigör/lossa parkeringsbromsen.
2. Lossa muttern i mitten med 8mm lednyckel.
3. Vrid ut den gängade långa sexkantsaxeln om du vill öka bromseffekten. Vrid in den gängade sexkantsaxeln om du vill minska bromseffekten.
4. Drag åt muttern i mitten med 8mm lednyckel.
Du bör justera bromsen så att bromsbiten ligger ca 1-2mm från slitbanan utan att det "tar i slitbanan". Om du justerar bromsen alltför hårt blir det onödigt trögt att aktivera parkeringsbromsen.

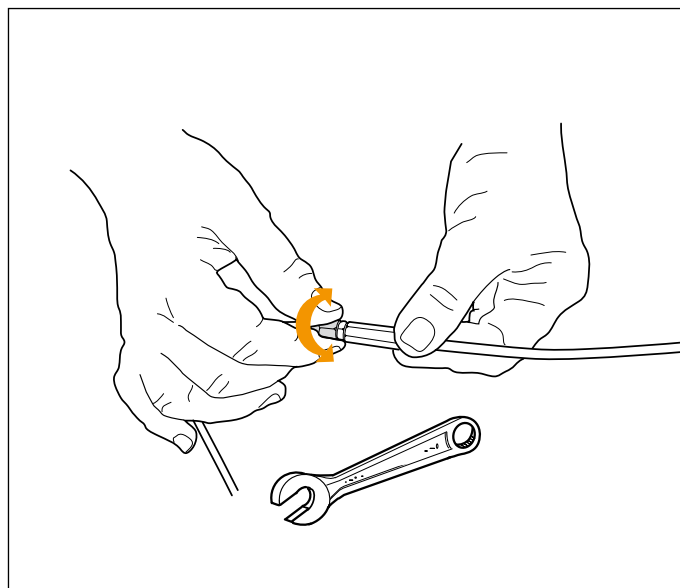

Rengöring av rollatorer och tillbehör

Du tjänar på att sköta din rollator väl, då håller den längre.

Torka av smuts med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel. Var noga med att inte smuts samlas mellan hjulen och bromsbackarna, bromseffekten kan äventyras! Det går bra att spola av rollatorn med en högtryckstvätt eller trädgårdsslang, torka torrt efteråt.

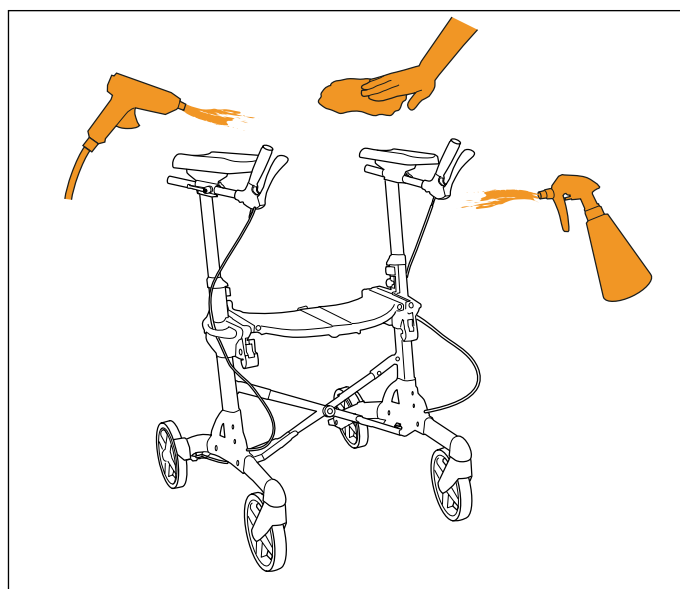


Rekonditionering

Vid rekonditionering i tvättanläggning får rollatorn ej vara bromsad. Rollatorn skall svalna till rumstemperatur innan man använder och justerar rollatorn.

Profilsnäppe


Profilsnäppet används för att undvika att något fastnar. Medföljer rollatorn. Bör sitta i samtliga synliga hack. Både över och under sitsen.

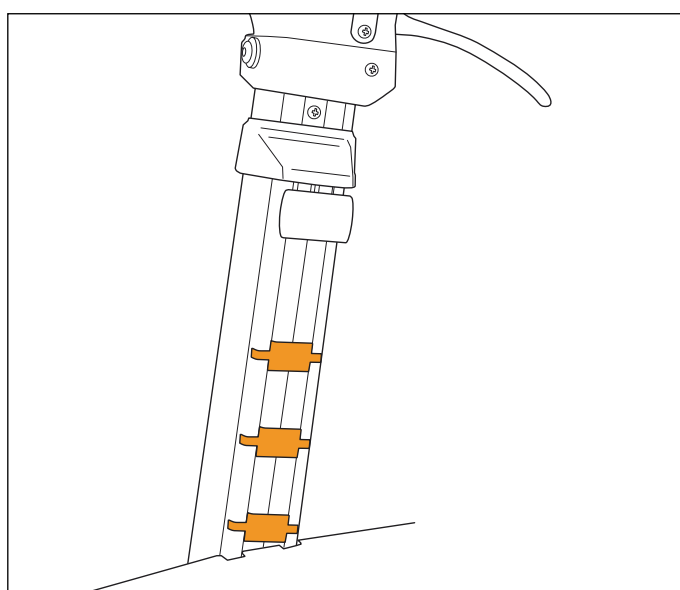

Underhåll

Smörj vajern


Efter tvätten, smörj bromsvajern genom att applicera några droppar olja vid handtaget under ramen.

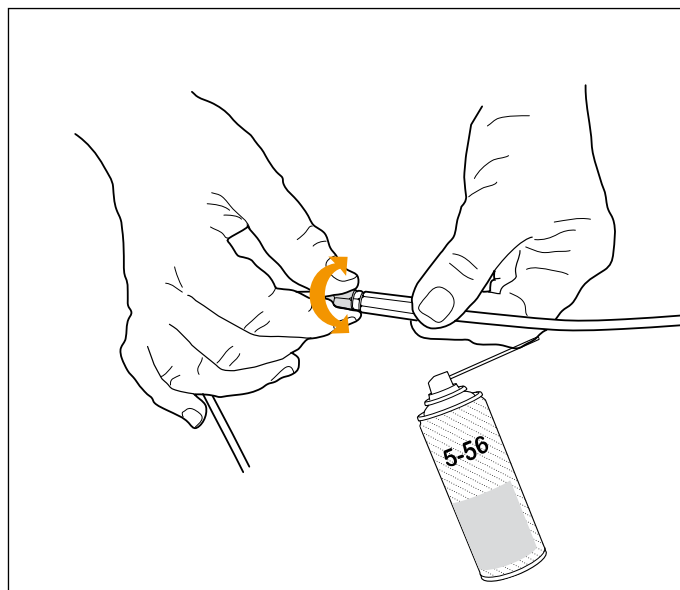

Felsökning

Om rollatorn vid gång drar åt den ena sidan, kontrollera att hjulen snurrar lika lätt och att hjulgafflarna svänger lätt. Kontrollera att hjul och gafflar sitter fast ordentligt. Kontrollera att inte smuts eller skräp fastnat mellan hjul och bromsback.


Se till att bromsvajern är fäst i bromsbacken under ramen. Kontrollera att fjädern vid bromsbacken vid bakhjulet är hel. Kontrollera att bromsbacken vid bromsning trycker på hjulet, lika på båda sidor. Justera vajern, se sidan 8.

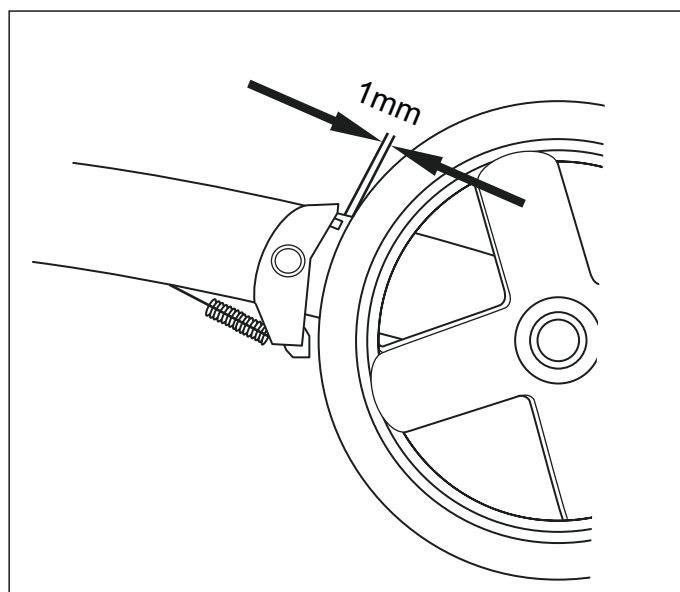

Tillbehör för din säkerhet


Släpbroms

En broms med justerbar, kontinuerlig friktion. För att justera effekten av släpbromsen vrid på ratten.

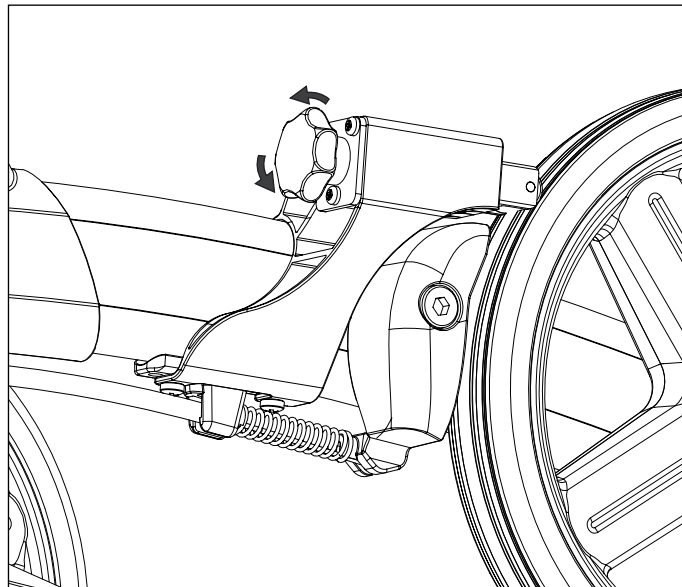

Belysning


Sätts fast på stativet med kardborrband. Rött ljus bakåt, vitt ljus framåt. Batteridriven. Lätt att ta bort, lätt att byta batteri.

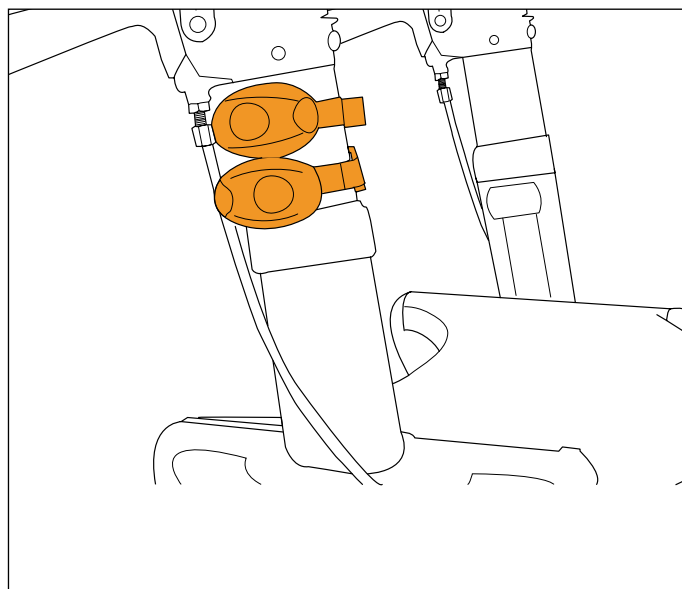

Tillbehör för din säkerhet


Enhandsbroms

Låser de båda bakre hjulen, aktiveras av antingen färd-
broms eller parkeringsbroms.

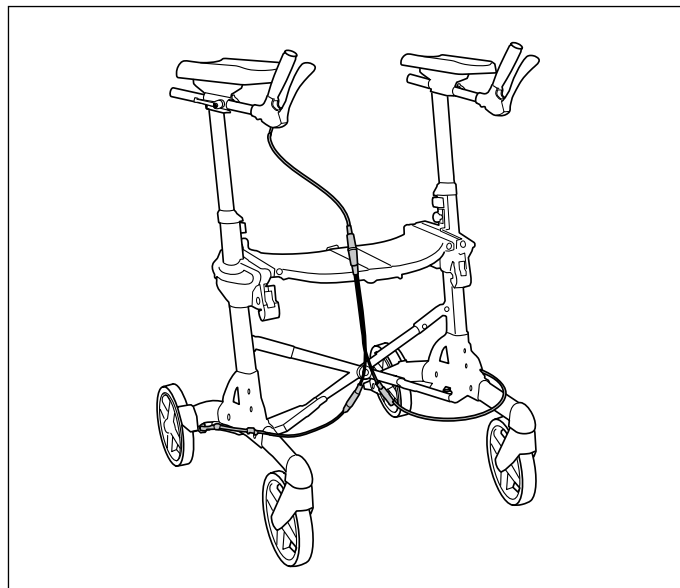


Hållare för syrgasflaska

Kraftig stålkorg som hakas på sitsen samt ett medföljande
fäste.

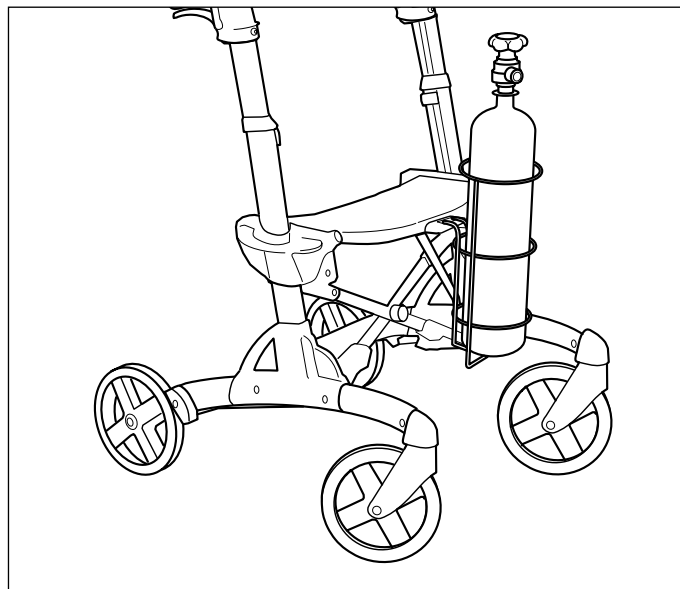

Droppställning


Häng i första hand droppåsen mot rollatorns mitt.
Tänk på att droppåsar kan påverka stabiliteten på
rollatorn. Maximal vikt 2,2 kg.

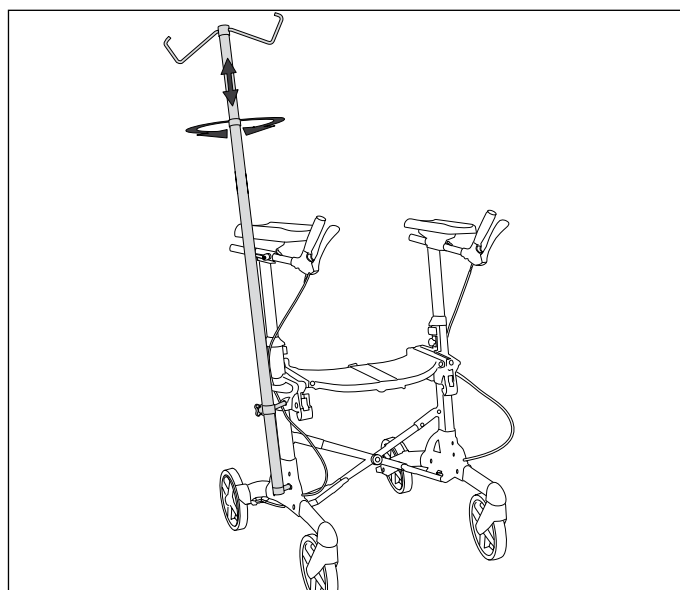

Tillbehör för din komfort


Käpphållare/kryckhållare

Två delar som skruvas fast på avsedd plats. Håller stadigt käpp, krycka eller paraply på plats.

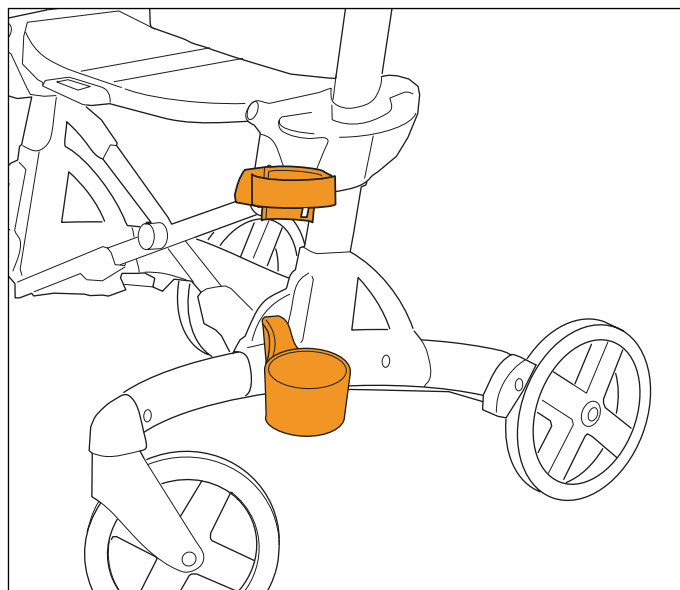

Flaskhållare


Hållare i plastad tråd för flaska/burk. Rymmer 0,5 liters flaskor och 33 cl burkar. Hängs på handtaget. Maximal last: 0,6 kg.

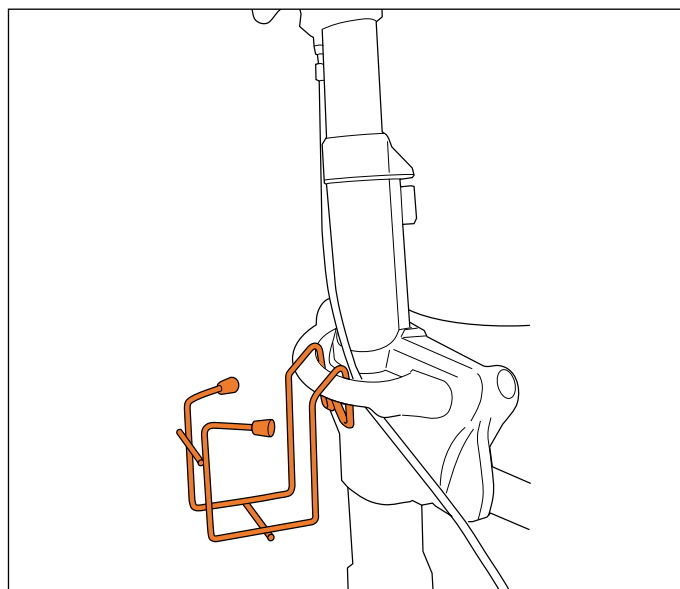

Tillbehör för din komfort


Transportband

Fäst transportbandet runt rollatorns handtag, då kommer rollatorn att behålla hopfällt läge. Enkelt att montera.

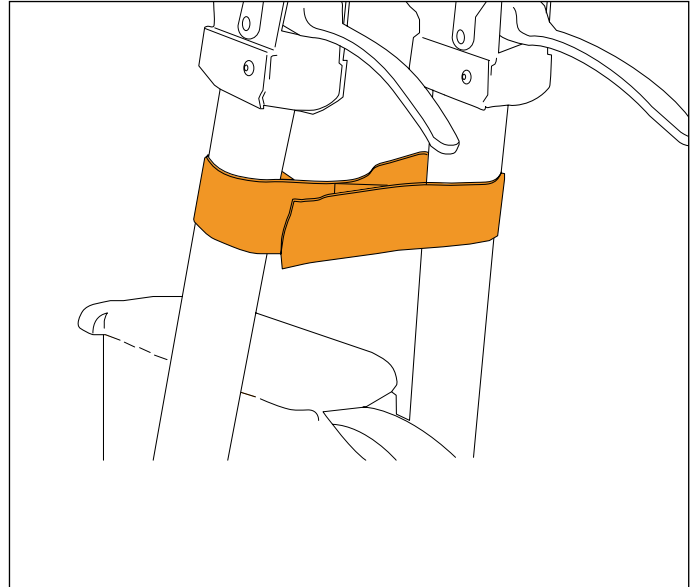


Tygväska

En mjuk tygväska i vävd nylon som kan sitta på även då rollatorn fälls. Lätt att ta bort. Kan tvättas. Maximal last: 5 kg.

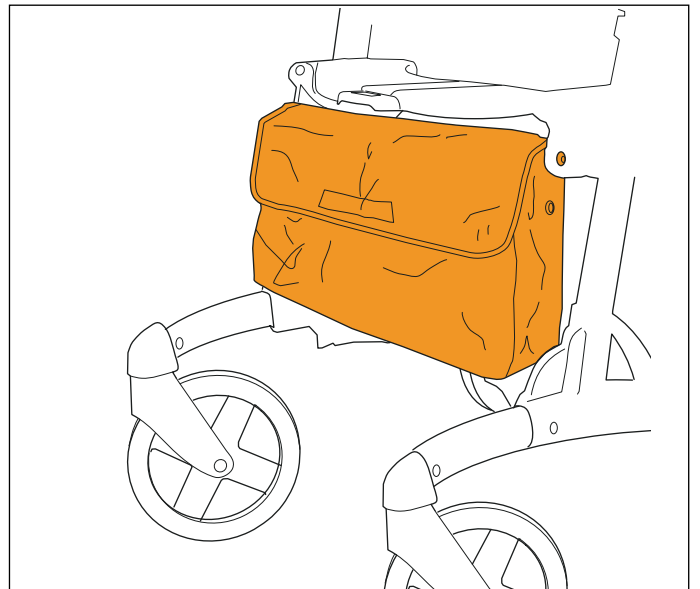

Nätkorg


En stadig korg i metallnät. Hakas lätt på rollatorn. Bärhandtag. Maximal last: 5 kg.

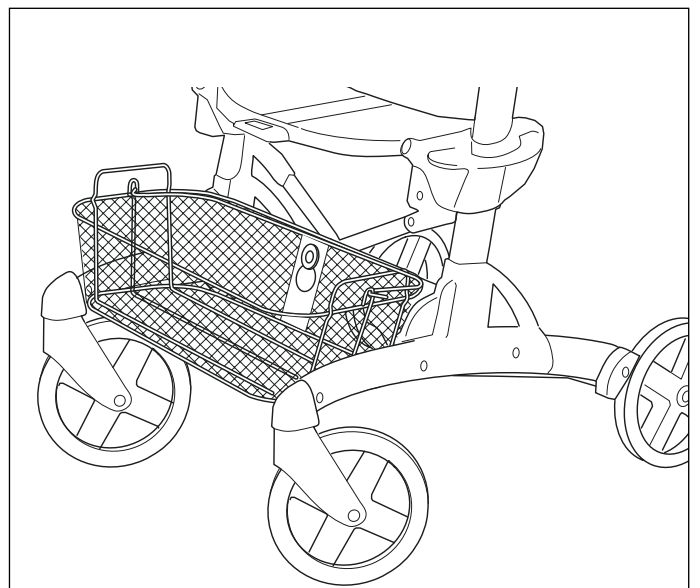

Tillbehör för din komfort


Bricka

Bricka, som sätts över rollatorns sits.

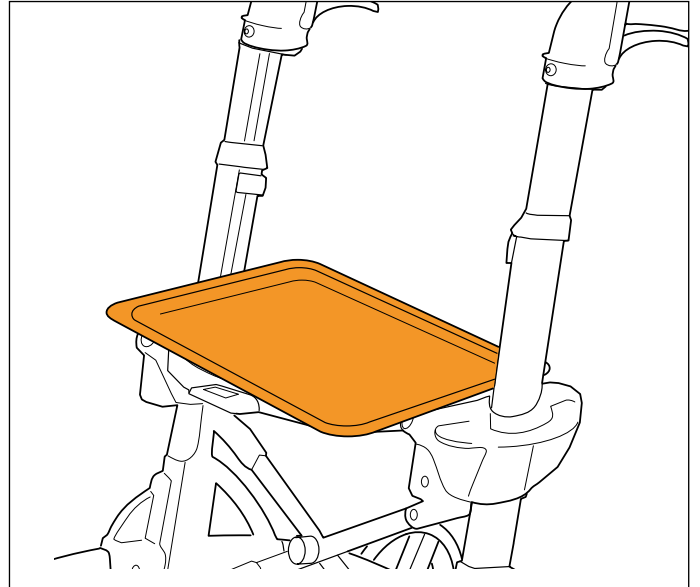


Textilkorg

Korg tillverkad av plastgavlar och textilnät av nylon. Korgen kan monteras på alla Volaris-modeller. Textilkorgen kan sitta på även då rollatorn fälls ihop. Lätt att ta bort. Maximal last: 5 kg.

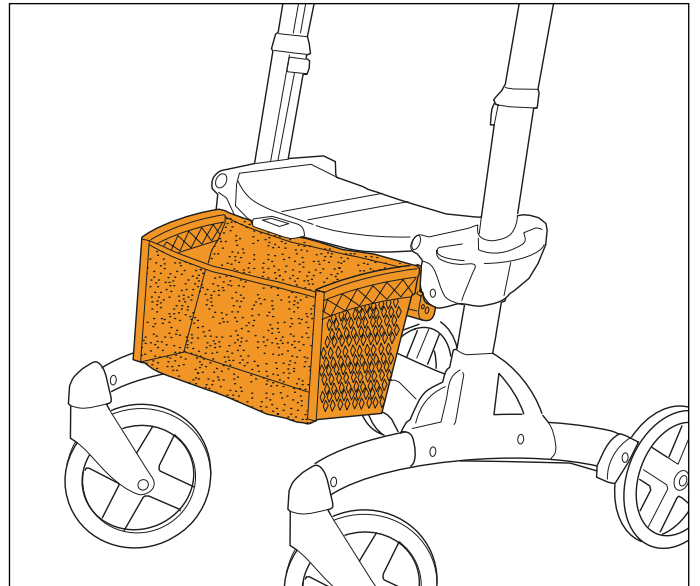


Mjuksits


Tre delar som gör sitsen mjukare och varmare. Går att ha kvar när man fäller ihop rollatorn.

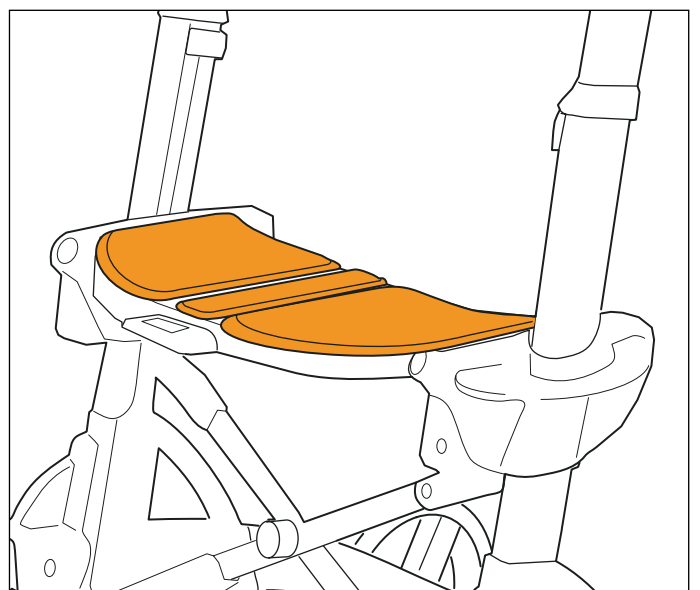

Tekniska data

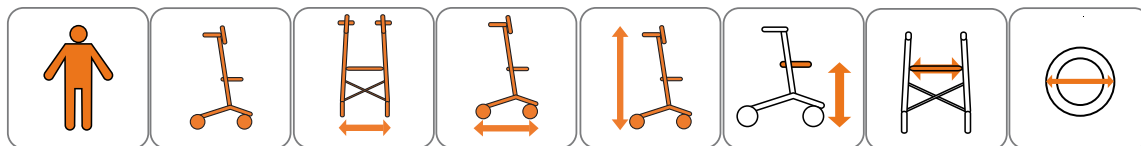

RA	125 kg	12 kg	65 cm	80 cm	100-125 cm	46-57 cm	47 cm	200x32 mm
RA low	125 kg	11,9 kg	65 cm	80 cm	88-114 cm	46-57 cm	47 cm	200x32 mm
RA Outdoor	135 kg	12,5 kg	65 cm	84 cm	88-116 cm	52-66 cm	47 cm	260x32 mm

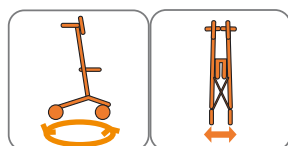

RA	92 cm	29 cm
RA low	92 cm	29 cm
RA Outdoor	99 cm	29 cm

Tillbehör för dina behov, din säkerhet och komfort

	RA	RA low	RA Outdoor
Släpbröms	x	x	x
Belysning	x	x	x
Ryggband			
Ställbart ryggband			
Hållare för syrgasflaska	x	x	x
Käpphållare	x	x	x
Flaskhållare	x	x	x
Paraply/ parasoll			
Transportband	x	x	x
Tygväska	x	x	x
Nätkorg	x	x	x
Bricka	x	x	x
Textilkorg	x	x	x
Mjuksits	x	x	x
Enhandsbröms	x	x	x
Droppställning	x	x	x

Eurovema