

EXL  
Sprängskiss / Exploded view



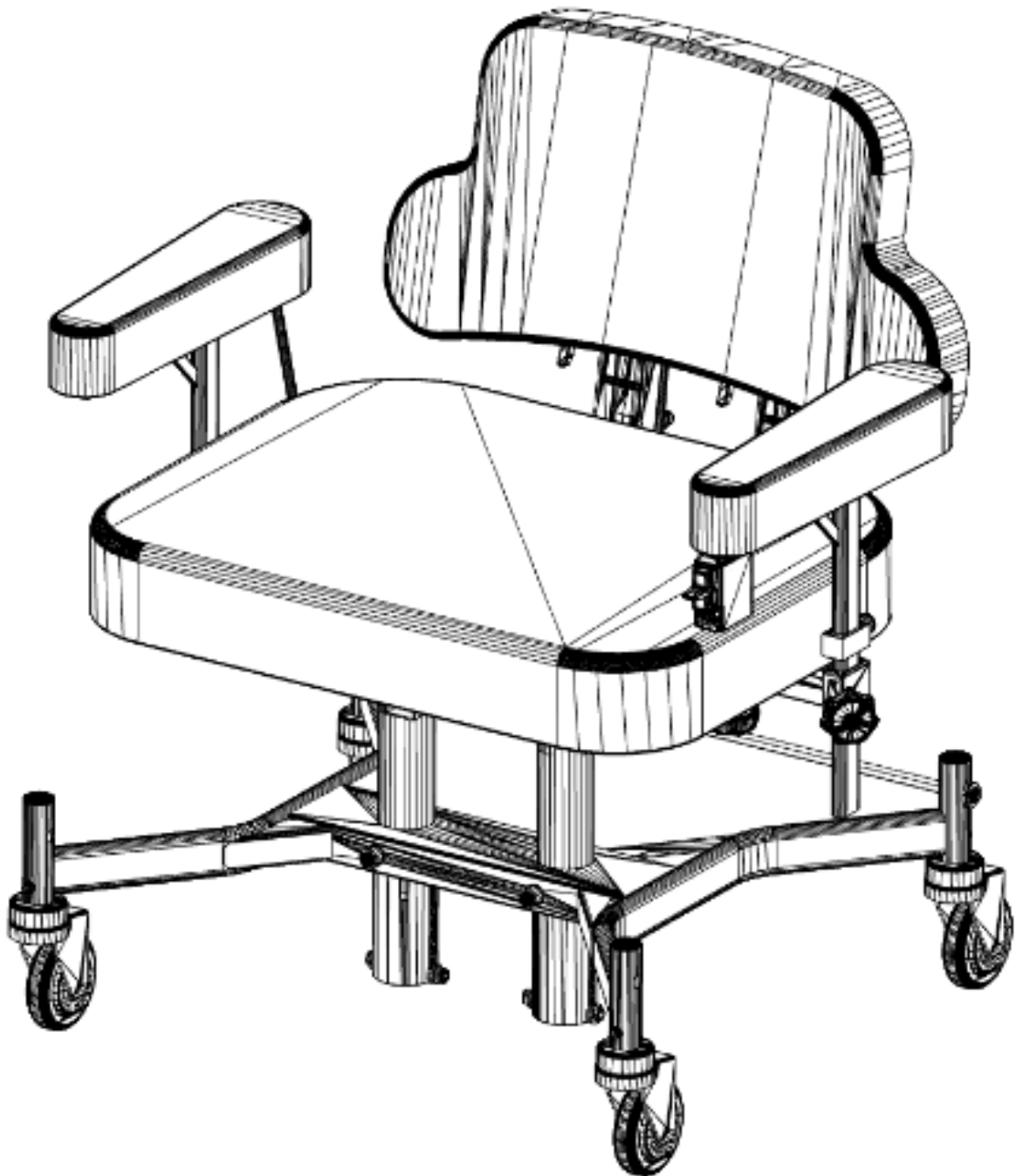


Bild 1  
Picture 1

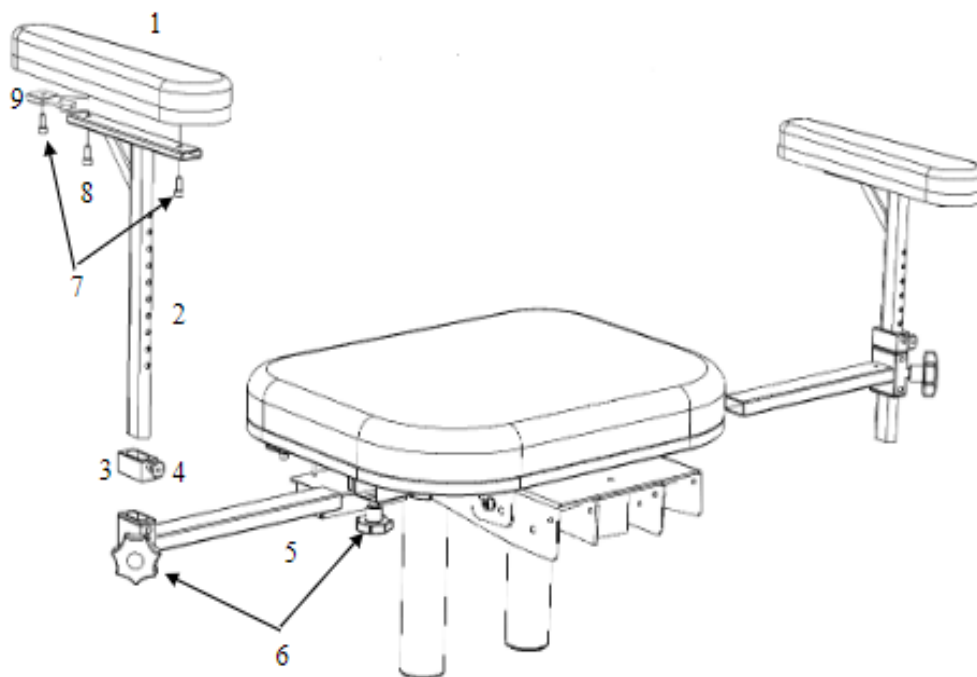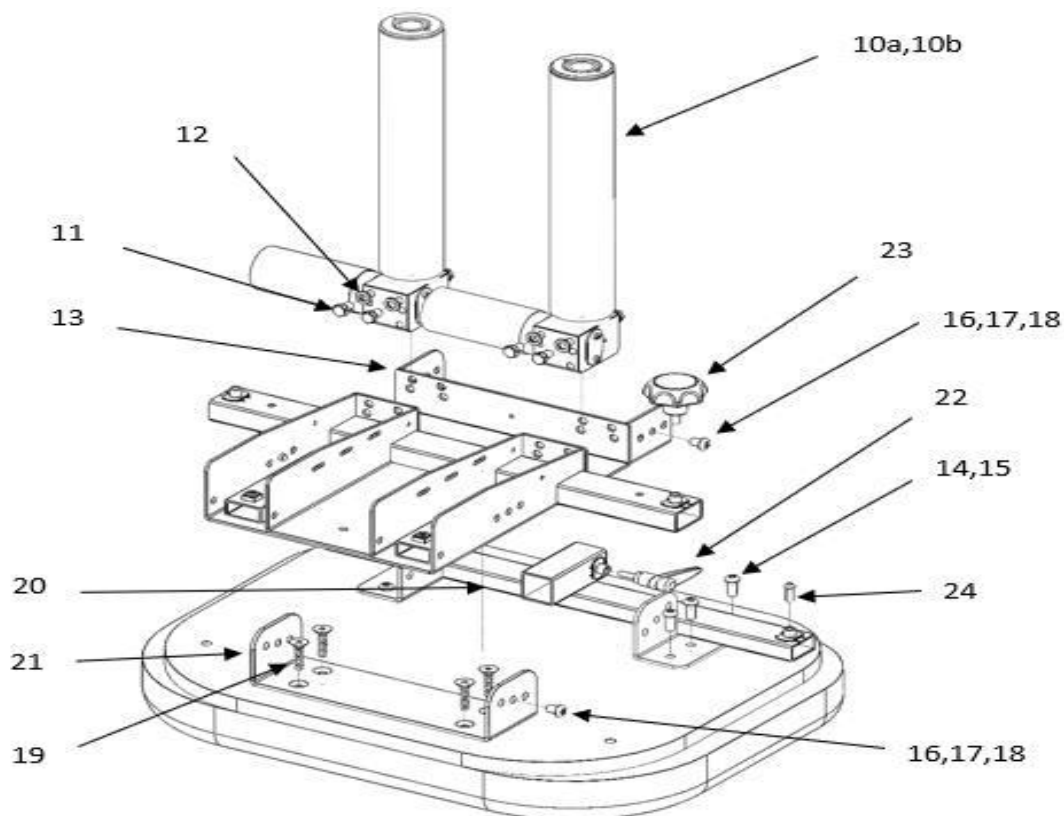


Pos.	Art.nr / part.nr	Benämning	Description	Antal. Quantity
		Bild 1	Picture 1	
1.	624011-4004	Armstödsplatta Miuk EXL	Armrest pad soft EXL	2st / 2p
2.	400111.	Armstöd höjdiustering HD	armrest hight adjuster HD	2st / 2p
3.	300969.	Säkerhetsstopp höjdjust. Armst.	Secure stop armrest hight	2st / 2p
4.	710001-3400	Snäpplås med hatt, kort	Armrest hight secure stop	2st / 2p
5.	SW-00044	Breddjustering HD	Width adjuster HD	2st / 2p
6.	7S-RATT-8x16	Skruvratt	Star wheel	4st / 4p
7.	7MC6S-6x20	Skruv MC6S 6x20	Screw MC6S 6x20	4st / 4p
8.	7MC6S-6x25	Skruv MC6S 6x25	Screw MC6S 6x25	2st / 2p
9.	SW-020102	Armstödsförstärkning . Vippfäste	Armrest reinforcment	2st / 2p

## EXL EL 24V

Bild 2  
Picture 2


Pos.	Art.nr / part.nr	Benämning	Description	Antal. Quantity
		Bild 2	Picture 2	
10.a	249101-8010	Ställdon 24V slag 250mm	Actuator 24V storke 250mm	2st / 2p
10.b	249102-8010	Ställdon 24V slag 180mm	Actuator 24V storke 180mm	2st / 2p
11.	7M6S-8x19	Skruv special till ställdon	Screw M8x19 special. actuator	8st / 8p
12.	7BRB-8,4x16	Planbricka 8,4x16x1,5	Washer 8,4x16x1,5	8st / 8p
13.	629101-3050	Sittkrvss EXL	Seatcross EXL	1st / 1p
14.	7K6S-8x30	Kullrig Skruv M8x30 svart	Panhead screw M8x30 black	6st / 6p
15.	7FBB-8x15	Fjäderbricka 8,1x14,8x2 FZB	Spring washer 8,1x14,8x2FZB	6st / 6p
16.	7K6S-8x20-SK	Skruv MC6S 6x20 svart	Screw MC6S 6x20 black	4st / 4p
17.	7BRB-8,4x16 SK	Planbricka 8,4x16x1,5 svart	Washer 8,4x16x1,5 black	8st / 8p
18.	7LOCKING-M8L	Låsmutter M8 DIN985 FZB	Locking nut DIN 985 FZB	4st / 4p
19.	F6S-8x30	försänkt skruv M8x30 bakre fäste	Countersunk screw M8x30	1st / 1p
20.	SW-00038	Främre fäste sittkrvss	Front bracket seat cross	1st / 1p
21.	SW-00043	Bakre fäste sittkrvss	Rear bracket seatcross	1st / 1p
22.	7WN500-8x16	Låsspak M8x16	One hand lever M8x16	1st / 1p
23.	7-RATT-M8x20	Stjärnratt M8x20	Star wheel M8x20	2st / 2p
24.	7K6S-M8x16-SK	Kullrig skruv M8x16 svart	Panhead screw M8x16 black	2st / 2p

## EXL EL 24V

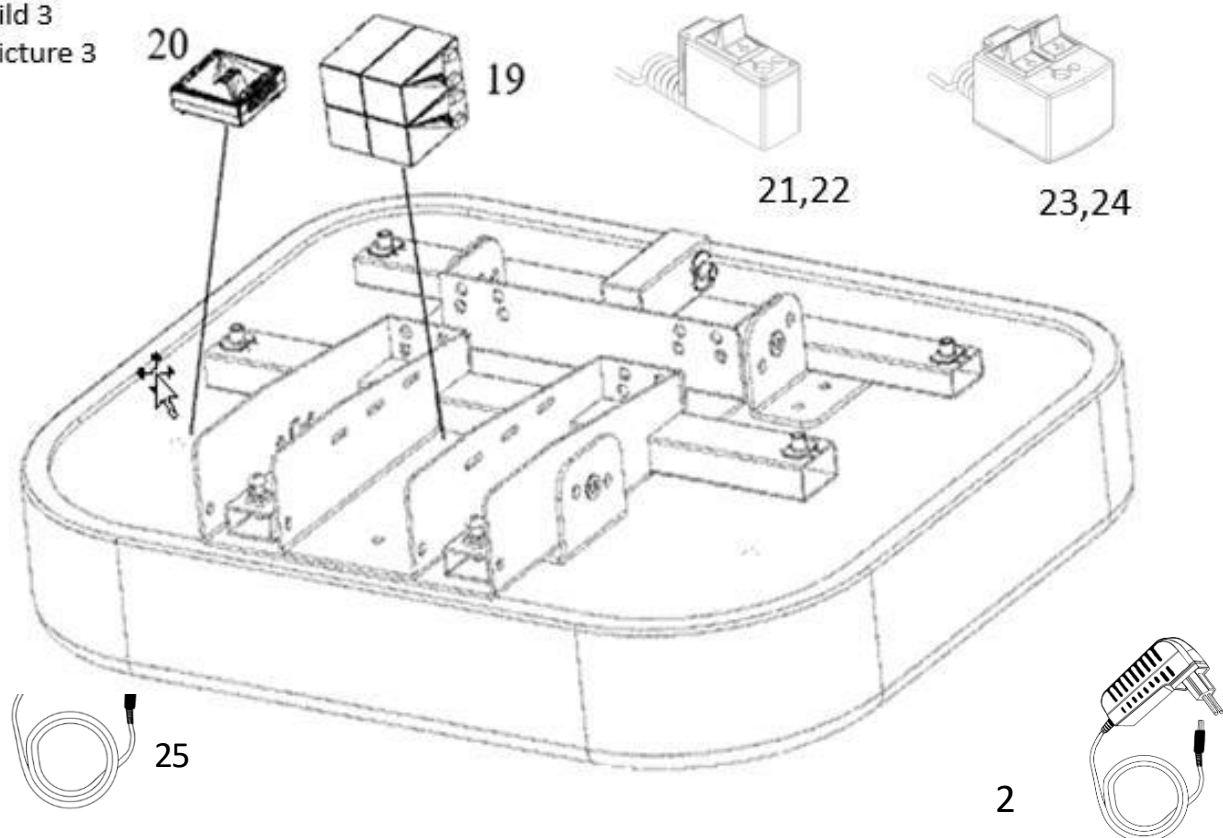Bild 3  
Picture 3


Pos.	Art.nr / part.nr	Benämning	Description	Antal. Quantity
		Bild 3	Picture 3	
19.	7-2FG20291	Batteri 24V 2,9Ah	Battery 24V 2,9Ah	2st / 2p
20.	249101-2445	Elektronikbox 24 3-funk. EXL	Electronic box 24V 3func. EXL	1st / 1p
21.	24101-2451	Manöverdosa 1 funk+ ladd.	Control box 1function/charger	*
22.	24101-2450	Manöverdosa 1 funk. utan ladd.	Controlbox 1function	*
23.	249103-2451	Manöverdosa 2 funk. med ladd.	Control box 2function/charger	*
24.	249103-2450	Manöverdosa 2 funk.utan ladd.	Controlbox 2function	*
25.	249101-2442	Kabel elektronik till ställdon	Cable electronics to actuator	2st / 2p
26.	7LADDARE 1,0	Laddare Soneil 24V 1Ah	Charger Soneil 24V 1Ah	1st / 1p
*=	Valda elfunktioner styr valet.		Selected electrical functions control the selection	

**Bild 4**  
**Picture 4**

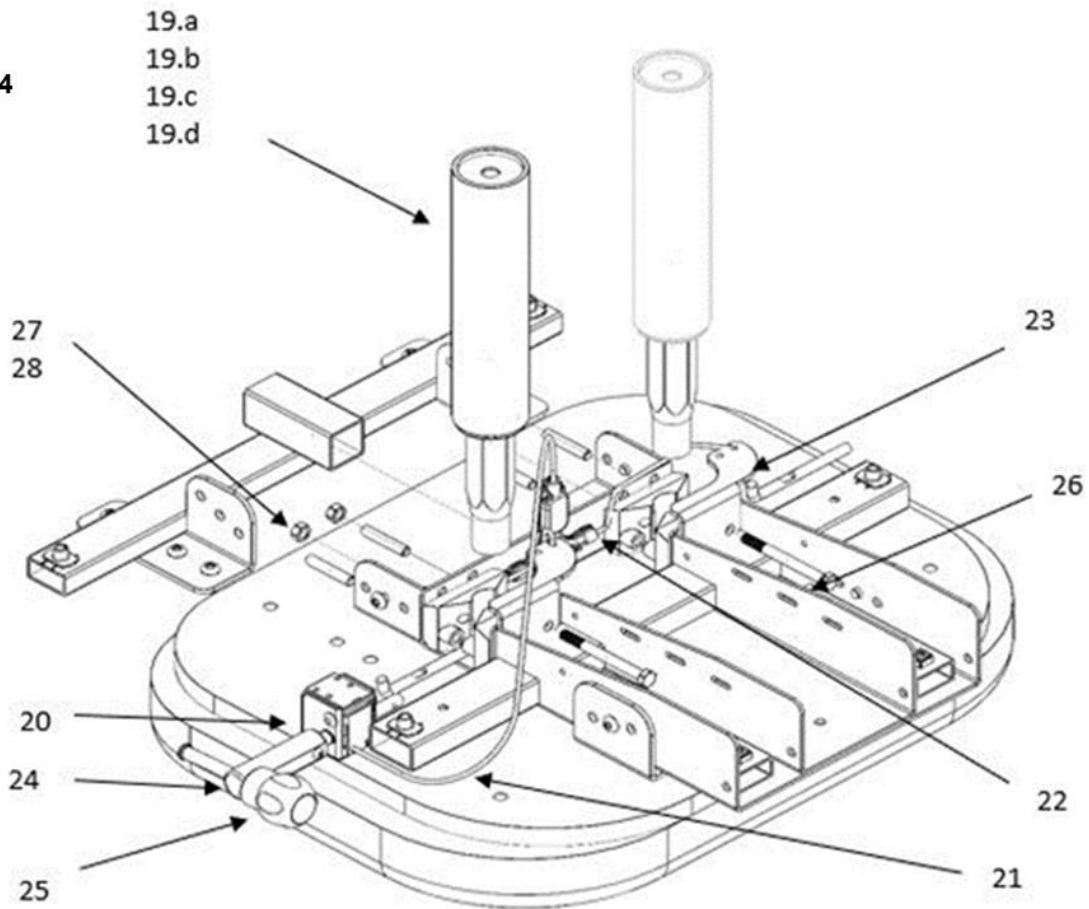


Pos.	Art.nr / part.nr	Benämning	Description	Antal. Quantity
		Bild 4	Picture 4	
19.a	221500-0200	*Sitslyft gas 200mm 500N kpl.	*Seat lift gas 200mm 500N	2st / 2p
19.b	221400-0200	*Sitslyft gas 200mm 400N kpl.	*Seat lift gas 200mm 400N	2st / 2p
19.c	221500-0155	*Sitslyft gas 155mm 500N kpl.	*Seat lift gas 155mm 500N	2st / 2p
19.d	221400-0155	*Sitslyft gas 155mm 400N kpl.	*Seat lift gas 155mm 400N	2st / 2p
20.	810000-3017	**Reglage sitthöjd kpl.	**Seat height adjustment.	1st / 1p
21.	61101-0253	Vajer övre sitthöjdsreglage.	Wire upper, seat adjustment.	1st / 1p
22.	61101-251-02	Vajer kort sitthöjdsreglage	Wire short, seat adjustment.	2st / 2p
23.	SW-01195	Vajerfäste	Wire bracket, seat adjustment	2st / 2p
24.	61101-0306	Förlängare bromsspak.	Extender brake lever.	1st / 1p
25.	7-245103-CI	svampformat handtag	Brake lever.	1st / 1p
26.	7MC6S-8x70	Sexknatskruv M8x70	Hexagon screw M8x70	4st / 4p
*=		Komplett med klämbäckar.	Complete with clamping jaws.	
**=		Sitthöjdsrelage komplett med alla ingående delar.	Seat height adjustment complete.	

Bild 5  
Picture 5

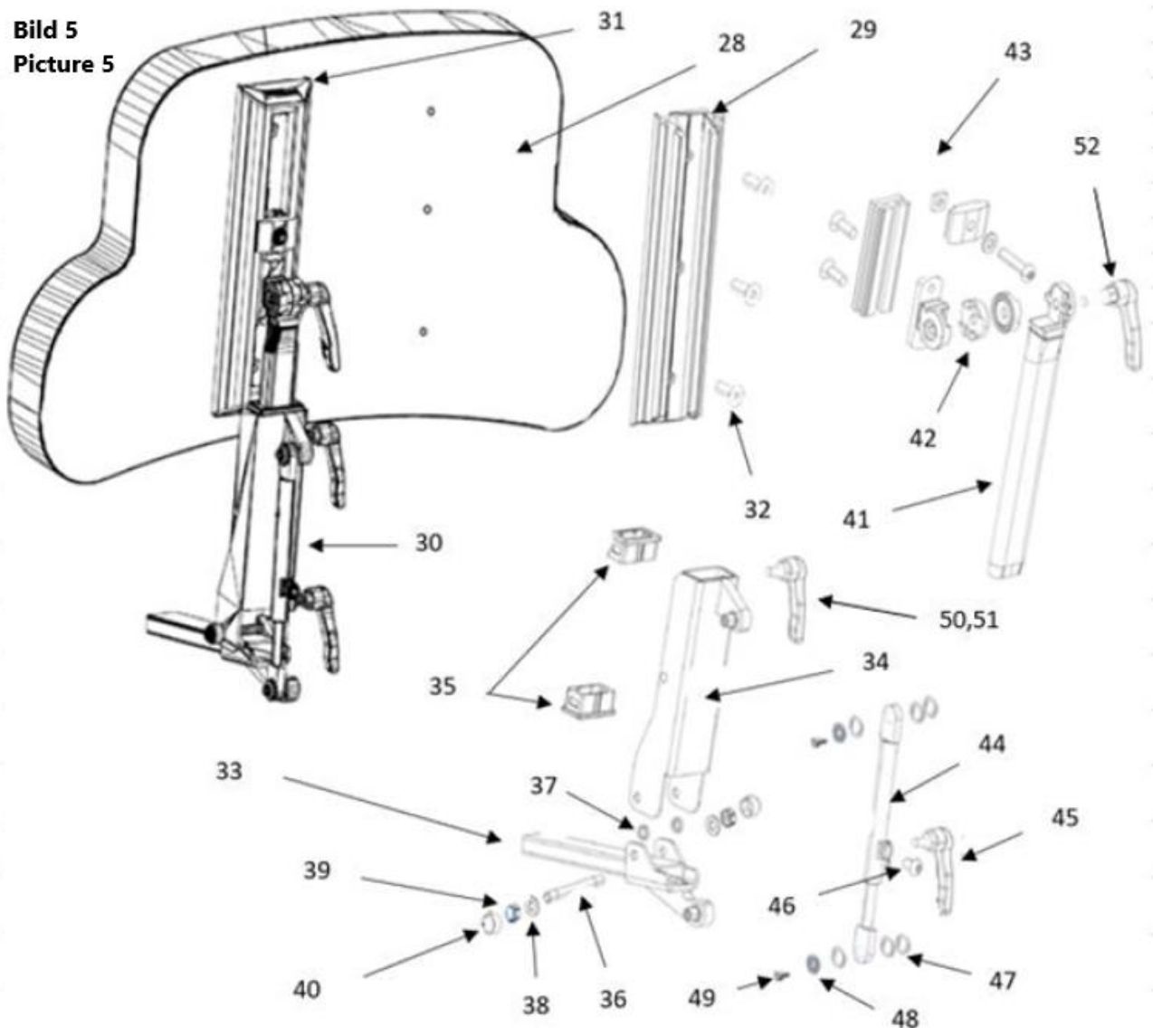

Pos.	Art.nr / part.nr	Benämning	Description	Antal. Quantity
		Bild 5	Picture 5	
28a.	634133-6010	Ryggstomme EXL 55x35 sv.Atlant.	Backrest EXL 55x35 black Atl.	1st / 1p
21b.	634233-6010	Ryggstomme EXL 65x35 sv.Atlant.	Backrest EXL 65x35 black Atl.	1st / 1p
29.	227001-6000	Ryggprofil ABC hög rygg 280mm.	Backrest profile L0280mm	*2st / 2p
30.	227001-6000	Multirygg manuell inställning.	Multi backrest manual.	*2st / 2p
31.	SW-01502	Plastavslutning ryggprofil.	Plastic cover backrest profile.	*4st / 4p
32.	7F6S-16x20	Skruv MF6S-6x20 FZB	Screw MF6S-6x20 FZB	*6st / 6p
33.	SW-01985	Ryggstolpe nedre del.	Backrest pole, lower part.	*2st / 2p
34.	SW-020269	Ryggstolpe övre del.	Backrest pole, upper part.	*2st / 2p
35.	324101-4400	Plastplugg multirygg.	Plastic plug Multi backrest.	*4st / 4p
36.	SW-01999	Pinnbult M8 Multirygg.	Pin bolt M8 Multi backrest.	*2st / 2p
37.	7DIST-05-8-12-3	Distans	Distance	*4st / 4p
38.	7BRB-8,4x16 SK	Planbricka 8,4x16x1,5 svart.	Washer 8,4x16x1,5 black	*4st / 4p
39.	7LOCKING-M8L	Låsmutter M8 DIN 985 FZB	Nut M8 nylock.	*4st / 4p
40.	7KH-13-8	Mutterskydd M8.	Nut cover M8.	*4st / 4p
41.	SW02034	Ryggstolpe Multirygg	Backrest pole Multi backrest.	*2st / 2p
42.	624001-9000	Kugglås.	Cogg wheel lock.	*4st / 4p
43.	274001-6006	Profilinfästning förmonterad.	Profile attachment.	*2st / 2p
44.	229001-6008	Ryggvinkling stång manuell.	Backrest adjuster manual.	*2st / 2p
45.	7WN500-8x16	Låsspak WN 500 M8x16.	One hand lever WN 500 M8x16.	*2st / 2p
46.	7K6S-8x12	Kullrig skruv M8x12 svart.	Screw K6S M8x12 black	*2st / 2p
47.	7PLASTB-10,5x18	Plastbricka 10,5x18x1,0	Plastic washer 10,5x18x1,0	*12st / 12p
48.	7BRB-5,3x10	Bricka 5,3x10x1,0 FZB	Washer 5,3x10x1,0 FZB	*4st / 4p
49.	7MC6S-5x10 LOCK	Skruv M5x10 FZB med gänglim.	Screw M5x10 FZB Locktite.	*4st / 4p
50.	7WN500-8x20	Låsspak WN 500 M8x20	One hand lever WN500 M8x20	*2st / 2p
51.	7S-RATT-M8x20	Stjärnratt M8x20 diameter 60	Star Wheel M8x20 diameter 60	*2st / 2p
52.	7LS-M8xR63x32	Låsspak M8 R63 32	One hand lever M8 R63 32	*2st / 2p
* = Antal för komplett rygg med två stolpar. Quantity for complete backrest.				
**= Ryggstommen levereras med aluprofiler monterade. Backrest complete with aluprofile.				

**Bild 6**  
**Picture 6**

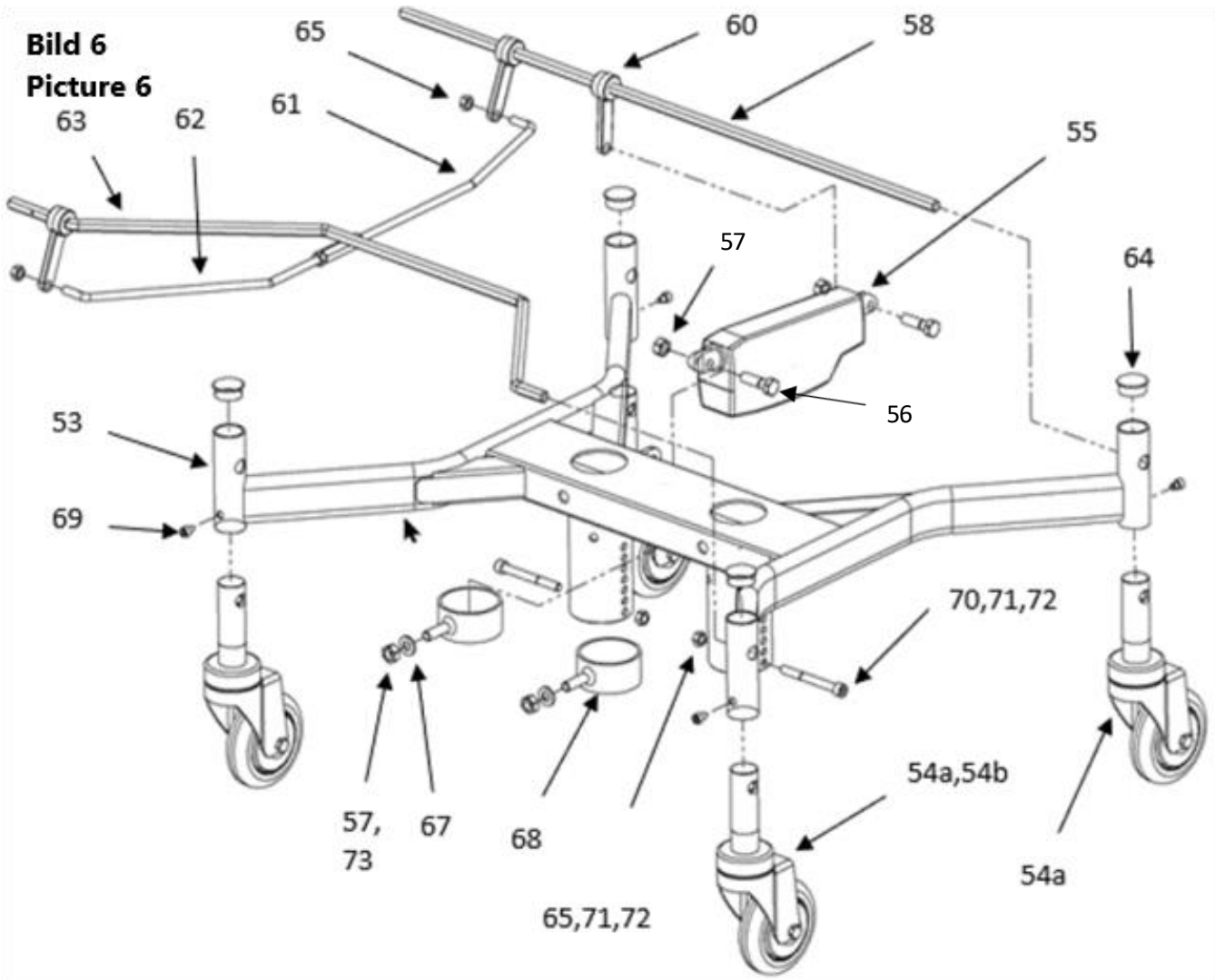



Pos.	Art.nr / part.nr	Benämning	Description	Antal. Quantity
		Bild 6	Picture 6	
53.	SW-00046	Chassi EXL	Under carriage EXL	1st / 1p
54a.	724005-2100-S	Hjul 100mm centralbroms.	Wheel 100mm central brake.	2st / 2p
54b.	724005-2000-S	Hjul 100mm med gaffel.	Wheel 100mm with castor.	2st / 2p
55.	491459	Ställdon TA16-2022-021	Actuator for brake.	1st / 1p
56.	7M6M-10x38 spec	Skruv M10x38 special JEA.	Screw M10x38 special.	3st / 3p
57.	7KL-10	Låsmutter M10	Nut M10	3st / 3p
58.	SW-00049	Sexkantstång bak EXL	Hex. rod back EXL	1st / 1p
59.	7SCHALHBEL	Bromsarm 4-hjulsbroms.65mm	Brake arm 4-wheel brake	2st / 2p
60.	7---"--- -EVM-B	Bromsarm böjd för 4 hjulsbroms.	Brake arm arched.	1st / 1p
61.	SW-00051	Bromslänk bak.	Brake rod, back.	1st / 1p
62.	SW-00052	Bromslänk främre.	Brake rod, front.	1st / 1p
63.	SW-00048	Sexkantstång, vinklad.	Hex. rod angled.	1st / 1p
64.	7SFL-32	Plastplugg.	Plastic cover.	4st / 4p
65.	7KL-8	Låsmutter M8.	Nut M8.	5st / 5p
66.	7KL-10	Låsmutter M10	Nut M10	3st / 3p
67.	7BRB-10,5x20	Planbricka 10,5x20x2	Washer 10,5x20x2	2st / 2p
68.	649101-1000	Låsrör aluminium elställdon.	Locking tube, actuator	2st / 2p
69.	7MC6S-6x10	Skruv M6x10 insex.	Screw M6x10, Allen.	4st / 4p
70.	7MC6S--8x85	Sexkantskruv M8x85	Hexagon scerw M8x85	2st / 2p
71.	7PRB-20x9x3	Plastbricka 20x9x3	Plastic washer 20x9x3	8st / 8p
72.	7KH13-8	Mutter kåpa M8	Nut cover M8	6st / 6p
73.	7KH13-10	Mutterkåpa M10	Nut cover M10	2st / 2p