


Monteringsanvisning Luft til korsryggstøtte



Montering av luft til korsryggstøtte

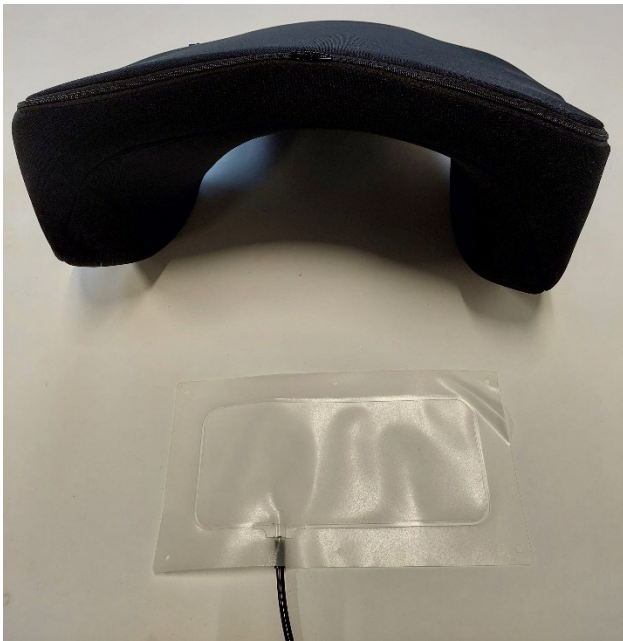


Luftblæren til korsryggstøtten finnes i ulike størrelser for å passe til alle ryggstøttestørrelser. Slangen er plassert på siden av midten for å legge til rette for en myk bøy på slangen.



Glidelåsen er utstyrt med doble dragere for å gjøre det mulig å plassere pumpeblæren på begge sidene av ryggstøtten.



Åpne glidelåsen helt med dragerne til hver sin side. Dra trekket opp over bolstøtten for å minske trykket på skummet.

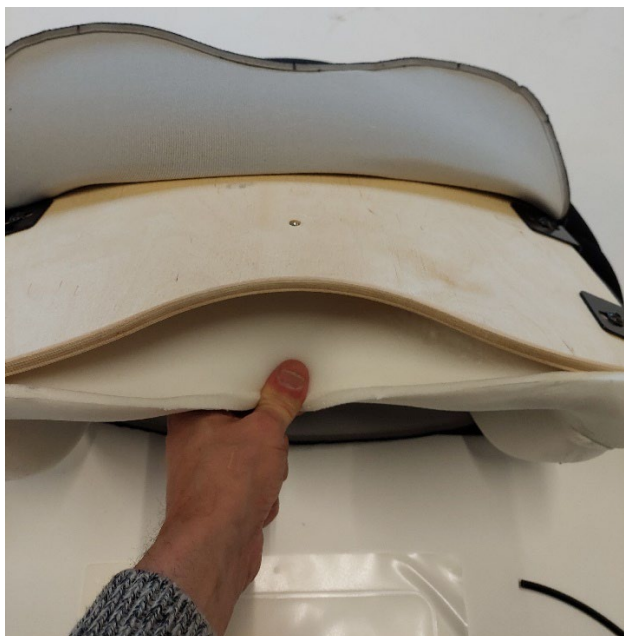

Skummet er bare limt ytterst i kantene og er tilpasset for luftblæren. Brett ned skummet.



Før inn luftblæren, vendt slik at utgangen på slangen kommer på motsatt side, mot den tiltenkte siden for pumpeblæren.

Unngå skarpe bøyninger på slangen for å forhindre at den bøyer seg og begrenser luftstrømmen.





Dra trekket tilbake og lukk glidelåsen.

Prøv å pumpe den opp og justere trykket, samt plassering ved behov.