

Junior

Junior är framtagen för att ge barn/juniorer med funktionshinder möjlighet till en god sittställning vid vardagens alla olika moment i skola eller daghem, vid måltider och lekstunder. Ett brett tillbehörsprogram och lättsköta funktionella inställningar gör det enkelt att anpassa stolen efter varje barns individuella behov. Juniorstolen har ett eget chassi, stolen är anpassad för begränsade och trånga utrymmen.

Typ av funktionsnedsättning

lätt måttlig omfattande

inne

ute

barn

vuxen



SITTSYSTEM

SitRite



KLÄDSEL



Svart
textil

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god position medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att vara tjockare under sittbenen än under låren.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra armarnas rörelsefrihet. Modellen SitRite LS (Lateral Support) har en mer omslutande rygg. SitRite LS är bland annat framtagen för personer med muskelsvaghet i bålen och korrigerbar scolios. De omslutande sidorna är uppbyggda kring polsterbeklädda plåtar som kan justeras med användaren i sittande läge.

Både SitRite och SitRite LS har möjlighet att monteras med svankblåsa för extra stöd.

Sits (bredd x djup)	29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40, 40x45 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	27-52 cm
Sittdjup	32-45 cm
Sitshöjd, gas ¹⁾	41-56 cm, 48-68 cm
Sitshöjd, el ¹⁾	41-58 cm, 45-70 cm
Sitstilt, el & gas	-20° to 12°
Sitstils, vev & vantskruv	-16° to 20°
Ryggstöd höjd, ställbart	37-54 cm
Rygg (bredd x höjd) SitRite SitRite LS	25x32, 27x37, 35x43 cm 14x32, 17x37, 24x43 cm
Ryggvinkling	30°
Armstöd höjd, justerbart	0-26 cm
Armstödsplatta (längd x bredd x tjocklek)	25x8x3, 25x8x5 cm

¹⁾ Sitshöjd justeras med hjälp av gas eller el där båda varianterna finns som låg respektive hög sitshöjd. Sitthöjd mäts som höjd till under sätet. Båda är uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen "låg, hög".

CHASSI

Junior



Juniorchassit är smalare och mer kompakt för att det ska kunna passa in i miljöer där utrymmet är litet, såsom klassrum. Det erbjuder fortfarande gott om sparkutrymme och har mycket lätttrullande hjul som följer golvet's ojämnheter. Den lätt-tåtkomliga inställbara bromsen är inte i vägen för sidoflyttning. Bakhjulsbroms är standard, men den går lätt att ändra om till framhjulsbroms eller fyrhjulsbroms. Det tvådelade chassit gör att stolen står stadigt även på ojämnt underlag.

Chassi, bredd	52 cm
Chassi, längd	55 cm
Totalvikt	22 kg (gas), 29 kg (el)
Brukarvikt, max	80 kg
Broms	Chassimonterad
Hjulstorlek	100 mm