



# Sprängskiss Volaris

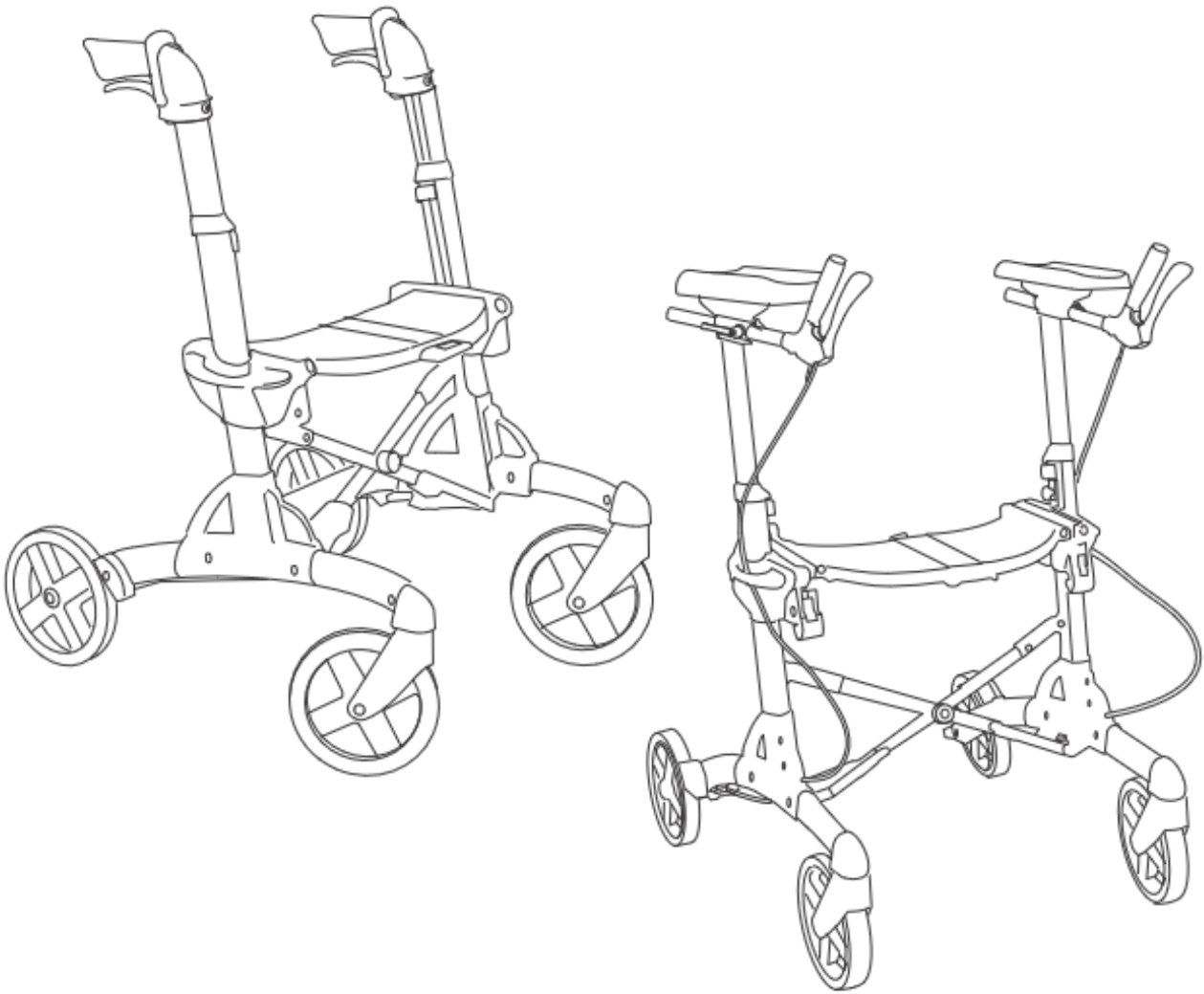

## Innehåll

Sprängskiss .....	1
Compact/Kid .....	3
Reservdelslista Compact/Kid .....	4
Mini hög/låg .....	5
Reservdelslista Mini hög/låg .....	6
Smart/Discovery/Patrol .....	7
Reservdelslista Smart/Discovery/Patrol .....	8
Discovery XL/Patrol XL .....	9
Reservdelslista Discovery XL/Patrol XL .....	10
RA/RA låg/low .....	11
Reservdelslista RA/RA låg/low .....	12
Discovery HP/hög/låg .....	13
Reservdelslista Discovery HP/hög/låg.....	14


# Compact/Kid

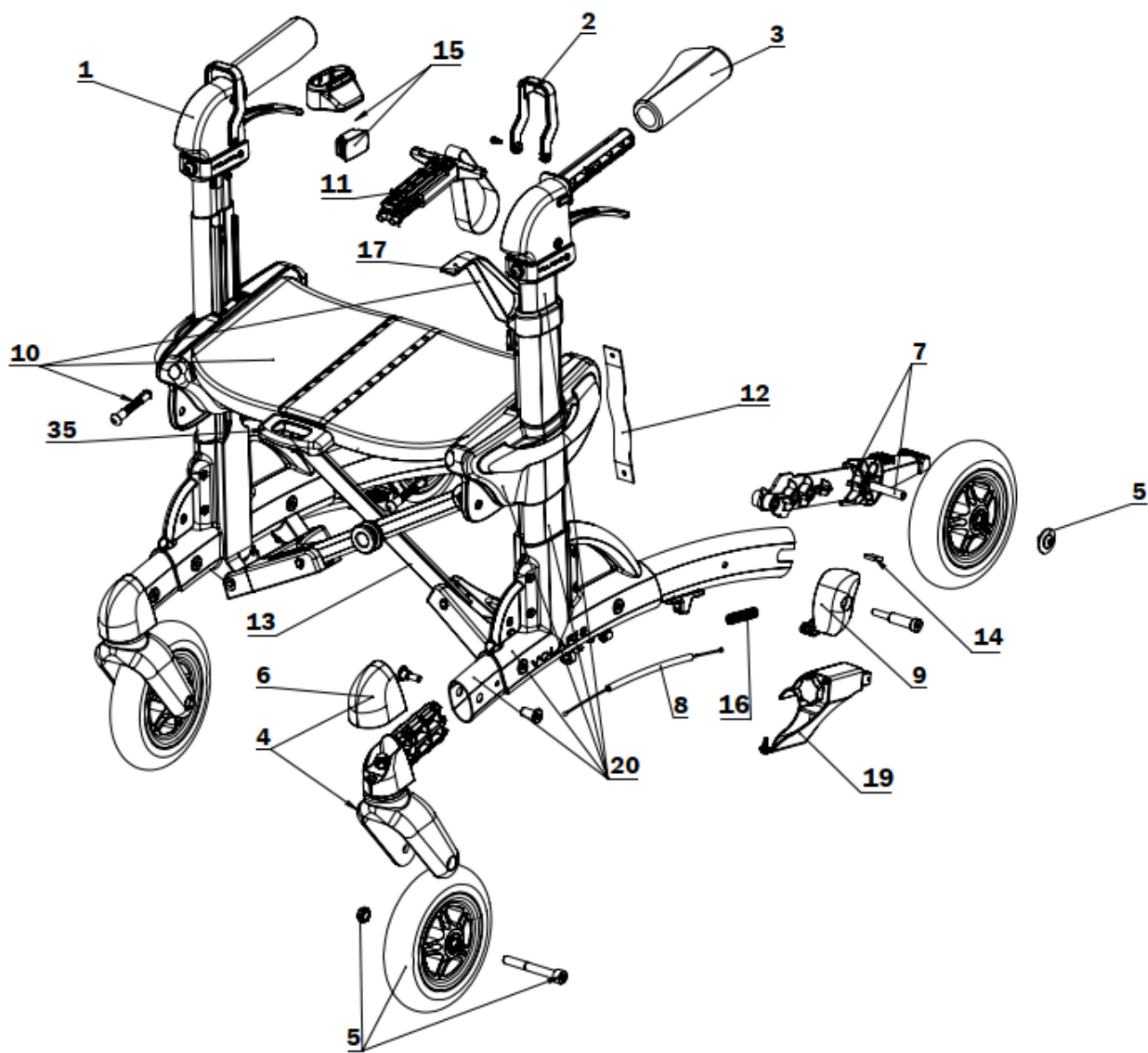

## Reservdelslista Compact/Kid


1.	4017942062	Bromshandtag kpl låg ram orange vänster
	4017942072	Bromshandtag kpl låg ram orange höger
	4017942063	Bromshandtag kpl låg ram svart vänster
	4017942073	Bromshandtag kpl låg ram Svart höger
	4017972060	Bromshandtag kpl orange vänster
2.	4017941950	Bromsbygel orange
	4017941951	Bromsbygel svart
3.	4017940225	Handtagsgrepp ergo vänster
	4017940226	Handtagsgrepp ergo höger
	4017942400	Handtag Kid vänster
	4017942410	Handtag Kid höger
4.	4017942390	Framgaffel Compact/Kid med hjul
	4017941080	Framgaffel smart/Mini med hjul
5.	4017940304	Bakhjul Compact/Kid inklusive skruv
6.	4017941050	Huv framgaffel
7.	4017941026	Bakhjulsinfästning Compact/Kid vänster
	4017941027	Bakhjulsinfästning Compact/Kid höger
8.	4017940210	Vajer inklusive mutter
9.	4017941570	Bromsok vänster
	4017941580	Bromsok höger
10.	4017941280	Sits komplett orange band
	4017942281	Sits komplett svart band
11.	4017942550	Fällspärr komplett orange band
	4017942551	Fällspärr komplett svart band
12.	4017940202	Transportband fast inklusive skruv
13.	4017941394	Kryss komplett Compact/Kid komplett
14.	4017940032	Bromsbleck par reservdelskit
15.	4017941352	Handtagsjustering komplett orange
16.	4017940142	Bromsfjäder
17.	4017940161	Hopfällningsband orange
	4017940242	Hopfällningsband svart
19.	4017911780	Släpbroms komplett
20.	4017942680	Sidopanel Compact/Kid vänster
	4017942690	Sidopanel Compact/Kid höger
35.	4017911240	Handtag sits svart
	4017911241	Handtag sits orange

Mini hög/låg

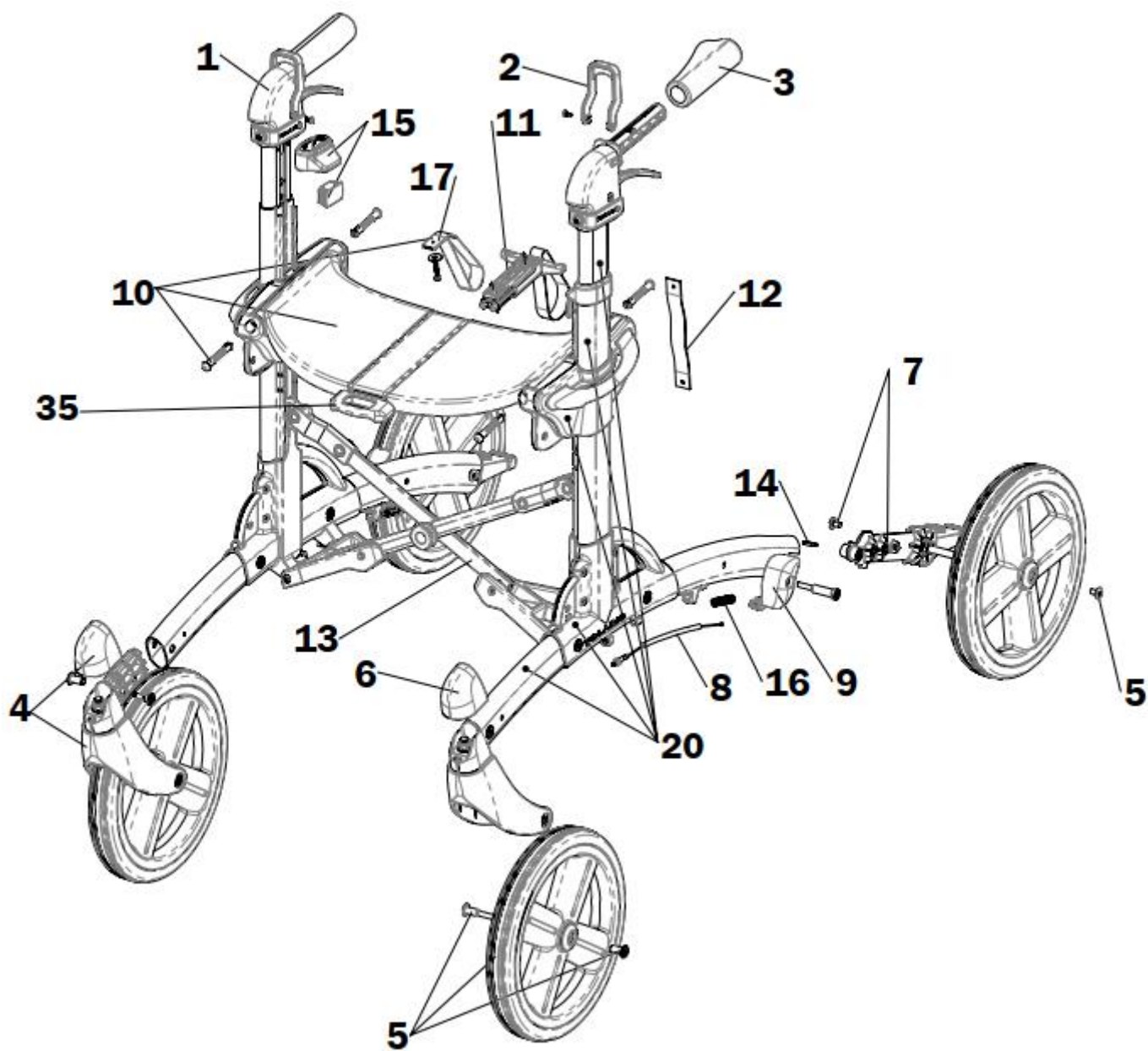

## Reservdelslista Mini hög/låg


1.	4017942060	Bromshandtag komplett orange vänster
	4017942070	Bromshandtag komplett orange höger
	4017942062	Bromshandtag komplett låg ram orange vänster
	4017942072	Bromshandtag komplett låg ram orange höger
	4017942061	Bromshandtag komplett svart vänster
	4017942071	Bromshandtag komplett svart höger
	4017942063	Bromshandtag komplett låg ram svart vänster
	4017942073	Bromshandtag komplett låg ram svart höger
2.	4017941950	Bromsbygel orange
	4017941951	Bromsbygel svart
3.	4017940225	Handtagsgrepp Ergo vänster
	4017940226	Handtagsgrepp Ergo höger
4.	4017941080	Framgaffel komplett inklusive hjul
5.	4017941003	Hjul Smart inklusive skruv
6.	4017941050	Huv framgaffel
7.	4017941020	Bakhjulsinfästning Smart komplett vänster
	4017941021	Bakhjulsinfästning Smart komplett höger
8.	4017940210	Vajer inklusive mutter
9.	4017941570	Bromsok Smart vänster
	4017941580	Bromsok Smart höger
10.	4017941280	Sits komplett orange band
	4017941282	Sits komplett svart band
11.	4017942550	Fällspärr komplett orange band
	4017942551	Fällspärr komplett svart band
12.	4017940202	Transportband fast inklusive skruv
13.	4017941390	Kryss Smart komplett
14.	4017940032	Bromsbleck par reservdelskit
15.	4017941352	Handtagsjustering komplett orange
16.	4017940142	Bromsfjäder
17.	4017940161	Hopfällningsband orange
	4017940242	Hopfällningsband svart
19.	4017911780	Släpbroms komplett
20.	4017942750	Sidopanel Mini hög vänster
	4017942740	Sidopanel Mini hög höger
	4017942770	Sidopanel Mini låg vänster
	4017942760	Sidopanel Mini låg höger
35.	4017911240	Handtag sits svart
	4017911241	Handtag sits orange

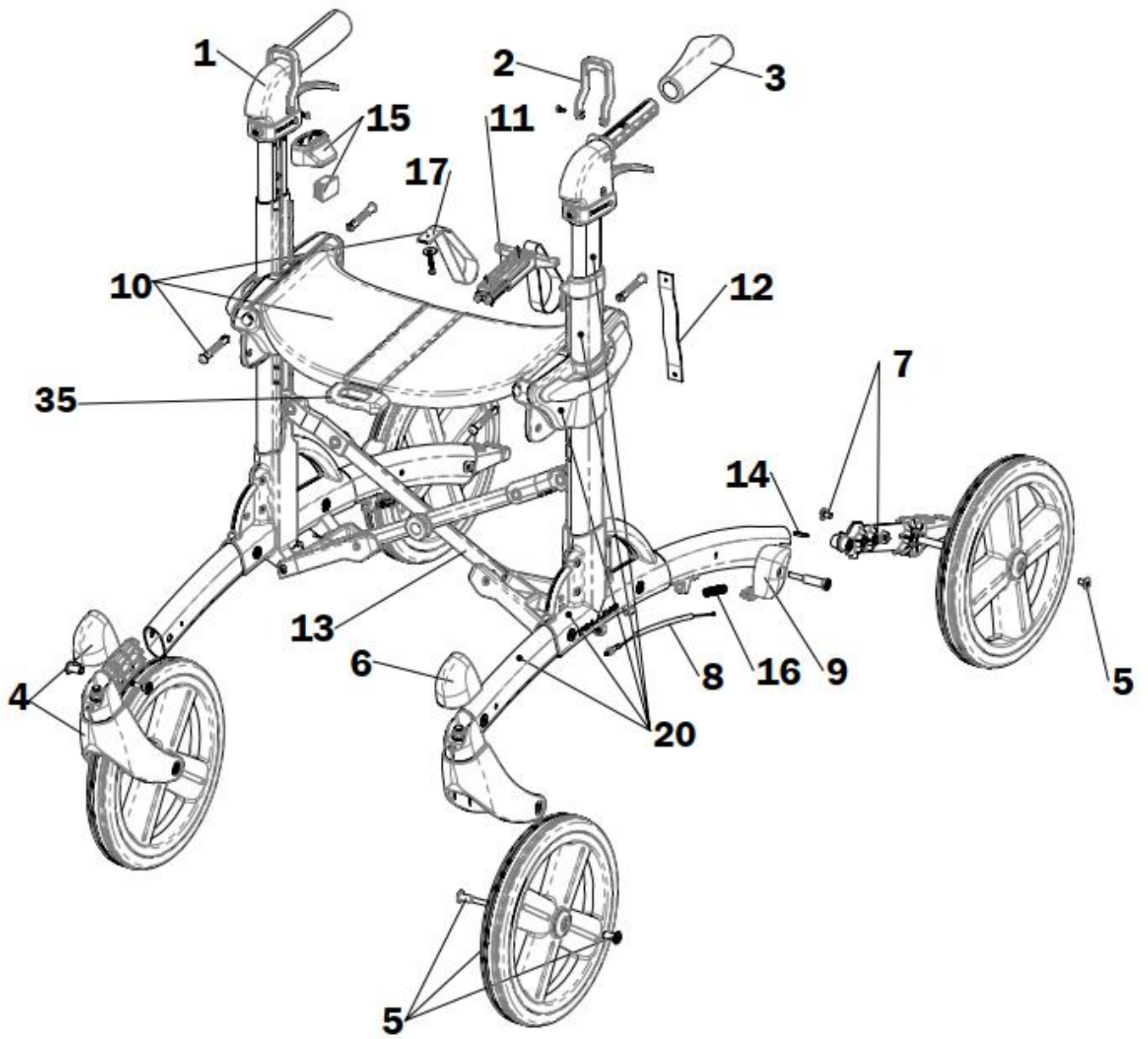

## Reservdelslista Smart/Discovery/Patrol


1.	4017942060	Bromshandtag kpl orange, vänster
	4017942070	Bromshandtag kpl orange, höger
	4017942062	Bromshandtag kpl låg ram orange, vänster
	4017942072	Bromshandtag kpl låg ram orange, höger
	4017942061	Bromshandtag kpl svart, vänster
	4017942071	Bromshandtag kpl svart, höger
	4017942063	Bromshandtag kpl låg ram svart, vänster
	4017942073	Bromshandtag kpl låg ram svart, höger
2.	4017941950	Bromsbygel orange
	4017941951	Bromsbygel svart
3.	4017940225	Handtagsgrepp Ergo vänster
	4017940226	Handtagsgrepp Ergo höger
4.	4017941080	Framgaffel Smart m hjul
	4017942180	Framgaffel Discovery m hjul
5.	4017941003	Hjul Smart inkl skruv
	4017942161	Hjul Discovery inkl skruv
	4017941851	Hjul Patrol inklusive skruv
	4017941050	Huv framgaffel
7.	4017941020	Bakhjulsinfästning Smart kpl vänster
	4017941021	Bakhjulsinfästning Smart kpl höger
	4017941024	Bakhjulsinfästning Discovery kpl vänster
	4017941025	Bakhjulsinfästning Discovery kpl höger
	4017941022	Bakhjulsinfästning Patrol kpl vänster
	4017941023	Bakhjulsinfästning Patrol kpl höger
8.	4017940210	Vajer inklusive mutter
9.	4017941570	Bromsok Smart vänster
	4017941580	Bromsok Smart höger
	4017941571	Bromsok Patrol, Discovery vänster
	4017941581	Bromsok Patrol, Discovery höger
10.	4017941280	Sits komplett orange band
	4017941282	Sits komplett svart band
	4017941283	Sits komplett wide orange band
	4017941284	Sits komplett wide svart band
11.	4017942550	Fällspärr komplett orange band
	4017942551	Fällspärr komplett svart band
12.	4017940202	Transportband fast
13.	4017941390	Kryss Smart komplett
	4017941391	Kryss XL komplett
14a.	4017940297	Bromsbleck dubbel par reservdelskit
14b.	4017940032	Bromsbleck par reservdelskit
15.	4017941352	Handtagsjustering komplett orange
16.	4017940142	Bromsfjäder
17.	4017940161	Hopfällningsband orange
	4017940242	Hopfällningsband svart
18.	4017940265	Distans XL sits
20.	4017942600	Sidopanel Smart vänster
	4017942610	Sidopanel Smart höger
	4017942620	Sidopanel Smart låg vänster
	4017942630	Sidopanel Smart låg höger
	4017942640	Sidopanel Patrol vänster
	4017942650	Sidopanel Patrol höger
	4017942660	Sidopanel Patrol låg vänster
	4017942670	Sidopanel Patrol låg höger
35.	4017911240	Handtag sits svart
	4017911241	Handtag sits orange



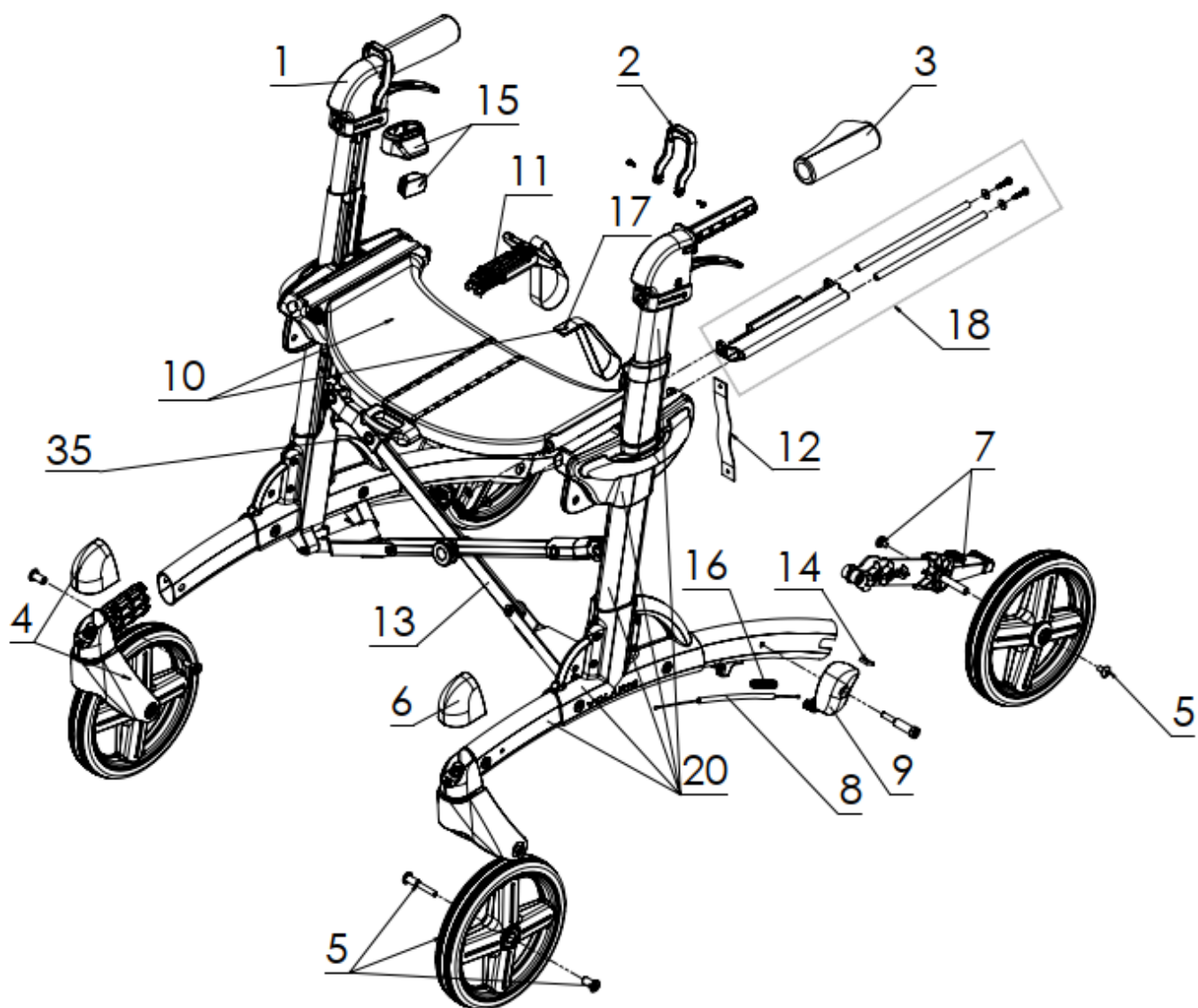


## Reservdelslista Discovery XL/Patrol XL

1.	4017942060	Bromshandtag komplett orange vänster
	4017942070	Bromshandtag komplett orange höger
	4017942062	Bromshandtag komplett låg ram orange vänster
	4017942072	Bromshandtag komplett låg ram orange höger
	4017942061	Bromshandtag komplett svart vänster
	4017942071	Bromshandtag komplett svart höger
	4017942063	Bromshandtag komplett låg ram svart vänster
	4017942073	Bromshandtag komplett låg ram svart höger
2.	4017941950	Bromsbygel orange
	4017941951	Bromsbygel svart
3.	4017940225	Handtagsgrepp Ergo vänster
	4017940226	Handtagsgrepp Ergo höger
4.	4017942180	Framgaffel Discovery med hjul
	4017941870	Framgaffel Patrol med hjul
5.	4017942161	Hjul Discovery inklusive skruv
	4017941851	Hjul Patrol inklusive skruv
6.	4017941050	Huv framgaffel
7.	4017941024	Bakhjulsinfästning Discovery komplett vänster
	4017941025	Bakhjulsinfästning Discovery komplett höger
	4017941022	Bakhjulsinfästning Patrol komplett vänster
	4017941023	Bakhjulsinfästning Patrol komplett höger
8.	4017940210	Vajer inklusive mutter
9.	4017941571	Bromsok Patrol, Discovery vänster
	4017941581	Bromsok Patrol, Discovery höger
10.	4017941283	Sits wide Komplet orange band
	4017941284	Sits wide Komplet svart band
11.	4017942550	Fällspärr komplett orange band
	4017942551	Fällspärr komplett svart band
12.	4017940309	Transportband XL
13.	4017941393	Kryss XL komplett
14a.	4017940297	Bromsbleck dubbel par reservdelskit
14b.	4017940032	Bromsbleck par reservdelskit
15.	4017941352	Handtagsjustering komplett orange
16.	4017940142	Bromsfjäder
17.	4017940161	Hopfällningsband orange
	4017940242	Hopfällningsband svart
18.	4017940265	Distans XL sits
19.	4017911780	Släpbroms komplett
20.	4017942640	Sidopanel Patrol vänster
	4017942650	Sidopanel Patrol höger
	4017942660	Sidopanel Patrol låg vänster
	4017942670	Sidopanel Patrol låg höger
35.	4017911240	Handtag sits svart
	4017911241	Handtag sits orange

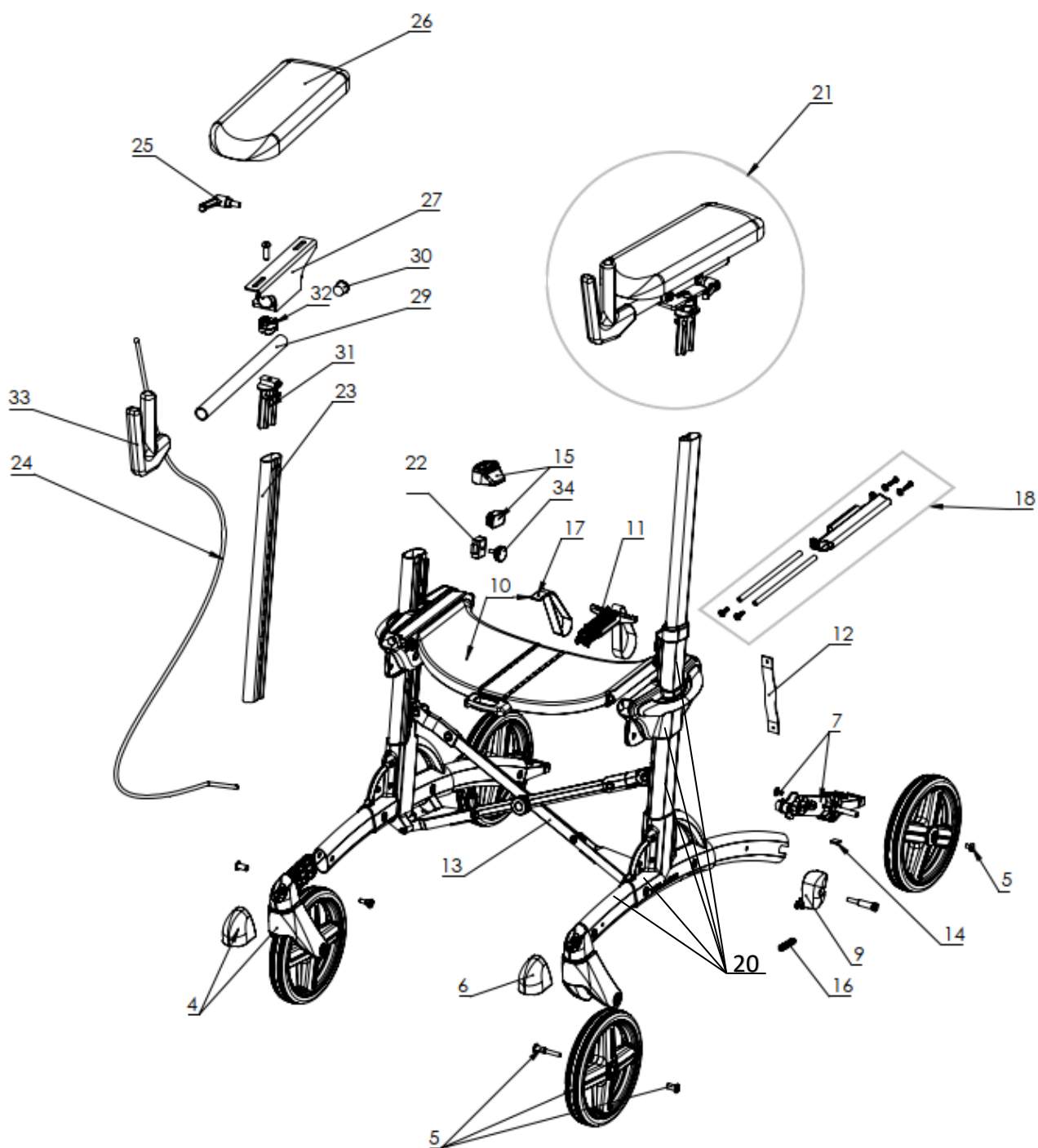

## Reservdelslista RA/RA låg

4.	4017941080	Framgaffel inklusive hjul
5.	4017941003	Hjul Smart inklusive skruv
6.	4017941050	Huv framgaffel
7.	4017941020	Bakhjulsinfästning Smart komplett vänster
	4017941021	Bakhjulsinfästning Smart komplett höger
9.	4017911570	Bromsok komplett vänster
	4017911580	Bromsok komplett höger
10.	4017941283	Sits wide komplett orange band
	4017941284	Sits wide komplett svart band
11.	4017942550	Fällspärr komplett orange band
	4017942551	Fällspärr komplett svart band
12.	4017940309	Transportband RA
13.	4017941393	Kryss XL komplett
14.	4017940032	Bromsbleck par reservdelskit
15.	4017941352	Handtagsjustering komplett orange
16.	4017930321	Bromsfjäder
17.	4017940161	Hopfällningsband orange
	4017940242	Hopfällningsband svart
18.	4017940265	Distans XL sits
19.	4017911780	Släpbroms komplett
20.	4017942720	Sidopanel RA vänster
	4017942730	Sidopanel RA höger
	4017912600	Chassi RA komplett
	4017912601	Chassi RA V2 komplett
21.	2400350H	Underarmstöd komplett höger
	2400350V	Underarmstöd komplett vänster
22.	S7-135	Höjdlåsning
23.	S7-139	Handtagsprofil
	S7-138	Handtagsprofil låg modell
24.	S7-141	Bromsvajer RA
	S7-142	Bromsvajer enhandsbroms RA
25.	7WN500-8*16	Låsspak
26.	400350	Armstödsdyna RA
27.	S7-112	Fäste armstödsdyna
29.	S7-119	Handtagsrör
30.	7IKP-22*19	Ändavslutning IKP-2218-20S
31.	S7-118	Profilfäste
32.	2400340	Kugg led inklusive skruv
33.	719500-1000	Bromshandtag RA
34.	7RATT-M5*10 RA	Ratt R3010 M5*10S
35.	4017911240	Handtag sits svart
	4017911241	Handtag sits orange
36.	2400351	Stabilitetsband komplett med fäste

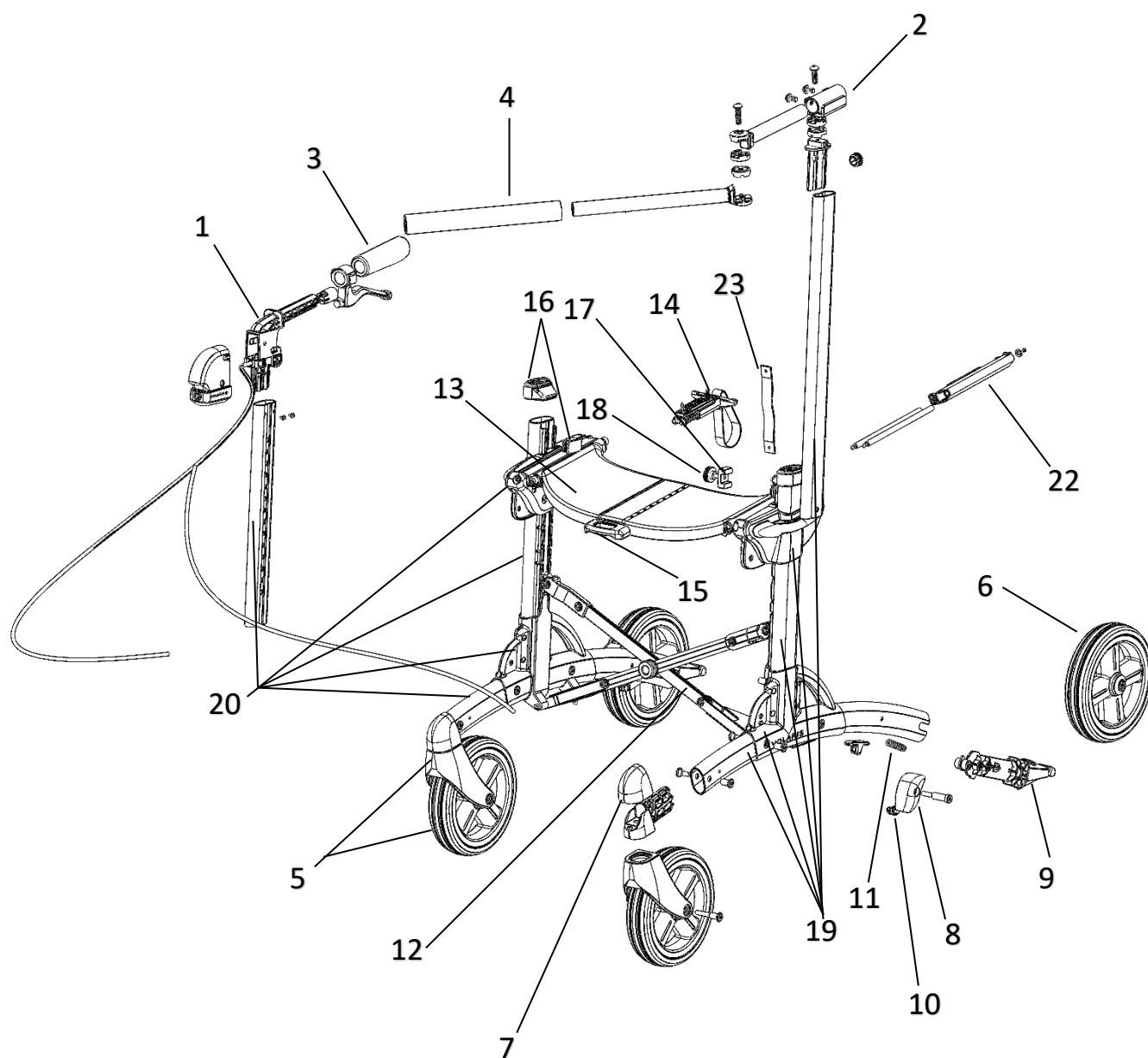

## Reservdelslista Discovery HP/hög/låg

1.	2461005V 2461005H	Bromshandtag enhandsbroms komplett vänster Bromshandtag enhandsbroms komplett höger
2.	2466100	HP handtag komplett vänster/höger
3.	4017940225 4017940226 4017940227	Handtagsgrepp Ergo par höger + vänster Handtagsgrepp Ergo vänster Handtagsgrepp Ergo höger
4.	7-7000185	Rörpolster HP handtag
5.	4017941080	Framgaffel med hjul
6.	4017942161	Hjul inklusive skruv
7.	4017941050	Huv framgaffel
8a.	4017941571	Bromsok vänster
8b.	4017941581	Bromsok höger
9a.	4017941024	Bakhjulsinfästning vänster
9b.	4017941025	Bakhjulsinfästning höger
10.	4017940297	Bromsbleck dubbel par reservdelskit
11.	4017940142	Bromsfjäder
12.	4017941393	Kryss XL komplett
13a.	4017941283	Sits wide komplett orange band
13b.	4017941284	Sits wide komplett svart band
14a.	4017942550	Fällspärr komplett orange band
14b.	4017942551	Fällspärr komplett svart band
15a.	4017911240	Handtag sits svart
15b.	4017911241	Handtag sits orange
16.	4017941352	Handtagsjustering komplett orange
17.	S7-135	Höjdlåsning
18.	7RATT-M5*10RA	Ratt R3010 M5*10 S
19.	4017940280 4017940290	Sidopanel HP monterat vänster sida Sidopanel HP monterat höger sida
20.	4017942600 4017942610 4017942620 4017942630	Sidopanel vänster Sidopanel höger Sidopanel låg vänster Sidopanel låg höger
21.	4017940265	Distans XL sits