

Gebruiksaanwijzing, Nederlands

EUROFLEX[®]

Werkstoel JUNIOR



Eurovema

Inhoud

- INTRODUCTION 4
- CONTACT DETAILS 4
- USER INFORMATION 4
- SERVICE AND WARRANTY..... 4
- ASSEMBLY UPON DELIVERY 5
- SAFETY RULES 5
- SYMBOL KEY 7
- WARNING 8
- REPORTING OF ACCIDENTS AND INCIDENTS..... 9
- CLEANING 9
- STORAGE..... 9
- LABEL 10
- CE MARKING 10
- OVERVIEW - MARKING 11
- OVERVIEW - SEAT UNIT 12
- CHASSIS OVERVIEW 13
- BACK SUPPORT - HEIGHT..... 14
 - Side support, LS Back..... 14
- BACK SUPPORT - MANUAL TILT 15
- BACK TILT - ELECTRONIC..... 16
- BACK SUPPORT - SEAT DEPTH 17
- SEAT TILT - MANUAL..... 18
- SEAT HEIGHT - GAS AND ELECTRIC..... 19
- ARMREST - FIXED..... 20
- ARMREST - RETRACTABLE 21
- SEAT HEIGHT - MANUAL..... 22
 - SEAT HEIGHT - ELECTRIC..... 23
- SEAT ROTATION..... 24
- FOOTPLATE - HEIGHT 25
- LEG SUPPORT, FULL FOOTPLATE - TILT 26
- FOOTPLATE - TILT 27
- BIFURCATED FOOTREST - HEIGHT 28
- BIFURCATED LEG SUPPORTS - TILT 29
- BIFURCATED FOOTPLATES - ANGLE..... 30
- FOOT RING..... 31

LEVER BRAKE AND FOOT BRAKE.....	32
CHARGING - GENERAL	34
CHARGER INDICATORS	35
TECHNICAL DATA - CHARGER	35
TECHNICAL DATA - ELECTRONICS.....	36
TECHNICAL DATA - BATTERY	36
REPLACING THE BATTERY.....	36
TECHNICAL DATA - SEAT SYSTEM.....	37
TECHNICAL DATA - CHASSIS	37
TECHNICAL INFORMATION.....	37
ENVIRONMENT.....	37
DESTRUCTION.....	38

INLEIDING

Wij feliciteren u van harte met uw keuze voor een werkstoel! We hopen dat u tevreden zult zijn met dit Euroflex-product van Eurovema, dat is ontworpen en gebouwd in Gislaved, Zweden. De werkstoel is ontworpen om te voldoen aan zeer hoge eisen op het gebied van ergonomie, zitcomfort en functie. De stoel heeft veel verstelmogelijkheden waardoor hij aan iedere behoefte aangepast kan worden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door, zodat u gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van uw stoel. Eurovema behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze handleiding en de inhoud ervan.

CONTACTDETAILS

Fabrikant 

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Zweden
Telefoon: +46 371 390 100
www.eurovema.se
info@eurovema.se

GEBRUIKERSINFORMATIE

- Deze werkstoel is geclassificeerd als een klasse 1 medisch apparaat.
- Het product is bedoeld om te worden gebruikt door mensen die hulp nodig hebben bij het verplaatsen of het uitvoeren van activiteiten terwijl ze zitten en ondersteuning nodig hebben om uit een stoel te komen.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Er zijn geen contra-indicaties bekend.
- Het maximale gebruikersgewicht bedraagt 80 kg, afhankelijk van het gebruikte zitsysteem.
- Om de stoel aan zwaardere gebruikers aan te passen, kunt u contact opnemen met Eurovema.
- Bij gebruik in overeenstemming met deze gebruikershandleiding is de verwachte levensduur van het product tien jaar.
- Het product is ontwikkeld en getest door Eurovema en onderworpen aan tests door een onafhankelijke testinstantie. Eurovema is ervoor verantwoordelijk dat het product veilig te gebruiken is.



Dit symbool waarschuwt voor situaties die risico's voor de gebruiker kunnen opleveren.



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.


SERVICE EN GARANTIE

Als de werkstoel dagelijks wordt gebruikt, moet deze eens in de twee jaar ter inspectie worden aangeboden. Dit is om te controleren of de functie en veiligheid van de stoel gedurende de gehele levensduur behouden blijven. De verwachte levensduur is 10 jaar bij gebruik in overeenstemming met onze instructies, vastgestelde onderhoudsintervallen en het beoogde gebruik. Als uw stoel onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke technische hulpcentrum.

We geven 4 jaar garantie op de metalen constructies in onze producten, 2 jaar garantie op andere onderdelen behalve bekleding, wielen en batterijen, waarvoor 1 jaar garantie geldt. Normale slijtage valt niet onder de garantie. We raden onze klanten aan om het product te gebruiken in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Voor instructies met betrekking tot onderhoud en revisie, **zie de Servicehandleiding**.

MONTAGE BIJ LEVERING

- Open de verpakking en controleer of er geen schade is opgetreden tijdens het transport. De werkstoel wordt geleverd zonder gemonteerde rugleuning en opklapbare arMLEUNINGEN.
- De arMLEUNINGEN zijn voorzien van stopschroeven en de rugleuning is voorzien van een stopkogel die tijdens montage en demontage moet worden ingedrukt om te voorkomen dat deze losraakt bij het verstellen van de rugleuning in de eindpositie.
- Monteer de rugleuning en de arMLEUNINGEN zoals weergegeven in de afbeeldingen en draai de vergrendelknop (1) vast.
- Monteer de stopschroeven (2) met behulp van een Phillips-schroevendraaier.

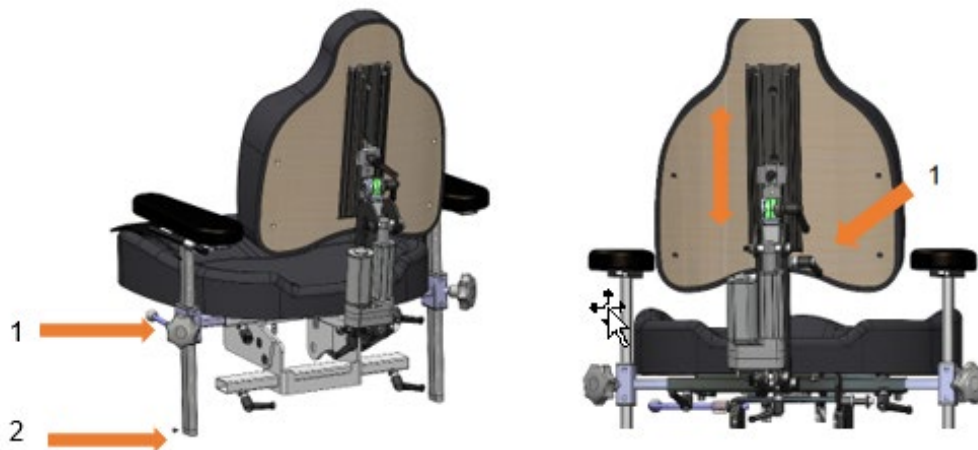

VEILIGHEIDSREGELS










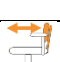

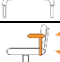



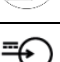




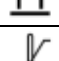



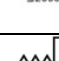
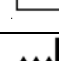
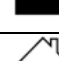





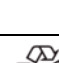

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de stoel gaat gebruiken.
- De werkstoel is bedoeld voor gebruik op een vlakke ondergrond in een normaal binnenklimaat.
- Wees voorzichtig bij het instellen van de handmatige zithoek terwijl u in de stoel zit, aangezien het risico bestaat dat u uit de stoel valt.
- Als u constateert dat de stoel schade heeft opgelopen of als u veranderingen in de werking constateert, neem dan onmiddellijk contact op met de serviceorganisatie (Technisch Hulpcentrum).
- Als de stoel regelmatig wordt gebruikt, moet deze routinematig ter inspectie naar de serviceorganisatie worden gestuurd.
- Zorg ervoor dat u de vergrendelknop en de schroeven goed vastdraait nadat u de aanpassingen hebt gemaakt.
- Let op schroeven of onderdelen die losraken of los passen, aangezien deze de veiligheid kunnen beïnvloeden. Neem onmiddellijk contact op met de serviceorganisatie.
- Service en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een door Eurovema geautoriseerde technicus.
- Er mogen uitsluitend originele onderdelen van Eurovema worden gebruikt.

- De stoel mag niet zijn uitgerust met andere accessoires of onderdelen dan die zijn goedgekeurd door Eurovema.
- Overschrijd het vermelde maximale gebruikersgewicht niet.
- Controleer of er stopschroeven op de armleuningen zijn aangebracht en of er stoplagers in de bevestiging van de rugleuning zitten. Dit voorkomt dat ze losraken bij het afstellen van de rugleuning in de eindpositie.
- Onder geen enkele omstandigheid mag de gebruiker in de stoel zitten terwijl deze wordt onderhouden, behalve wanneer armleuningen en beensteunen worden vervangen en er maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet uit de stoel valt.

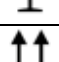

Stoelen met verstelbare kanteling van de zitting moeten in de vaste stand staan en de rem moet worden aangetrokken wanneer de gebruiker in of uit de stoel stapt.

SYMBOOLTOETS

	Waarschuwing		Lees gebruiksaanwijzing
	Waarschuwing, gevaar voor beknelling		Kanteling zitting
	Niet strijken		Verstelbare achterwaartse kanteling
	Gebruik geen oplosmiddelen voor chemisch reinigen die sterker zijn dan tetrachloorethyleen		Hoogte achterkant
	Geen bleekmiddel gebruiken		Zitdiepte
	Niet in de droger		Hoogte armleuning
	Machinewas 60°		Bedieningsknop, elektrische functie
	Beschermen tegen vloeistof		Oplaadpoort
	Zorgvuldig behandelen		Invoercontrole
	Deze kant omhoog		Veilige werklast
	Toegestane temperatuur		Toegepast onderdeeltype B
	Toegestane relatieve vochtigheid		
	Toegestane hoogte boven zeeniveau		
	Fabricagedatum		
	Fabrikant		
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis		
	Maximaal gebruikersgewicht		
	Serienummer		
	CE-markering toont naleving van de Europese regelgeving		
	Elektrische componenten moeten worden verzonden voor speciale recycling		
	Het product maakt deel uit van een recyclingsysteem		
	Het gewicht van het onderdeel overschrijdt 10kg		
	Operatiecyclus		

WAARSCHUWING



Een product dat verminderde of veranderde prestaties vertoont, moet onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Neem onmiddellijk contact op met de serviceorganisatie (Technisch Hulpcentrum) of Eurovema AB. Het product mag niet opnieuw worden gebruikt totdat het is geïnspecteerd door een bevoegde technicus.



Het product mag niet worden belast boven het aangegeven maximale gebruikersgewicht, omdat hierdoor onderdelen beschadigd kunnen raken, wat tot ongelukken kan leiden.



Controleer of de parkeerrem is geactiveerd bij het in of uit de stoel stappen. Als dit niet het geval is, bestaat het risico dat het product onbedoeld gaat rollen, waardoor u kunt vallen.



Wijzigingen aan het product mogen alleen worden aangebracht door een bevoegde technicus in overleg met de voorschrijver. Mocht een aanpassing op maat nodig zijn, neem dan contact op met een Technisch Hulpcentrum of Eurovema Mobility AB voor advies. Door wijzigingen aan het product vervalt de CE-markering en aanvaardt Eurovema geen enkele aansprakelijkheid meer. Door wijzigingen uitgevoerd door een bevoegde technicus in overleg met Eurovema kan de CE-markering geldig blijven.



Reparaties en technisch onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat is geautoriseerd door Eurovema Mobility AB, zodat de CE-markering geldig blijft.



Het product is bedoeld voor gebruik door de persoon en voor het doel waarvoor het is voorgeschreven. Het product is voor deze persoon geconfigureerd en de instellingen ervan mogen door niemand anders worden gewijzigd dan de persoon die het product heeft voorgeschreven. Als het product moet worden overgedragen aan een andere gebruiker, moet de stoel een nieuwe test ondergaan.



In bepaalde omstandigheden kan een product met een elektrische stoellift de stoel verhogen tot een hoogte die ertoe leidt dat de gebruiker de vloer niet met de voeten kan bereiken, waardoor het risico op een val ontstaat als de gebruiker probeert uit de stoel te komen vanuit deze positie.



De componenten en onderdelen van het product moeten worden gemonteerd in overeenstemming met de montage-instructies om ervoor te zorgen dat ze stevig vastzitten en niet losraken. Alle kabels moeten worden vastgezet met kabelbinders.



Om de geldigheid van de CE-markering te behouden, mag het product niet worden uitgerust met andere componenten of accessoires dan die zijn goedgekeurd door Eurovema Mobility AB.



Alleen elektrische componenten die specifiek bedoeld zijn voor gebruik met het product mogen op het besturingssysteem van het product worden aangesloten. Componenten moeten door een bevoegde technicus op het besturingssysteem worden aangesloten.



Om de geldigheid van de CE-markering te behouden en om naleving van de garantievoorwaarden te garanderen, mogen alleen opladers en batterijen worden gebruikt die specifiek voor het product zijn ontworpen en geleverd door Eurovema Mobility AB.



Een product met elektrische functies kan interferentie ondervinden van mobiele telefoons of andere RF-communicatieapparatuur.



De metalen oppervlakken van het product kunnen heet worden als ze worden blootgesteld aan direct zonlicht en u kunt brandwonden oplopen als uw huid ermee in contact komt. Stel het product niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.



Het product bevat veel kleine onderdelen en schroeven die, als ze loskomen, verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kinderen en huisdieren.



In bepaalde configuraties is het product uitgerust met kabels en draden die om functionele redenen niet volledig kunnen worden vastgezet en als gevolg daarvan een gevaar voor wurging voor kleine kinderen kunnen vormen.



Het gebruik van elektrische functies brengt gevaar voor beknelling voor kinderen en huisdieren met zich mee. Zorg er altijd voor dat niemand anders dan de gebruiker zich in de directe omgeving van het product bevindt wanneer elektrische functies worden gebruikt.



Bij producten met een elektrische rem is het belangrijk dat de batterij niet volledig leeg raakt, omdat de rem hierdoor niet meer werkt. In dergelijke situaties, en als de rem nog niet is ingeschakeld, kan de stoel gaan rollen als u gaat zitten of opstaan, met het risico op vallen tot gevolg.

RAPPORTAGE VAN ONGEVALLLEN EN INCIDENTEN

In de EU gevestigde fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn verplicht systematisch bij te houden hoe hun producten in de praktijk werken.

De toekenning van een CE-markering toont aan dat het product een reeks risicoanalyses en tests heeft ondergaan, waarbij maatregelen zijn genomen om de geïdentificeerde risico's zoveel mogelijk te minimaliseren. Als er ondanks alles toch ongevallen of incidenten plaatsvinden, moeten dergelijke gebeurtenissen worden gemeld aan Eurovema Mobility AB en de relevante nationale autoriteit.

REINIGING

De oppervlakken van werkstoelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek in combinatie met een mild reinigingsmiddel, bijv. afwasmiddel. Plaats de stoel op een stabiele ondergrond en activeer de rem. De stoelbekleding kan worden gereinigd met in de handel verkrijgbare bekledingsreinigers. Losse hoezen kunnen in de machine gewassen worden op 60°.



NB Het reinigen dient te gebeuren in een goed geventileerde ruimte en niet in de aanwezigheid van open vuur.


OPSLAG

De werkstoel moet in een droge omgeving bij kamertemperatuur worden opgeslagen. Houd de stoel uit de buurt van hoge temperaturen, intense kou en sterk zonlicht. Metalen oppervlakken kunnen zeer heet worden als ze worden blootgesteld aan zonlicht. In geval van hevige kou de stoel voor gebruik op kamertemperatuur laten komen. Stel de stoel bovendien niet bloot aan water, andere vloeistoffen of chemicaliën.

LABEL


Het etiket op het product bevat belangrijke informatie.

- 1) Productnaam
- 2) Artikelnummer
- 3) Serienummer UDI-PI
- 4) Barcode
- 5) Max gebruikersgewicht
- 6) Medisch apparaat
- 7) CE-markering
- 8) Lees de handleiding voor gebruik
- 9) Fabricagedatum
- 10) Naam van de fabrikant

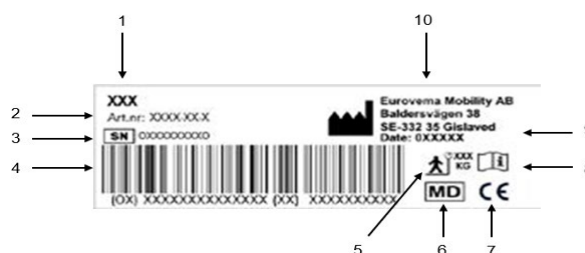

SECUNDAIR LABEL

- 1) Toegepast onderdeeltype B
- 2) Intermittierende functie 2 / 18 min
- 3) Toegestane kamertemperatuur
- 4) Toegestane relatieve vochtigheid
- 5) Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
- 6) Toegestane hoogte boven zeeniveau
- 7) Veilige werklust

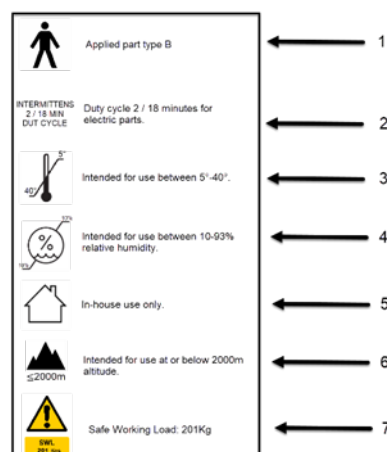

CE-MARKERING

Het product is CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Medical Devices Regulation (MDR 2017/745) van het Europees Parlement. De CE-markering staat op het label. Het product voldoet aan de eisen van de norm.

EN1335-2:2018 Kantoormeubelen. Kantoorstoelen - Veiligheidseisen

EN 60601-1:2006 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties.

60601-1-2:2014 Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit.

SS-EN 1021-2:2014 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen - Deel 2: Ontstekingsbron: Equivalent van de lucifervlam.

SS-EN 1021-1:2014 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen - Deel 1: Ontstekingsbron: Smeulende sigaret.

SS-EN ISO 21856:2022 Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden (ISO21856-2022)

SS-EN ISO 14971:2020 Risicomanagement voor medische hulpmiddelen.

OVERZICHT - MARKERING

Losse hoezen kunnen in de machine gewassen worden.



Verbrijzelingsrisico's worden gerapporteerd bij instructies voor elke functie waarbij een beknellingsrisico kan ontstaan. Op de stoel zijn markeringen aangebracht waar er gevaar voor beknelling bestaat.

OVERZICHT - ZITEENHEID


- 1) Zitting
- 2) Rugleuning
- 3) ArMLEuning
- 4) Chassis
- 5) Zittinglift
- 6) Beensteun

Alternatieve zitsystemen en beensteunen zijn beschikbaar.



CHASSIS OVERZICHT

- 1) Voorwiel
- 2) Geremd wiel
- 3) Hendel parkeerrem
- 4) Voetrem
- 5) Chassis, Junior 52
- 6) Remstang

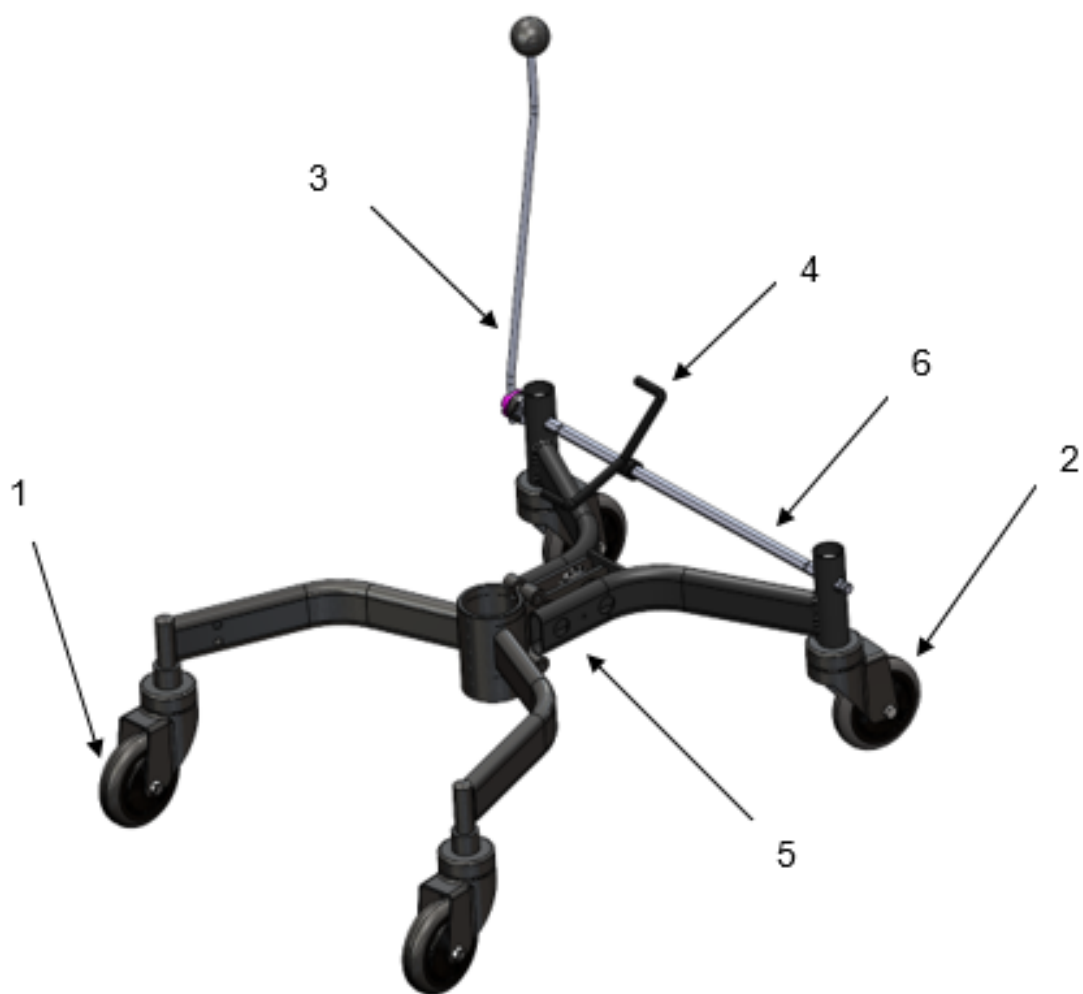


RUGLEUNING - HOOGTE

De rugleuning is in hoogte verstelbaar door middel van een schroef en een hendel.

- 1) Draai de hendel een halve slag los door hem linksom te draaien.
- 2) Stel gewenste hoogte in.
- 3) Vergrendel de achterkant door de hendel een ½ slag rechtsom te draaien.
- 4) Om de hoogte verder aan te passen, draait u de stelschroef een paar slagen los.
- 5) Stel gewenste hoogte in.
- 6) Stelschroef vergrendelen.


De stelschroef kan worden vervangen door een borgwiel.

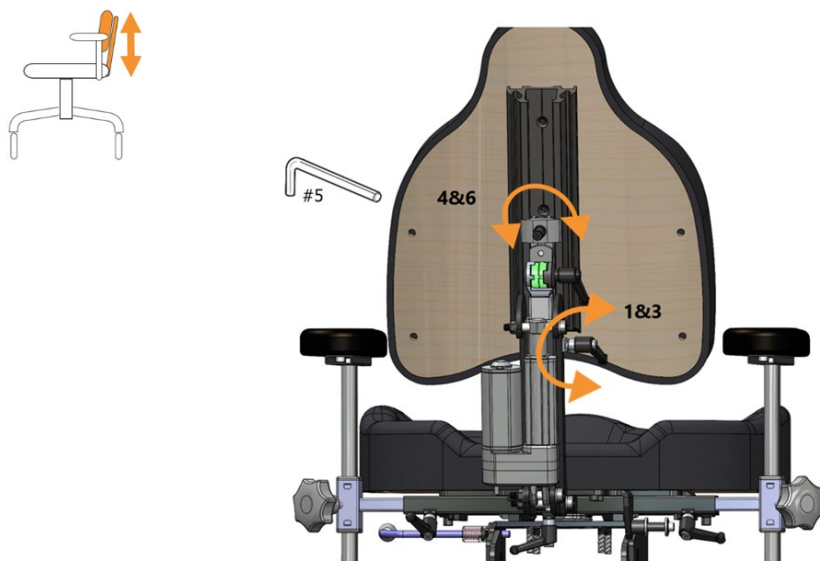

Zijsteun, LS rugleuning

De zijsteunen zijn horizontaal verstelbaar.

- 1) Draai de schroeven (1) enkele slagen los met een inbusleutel van 4 mm.
- 2) Aanpassen aan de gewenste breedte.
- 3) Draai de schroeven vast.

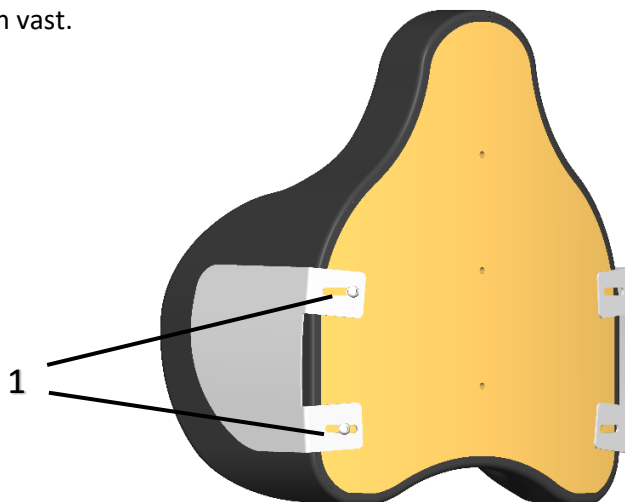

RUGLEUNING - HANDMATIG KANTELEN

De rugleuning en het rugkussen zijn individueel verstelbaar.

Verstelbare achterwaartse kanteling



- 1) Maak de veiligheidsschroef en hendel los om het gehele rugmechanisme naar achteren of naar voren te kantelen.
- 2) Stel de gewenste rugleuninghoek in.
- 3) Vergrendel veiligheidsschroef en hendel

Rugleuning kussen

- 4) Maak de hendel los door hem een ½ slag linksom te draaien.
- 5) Stel de gewenste hoek in op het kussen van de rugleuning.
- 6) Vergrendel de hendel door hem een ½ slag rechtsom te draaien.



Wees voorzichtig vanwege het risico op beknelling

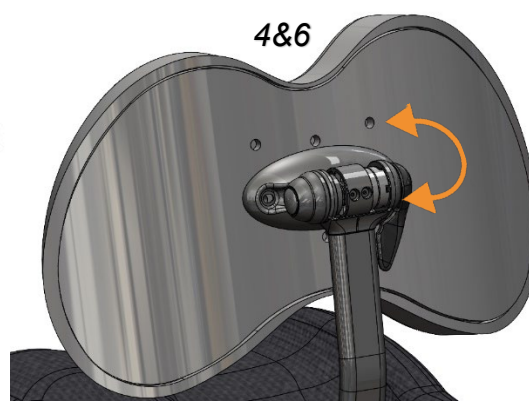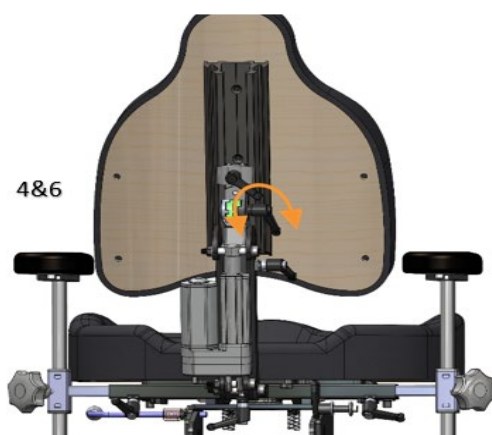


RUGKANTELING - ELEKTRONISCH

De kanteling van het rugleuningmechanisme is elektronisch verstelbaar.

- 1) Kantel achterover door de tuimelschakelaar naar boven te bewegen.
- 2) Kantel voorover door de tuimelschakelaar naar beneden te bewegen.



Verstel de rugkanteling niet in de directe omgeving van iemand anders, omdat er dan gevaar voor beknelling bestaat.

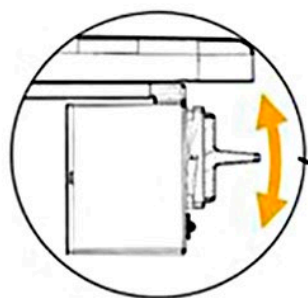

1&2



RUGLEUNING - ZITDIEPTE

Zitdiepte kan worden veresteld met behulp van de rugleuning. Stel de gewenste zitdiepte in door de rugleuning naar achteren of naar voren te schuiven. Het fijn afstellen van de zitdiepte kan ook via de rugkanteling.

- 1) Draai de borgschroef/knop onder de stoel aan de achterkant los.
- 2) Duw het rugmechanisme in of uit tot de gewenste zitdiepte.
- 3) Draai de borghendel/schroef vast.
- 4) Fijnafstelling met behulp van de rugkanteling, zie vorige paragraaf *Rugkanteling*



1&3

KANTELING ZITTING - HANDMATIG

De zithoek is op verschillende manieren verstelbaar. Handmatige kantelmechanismen zijn: Wentelstang (1) en krukkanteling (2).

1) De wentelstang wordt afgesteld met een ringsleutel van 17 mm.


2) De krukkanteling wordt aangepast door aan het wiel te draaien. Draai rechtsom om naar voren te kantelen. Draai linksom om naar achteren te kantelen.



Zorg ervoor dat niemand bekneld kan raken wanneer de zitting kantelt.



1

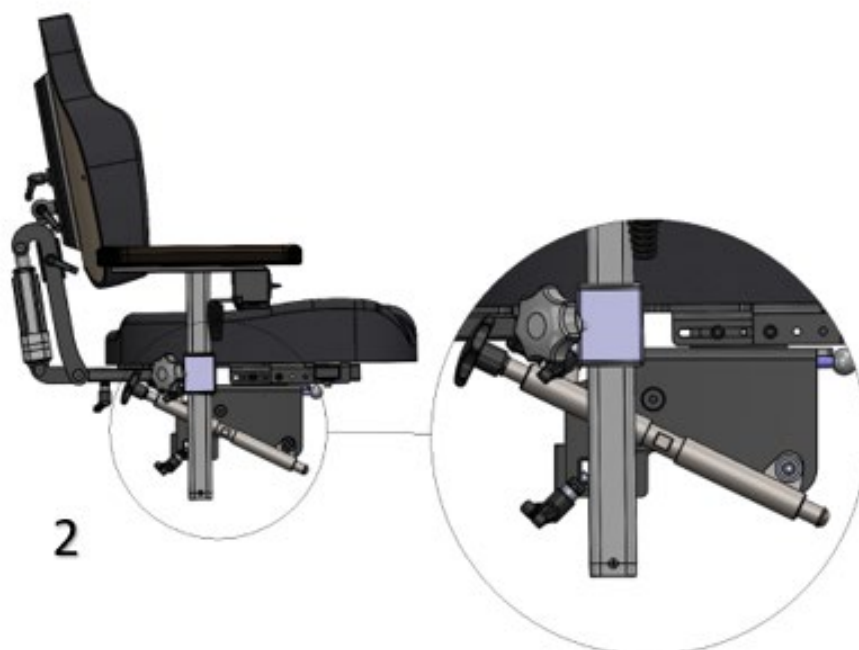

2


ZITHOOGTE - GAS EN ELEKTRISCH

3) De gasgestuurde kanteling van de zitting wordt geregeld met de bedieningsknop onder het armluningkussen. Om de zithoek aan te passen, drukt u de knop omhoog in de richting van het armluningkussen en laat u deze los zodra de gewenste hoek is bereikt. De bediening kan van rechts naar links worden bewogen.

4) De elektrische kanteling van de zitting wordt bediend met behulp van de tuimelschakelaar onder de armluning of met de handbediening. Zie het afzonderlijke hoofdstuk over handbediening voor meer details.



Zorg ervoor dat niemand bekneld kan raken wanneer de zitting kantelt.

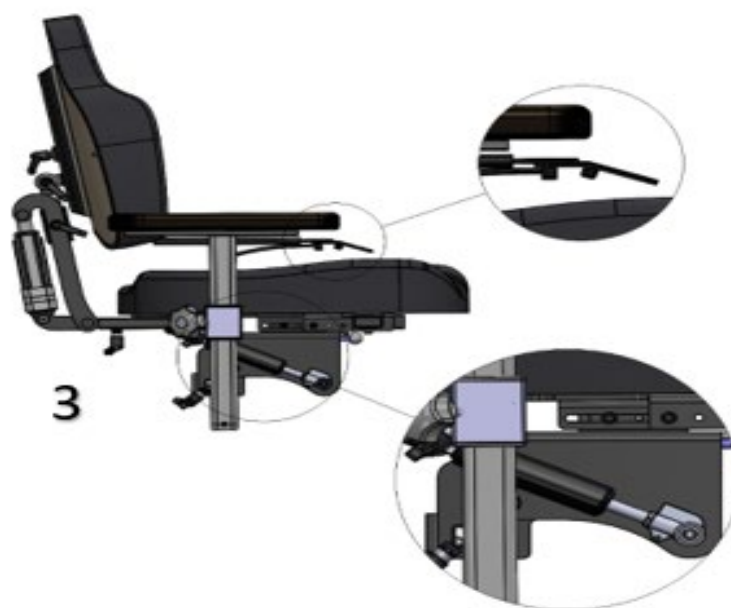

ARMLEUNING - VAST

- 1) Om de hoogte aan te passen, draait u het wiel **1)** een paar slagen linksom los en stelt u de gewenste hoogte in.
- 2) Draai het wiel rechtsom vast.
- 3) Om de breedte aan te passen, draait u de hendel **2)** een halve slag linksom los en stelt u de breedte af op de gewenste breedte.
- 4) Draai de hendel rechtsom vast.



ARMLEUNING - INTREKBAAR

De armleuning kan naar achteren worden geklapt door de veerbelaste hendel **1)** naar boven te trekken en tegelijkertijd de armleuning naar achteren te duwen.

1) De hoogte van de armleuning wordt aangepast door de hendel of de schroef **2)** een halve slag linksom los te draaien. Als de armleuning is voorzien van een schroef, gebruik dan inbussleutel nr. 5

2) Draai de hendel of schroef **2)** vast zodra de gewenste hoogte is bereikt.

3) Zie het vorige gedeelte voor aanpassing van de breedte.



Zorg ervoor dat niemand bekneld kan raken wanneer de armleuning omlaag wordt gezet.




ZITHOOGTE - HANDMATIG

- 1) Het verhogen en verlagen van de stoel gebeurt door de hendel (1) omlaag te bewegen. De stoel gaat omlaag met behulp van het lichaamsgewicht van de gebruiker. De hendel moet in de onderste stand worden gehouden.
- 2) Laat de hendel los zodra de gewenste zithoogte is bereikt.



Wees voorzichtig bij het neerlaten van de stoel zodat niets of niemand wordt verpletterd wanneer de stoel omhoog wordt gezet. Wanneer de stoel onder een tafel/bureau wordt geplaatst, bestaat het risico dat uw handen of benen worden geplet.

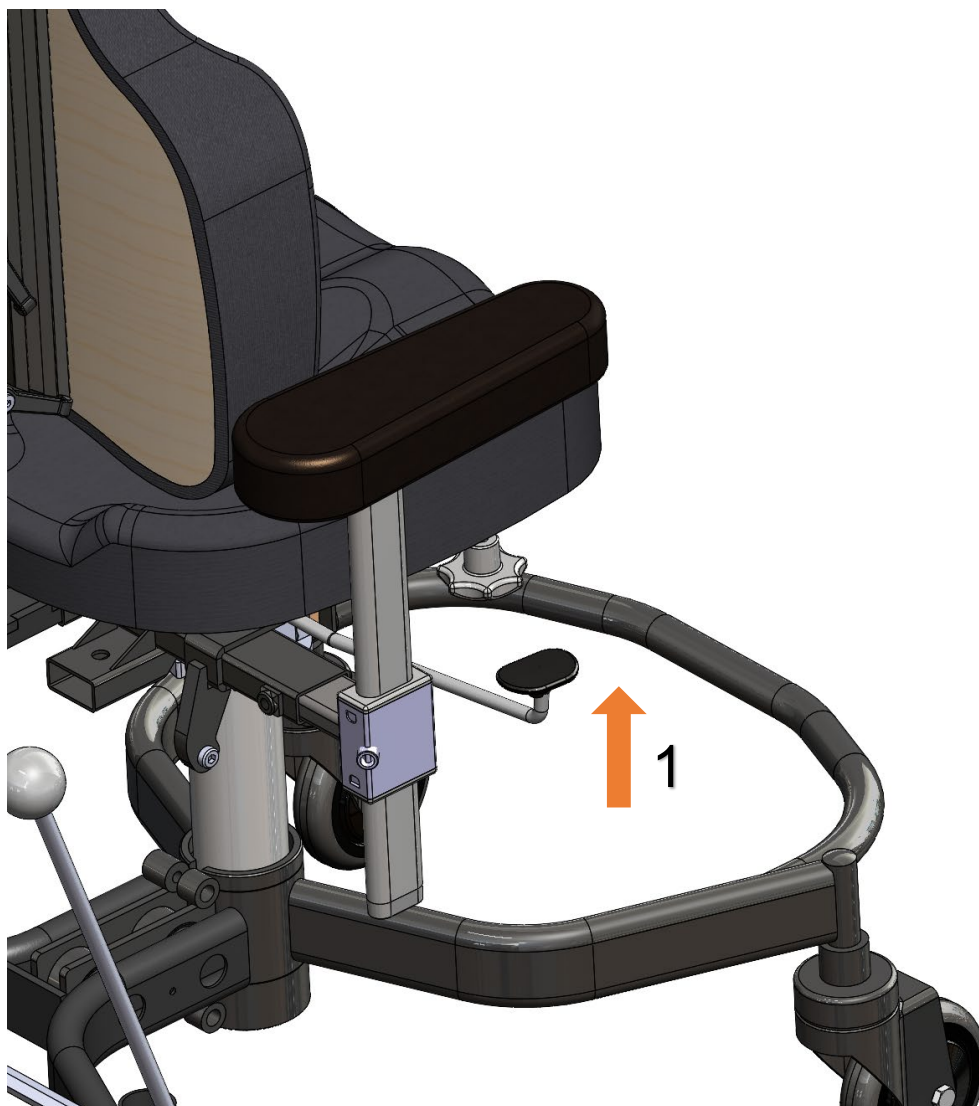

ZITHOOGTE - ELEKTRISCH

1) Om de stoel hoger of lager te zetten, beweegt u de tuimelschakelaar omhoog om de stoel hoger te zetten en omlaag om de stoel lager te zetten.
Handbedieningen zijn optioneel verkrijgbaar.




Wees voorzichtig bij het neerlaten van de zitting zodat niets of niemand wordt verpletterd wanneer de zitting omhoog wordt gezet. Wanneer de stoel onder een tafel/bureau wordt geplaatst, bestaat het risico dat uw handen of benen worden geplet.



STOEL ROTATIE

Stoel rotatie is als optie leverbaar. De zitting kan in beide richtingen 90° worden gedraaid, met een centraal punt van 45 graden. Gebruik de stoelrem. Beweeg de hendel omhoog terwijl u de stoel draait. Laat de hendel los zodra de gewenste positie is bereikt.

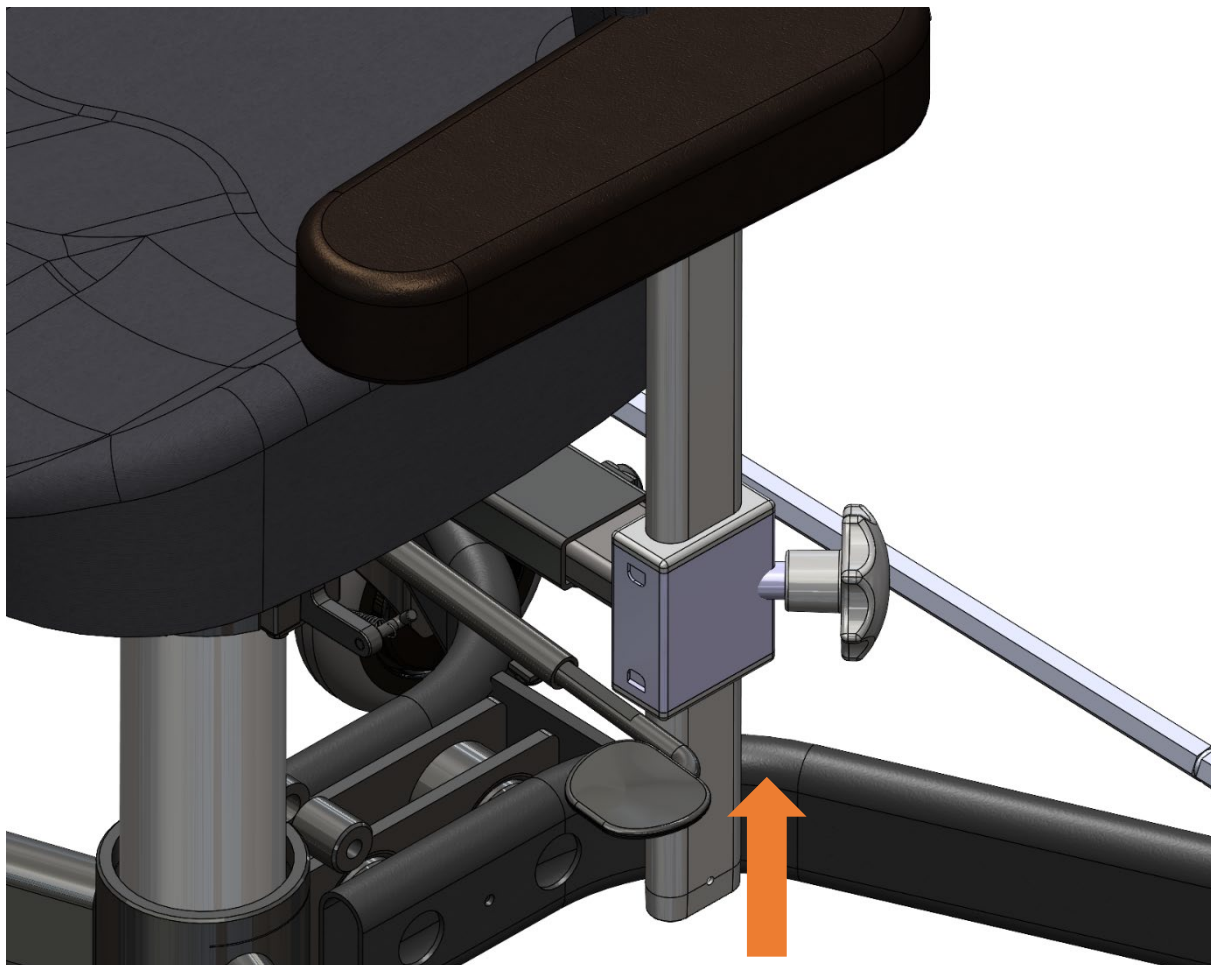

VOETPLAAT - HOOGTE

- 1) Draai de veiligheidsschroef (1) enkele slagen los met inbussleutel nr. 4.
- 2) Draai de schroef (2) een paar slagen los en stel deze in op de gewenste hoogte met inbussleutel nr. 5.
- 3) Draai de schroef (2) en de veiligheidsschroef (1) vast.



Ga niet op de voetplaat staan. De stoel zal naar voren kantelen.



BEENSTEUN, COMPLETE VOETPLAAT - KANTELING

- 1) Draai de schroef (1) enkele slagen los met inbusleutel nr. 5
- 2) Aanpassen aan de gewenste hoek.
- 3) Draai de schroef vast.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren




VOETPLAAT - KANTELING

De voetplaat is horizontaal verstelbaar. Om hem naar beneden te kantelen, draait u de schroef linksom met behulp van inbus sleutel nr. 4 totdat de gewenste hoek is bereikt. Om naar boven te kantelen, draait u de schroef rechtsom.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren

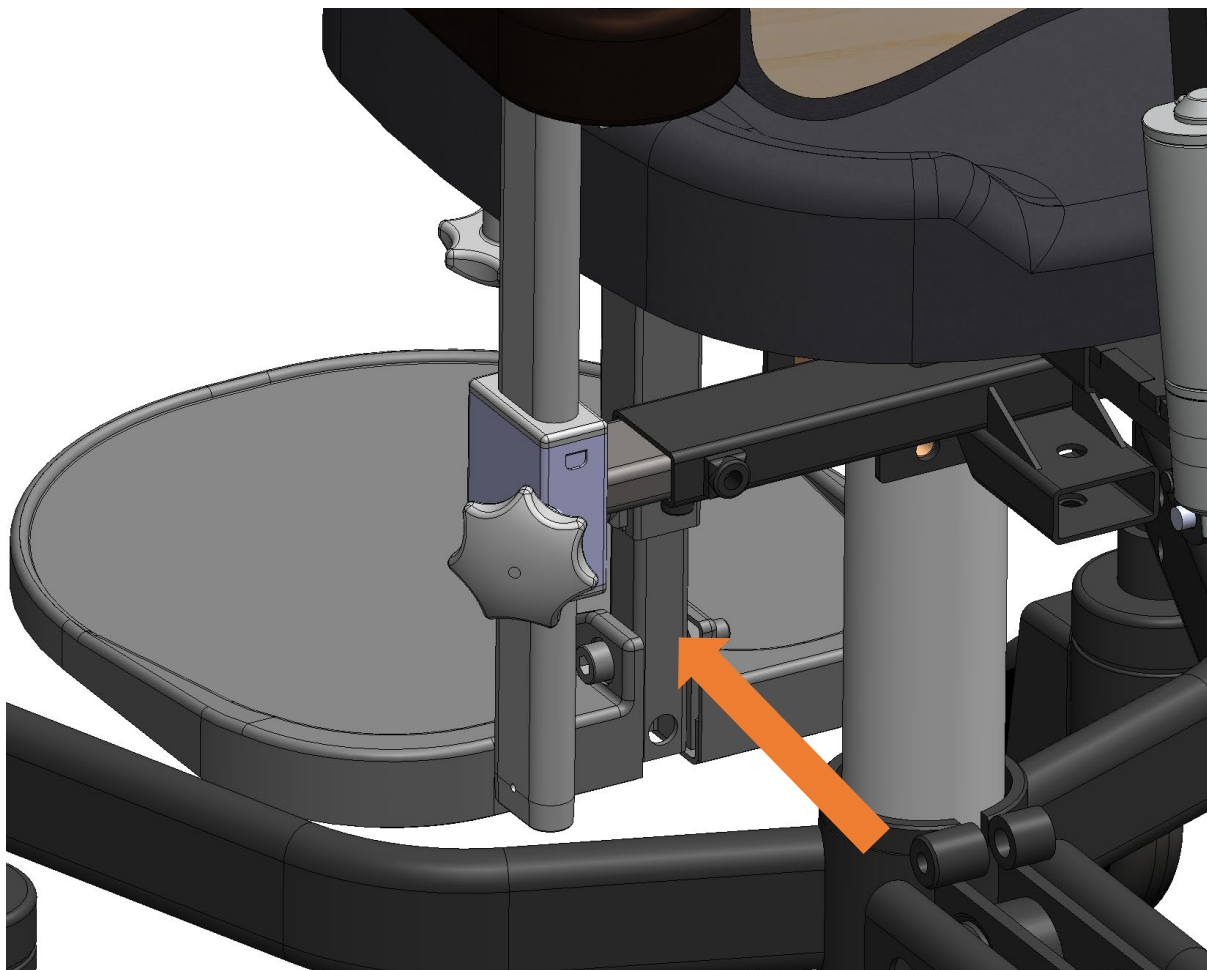

GEVORMDE VOETSTEUN - HOOGTE

- 1) Draai de schroef (1) volledig los en stel de voetplaat in op de gewenste hoogte met inbusleutel nr. 5.
- 2) Zodra de gewenste hoogte is bereikt, plaatst u de schroef terug en draait u deze vast.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren



GEVORMDE BEENSTEUNEN - KANTELING

De beensteunen zijn in hoek verstelbaar. Draai de schroef enkele slagen los met inbussleutel nr. 5. Stel de gewenste positie in en draai de schroef vast.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren



GEVORMDE VOETPLATEN - HOEK

De hoek van de voetplaat kan worden ingesteld op een positie die comfortabel is voor de gebruiker. Draai de schroef **(1)** met inbussleutel nr. 5 een paar slagen los en stel de hoek af. Draai de schroef vast zodra de gewenste hoek is bereikt.

De voetplaat kan omhoog worden gezet om het in- en uitstappen te vergemakkelijken, zie afbeelding 2.



Ga niet op de voetplaat staan, de stoel kantelt naar voren



VOETRING

De voetring kan naar achteren worden geklappt om het in- en uitstappen te vergemakkelijken.



Klap de voetring weg voordat u uit de stoel stapt, om de kans op vallen te verkleinen.



REMHENDEL EN VOETREM

Remhendel


Rem de stoel af door de remhendel naar voren te bewegen. Laat de rem los door de hendel naar achteren te bewegen.

Voetrem

Rem de stoel door het voorste deel van het pedaal in te trappen. Maak de rem los door het achterste deel van het pedaal in te trappen.



Trek altijd de rem aan voordat u in of uit de stoel stapt.

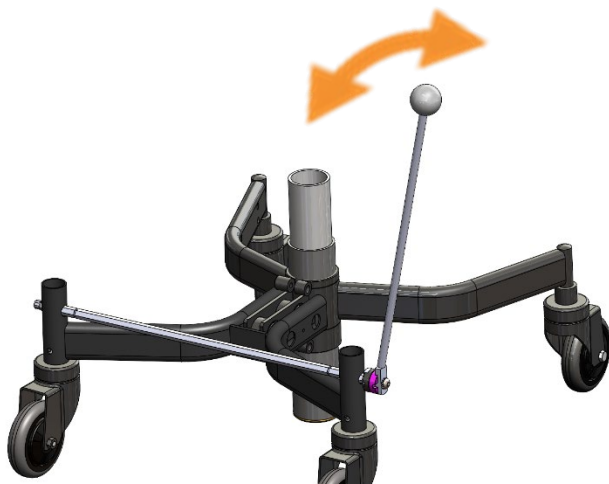


De remhendel is in hoek verstelbaar en kan van de ene naar de andere kant worden verplaatst,

Hoekverstelling.

Draai de schroef een paar slagen los om het versnellingsslot los te maken.
NB Draai de hendel niet helemaal los.

Stel de hoek van de hendel in op de gewenste positie en draai de schroef stevig vast.

Zorg ervoor dat de hendel stevig in de gewenste positie zit.

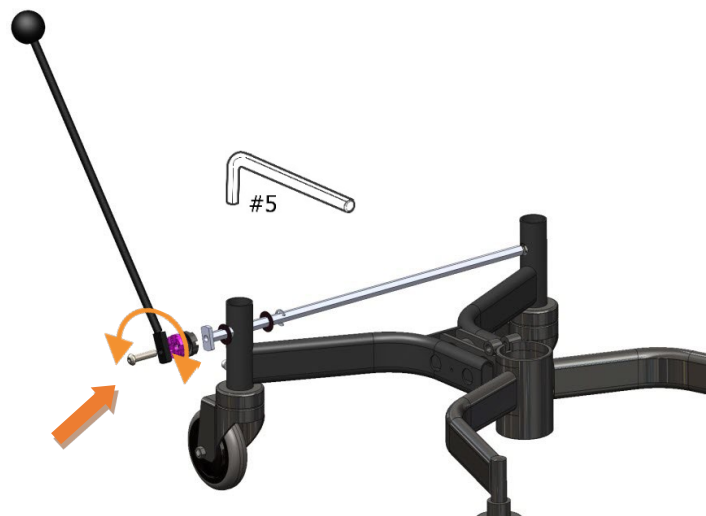

Verplaats de remhendel naar de andere kant.


Draai de borgring los (1)

Trek de remstang uit het chassis. Bewaar de plastic ring van de borgring om aan de andere kant te monteren.

Steek de remstang in vanaf de kant waar u de hendel wilt hebben. Plaats de plastic ring aan de binnenkant van het chassis en steek dan de remstang dwars door het chassis.

Breng vervolgens de borgring aan met behulp van de plastic ring. Normaal gesproken moet deze het dichtst bij het chassis worden geplaatst.

Pas de hoek van de hendel aan zoals hierboven beschreven.

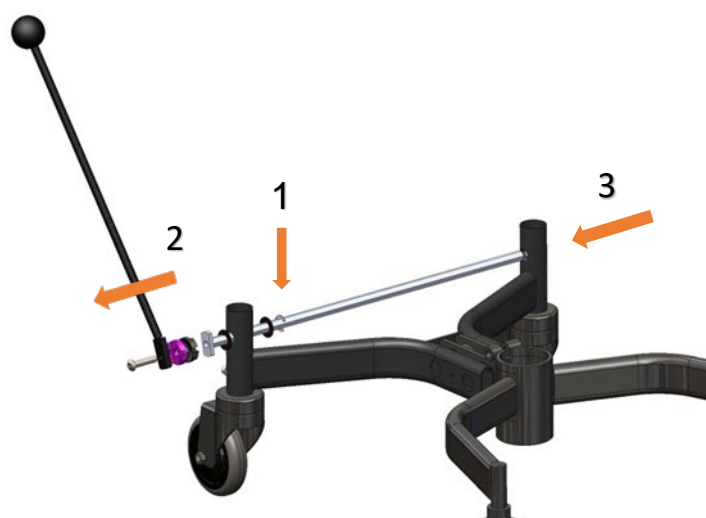

OPLADEN - ALGEMEEN

Om zo lang mogelijk volledige batterijprestaties te garanderen, is het belangrijk dat de batterij regelmatig wordt opgeladen. In een gemiddeld gebruiksscenario is het om de dag opladen van de batterij een goede richtlijn. Laad de batterij indien mogelijk overdag op. De stoelfuncties kunnen niet worden gebruikt terwijl de batterij wordt opgeladen. Als de stoel voor lange tijd moet worden gestald, moet de batterij eens in de 4 weken worden opgeladen om te voorkomen dat deze tot het kritieke niveau ontladend waarbij de oplader niet meer begint op te laden. Plaats de stoel tijdens het opladen zo dat de aangesloten kabel eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeld.




Laat de stoel niet gedurende langere tijd opladen. De maximaal toegestane tijd is 4 weken achter elkaar. Laat de oplaadkabel niet aangesloten op de oplaadpoort van de stoel nadat het opladen is voltooid.



Regelmatig opladen is vooral belangrijk bij stoelen met elektrische remmen, elektrische zitkanteling en elektrische rugleuningkanteling, zodat de gebruiker veilig in en uit de stoel kan stappen.

- 1) De stoel moet worden opgeladen als de LED (3) continu brandt terwijl geen van de functies van de stoel wordt gebruikt. Als de LED gaat branden wanneer een elektrische functie wordt gebruikt, is het tijd om de batterij op te laden.
- 2) Sluit de laadstekker (2) aan op de laadpoort van de stoel (1). De LED op de lader is groen.
- 3) Sluit de oplader aan op een stopcontact van 220 V. De LED op de oplader zal constant geel branden.
- 4) Zodra het opladen is voltooid, verandert de LED in een constant groen licht.
- 5) Koppel de oplader los van het stopcontact en vervolgens van de stoel.

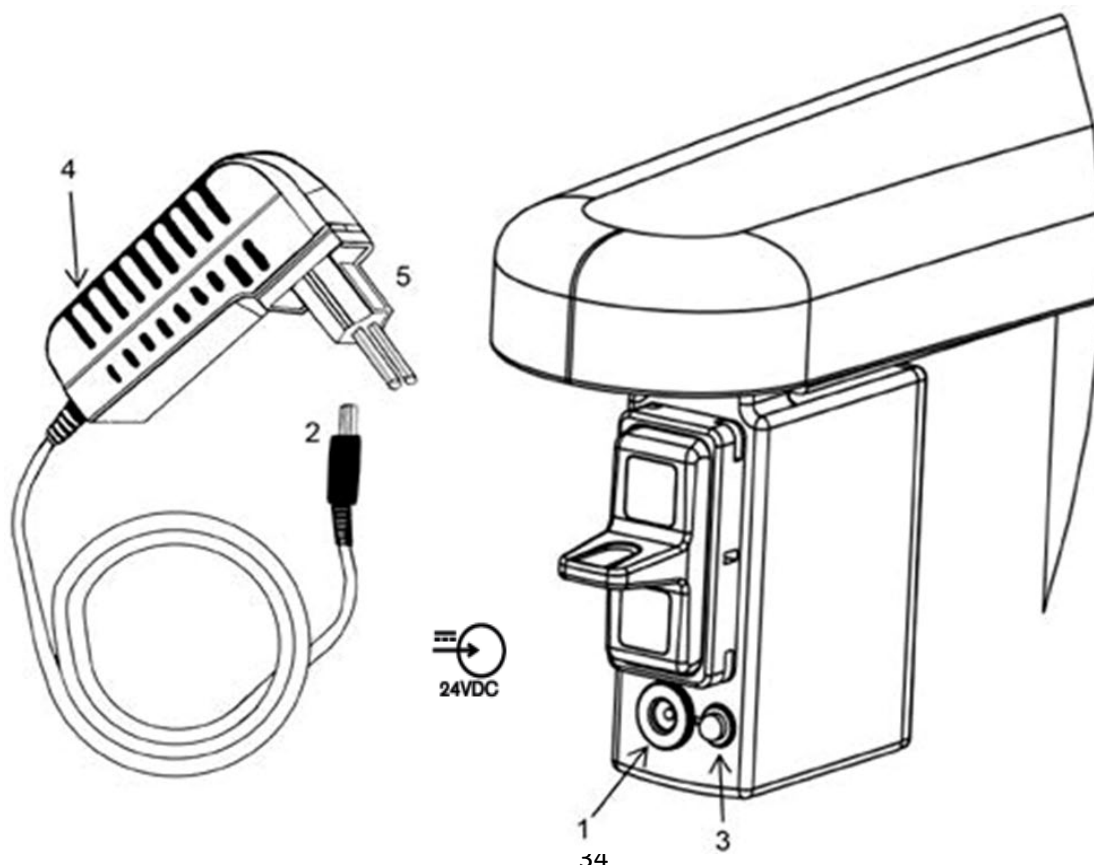

OPLADER-INDICATOREN

Opladen op maximale stroom



Top oplading, constante spanning, knippert geel



Opladen voltooid, onderhoudsopladen



Batterij niet aangesloten, knippert groen



Foutcodes

2 keer rood knipperen, batterij aangesloten maar verkeerde polariteit

3 keer rood knipperen, opladeruitgang kortgesloten

4 keer rood knipperen, accuspanning te laag

5 keer rood knipperen, oplaadtijd te lang

6 keer rood knipperen, beschadigde batterij

LED brandt niet, accuspanning te hoog



TECHNISCHE GEGEVENS - OPLADER

MASCOT 3743

Gegevens	Feiten
Ingangsspanning	100-240VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	Max 0,5A
Uitgangsstroom	0,56A
Uitgangsspanning	29,4V DC max
Bedrijfstemperatuur	-25 - +40°C
Beschermingsklasse	Klasse 2
Beschermende behuizing	IP 41

TECHNISCHE GEGEVENS - ELEKTRONICA

Gegevens	Feiten
Ingangsspanning	24V-40V
Max uitgangsstroom	14A
Normale bedrijfsspanning	21-28,5V
Maximale motorstroom per motor	3,5A
Standby-verbruik	200uA
Richtlijn	ROHS 2011/65/EC
Beschermingsklasse	Klasse 2
Beschermende behuizing	IP21
Werkcyclus	Intermitterend aan 2 min/uit 18 min

TECHNISCHE GEGEVENS - BATTERIJ

FGS20121A

Gegevens	Feiten
Batterij	2 x serieel aangesloten 12V 1,2Ah
Batterijtype	AGM
Maximale ontladstroom	18A in 5 seconden
Materiaal in behuizing	ABS UL94 HB
Materiaal in batterij box	Xantar FC19R UL94 V.0
Bedrijfstemperatuur, opladen	-15 to 40 °C
Bedrijfstemperatuur, ontladen	-15 to 50°C

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Om de batterij te vervangen moet de gehele batterij box vervangen worden. Zie installatie-instructies voor informatie over de procedure voor het vervangen van de batterij.



Reparaties en andere werkzaamheden aan de batterij mogen alleen worden uitgevoerd met toestemming van Eurovema. De batterij box bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden en mag niet worden geopend. Er mogen uitsluitend door Eurovema goedgekeurde batterijen worden gebruikt.

TECHNISCHE GEGEVENS - ZITTINGSYSTEEM

Gegevens	Feiten
Stoel (breedte x diepte)*	29x32, 32x36, 36x40,36x45, 40x40, 40x45 **32x36, 36x40, 40x40, 40x46
Stoelbreedte tussen armsteunen	27-52cm
Zitdiepte	32-45cm
Zithoogte, gas (hoogte tot onderkant zitting)*	37.5-47, 41-56, 48-68cm
Zithoogte, elektrisch (hoogte tot onderkant zitting)*	41-57, 45-70cm
Kanteling zitting elektrisch en gas	-20 tot 12°
Kanteling zitting kruk en wentelstang	-16 tot 20°
Rugleuning, hoogte verstelbaar*	37-54cm
Rugleuning (breedte x hoogte)*	30x37, 37x43cm *** 17x37, 24x43, 28x45 **28x20, 32x20, 32x35, 28x33, 32x42
Rugkanteling	30°
ArMLEuning hoogte, verstelbaar	0-26cm
ArMLEuningplaat, kind	25x8x3cm
Bekleding	Black Atlantic

*Varieert per model

**ABC zittin en rugleuning

***SitRite LS rugleuning

TECHNISCHE GEGEVENS - CHASSIS

Gegevens	Feiten
Chassis, breedte	52cm
Chassis lengte	55cm
Rem	Chassis gemonteerd
Diameter wiel	100mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Gegevens	Feiten
Klasse	Werkstoel - ISO 180903
Gewicht, elektrisch	35kg
Gewicht, gas	34kg
Gewicht gebruiker, max.	80kg
Batterij	24V 1,2Ah AGM
SWL	95kg

OMGEVING

Conditie	Temperatuur	Vochtigheid	Atmosferische druk
Normaal gebruik	5 °C - 40 °C	10% - 93% RV	50kPa – 106kpa
Opslag en transport	-5°C - 40 °C	10% - 93% RV	50kPa – 106kPa

VERNIETIGING

Producten die definitief buiten gebruik worden gesteld, moeten bij de bron worden gedemonteerd en gesorteerd. Montage- en demontage-instructies vindt u op de website onder het kopje *Montage-instructies*. Gedetailleerde diagrammen zijn ook te vinden op de website onder het kopje *Uitvergrootte diagrammen*. Ga in uw browser naar www.eurovema.se

Particulieren kunnen voor meer informatie contact opnemen met Eurovema. Eurovema zal de verantwoordelijkheid voor de vernietiging op zich nemen.

Gedemonteerde componenten moeten worden gesorteerd volgens **onderstaande tabel**.



Het demontageproces is niet zonder risico. Er bestaat een kans dat u verbrijzeling of brandwonden oploopt als u de procedure niet correct. Demontage moet worden uitgevoerd door een geautoriseerd technicus. P



Metaal	Elektronica	Brandbaar
Chassis	Besturingselektronica	Zittingen
Zitkruis	Aansluitdozen	Rugleuning
Rugleuning-mechanisme	Kabels	Kussens armleuning
Armsteunpalen	Handbediening	Afneembare bekledingshoezen
Voetsteun	Bediening tuimelschakelaar	Neksteunkussens
Hulpstukken op accessoires	Batterij box (batterijen moeten geïsoleerd zijn)	Rompsteunkussens
Stoellift, gas	Elektrische actuator	Andere vulmaterialen
Voetring	Hefkolom, elektrisch	

Batterijen

Afgedankte loodbatterijen moeten naar een recyclingcentrum worden gestuurd.

