

KAYE WALKER

ANVÄNDARMANUAL – ALLA STORLEKAR



INTRODUKTION

Kaye Walker har utformats för att göra det mindre energikrävande att gå, förbättra hållningen och maximera potentialen för att gå.

I denna instruktionsmanual ingår en guide för underhåll och allmän vård av Kaye Walker och om denna guide följs kommer Kaye Walker att underlätta användaren utan problem. Skulle det ändå förekomma att allvarliga försämringar uppträder i produktens funktion, ta den omedelbart ur bruk och kontakta RMS eller den som tillhandahåller utrustningen.

Dessa instruktioner ska förvaras i utrustningens omedelbara närhet. Skulle

de bli smutsiga eller oläsliga, eller om ytterligare exemplar behövs för cirkulation, kontakta RMS eller den som tillhandahåller utrustningen.

Läkare, terapeuter, föräldrar och vårdnadshavare måste själva bekanta sig med innehållet i denna instruktionsmanual. Man kan också rådfråga den som tillhandahåller utrustningen. Använd inte eller justera utrustningen om det råder någon osäkerhet om innehållet häri.

För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten finns ett antal olika sätt att justera den och de beskrivs detaljerat i de följande sidorna.

INNEHÅLL

Introduktion	1	Underhåll och inspektion	18
Avsedd användning	2	Rengöring och hygien	19
Försäkran om överensstämmelse ..	2	Ytterligare råd för säkerhet	19
Garanti och livscykel	3	Produktidentifiering	21
Säkerhetsinformation	4	Felsökning /	
Uppackning	5	Svar på vanliga frågor	22
Hopfällning och förvar	6		
Hjulalternativ	7		
Dimensioner	9		
Justeringar	10		
Tillbehör	11		



OBS!



Livscykel



Underhåll

AVSEDD ANVÄNDNING

Kaye Walker (hållningskontrollerande rullator) är avsedd att användas som en del av ett program för utveckling av gång och i de fall där det lämpar sig som ett hjälpmedel för personlig rörlighet i samhället.

Rullatorns design och funktion främjar tillsatser till höfter och lår för att utveckla spänst i musklerna och den balans som behövs för gång.

Kaye Walker har utvecklats i 6 storlekar plus en kraftigare version av W4-modellen för mer påfrestande användningar. Detta tillsammans med en mängd olika alternativa tillsatser är avsett att tillgodose individuella användares behov.

Denna utrustning skall endast ges ut eller monteras av klinisk personal som förstår det kliniska sammanhanget i vilket produkten är avsedd att användas.

Denna manual innehåller viktig information om förfarandet för montering, vilket måste höras innan utrustningen tillåts för användning, och manualen skall läsas till fullo av de som är ansvariga för användarens vård.

Produkten är konstruerad för att användas inom de begränsningar av vikt och mått som anges i tabellen på sidan 9, och om dessa begränsningar överskrids kan det leda till instabilitet i utrustningen.

Utrustningens design och funktion är under konstant översyn och mindre skillnader från denna manuals beskrivning och diagram kan förekomma.

En nivå av övervakning som lämpar sig för användarens förmågor skall alltid förekomma.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Rehabilitation Manufacturing Services Limited, som tillverkare med ensamt ansvar, försäkrar att Kaye Walker från RMS, överensstämmer med de krav som ställs av Europeiska rådets direkt 93/42/EEG och SS EN12182:1999 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar – Allmänna krav och provningsmetoder.


Denna produkt är registrerad som en medicinteknisk enhet av klass 1.


Rehabilitation Manufacturing Services Limited är ett registrerat bolag enligt BS EN ISO 9001:2005 tillämpligt för: Design, tillverkning och personlig anpassning av utrustning för terapi, mobilitet och rehabilitering av personer med speciella behov.





GARANTI

Tillverkarens garanti är endast giltig när utrustningen används under och i enlighet med de förhållanden som specificeras i denna manual.

 Garantin täcker inte skador från olyckor, inte heller när dessa skador orsakas av felaktig användning eller försummelse att underhålla rullatorn i enlighet med de instruktioner som ges i denna manual.

 Garantin omfattar inte kortlivade delar som även under normalt slitage behöver bytas regelbundet, till exempel hjul, länkhjul, hylsor och handgrepp.

 Garantin ogiltigförklaras om delar/tillbehör som inte är RMS-original används, eller om produkten repareras eller modifieras av obehöriga.

 RMS förbehåller sig rätten att inspektera produkten och relevant dokumentation när garantin återopas, innan några utfästelser görs gällande garantin och innan beslut fattas om huruvida den defekta produkten skall repareras eller bytas ut.

LIVSCYKEL


RMS har angett livscykler för var och en av sina produkter, baserat på sannolikheten att en ny produkt behöver utfärdas, och att rullatorer för småbarn (till exempel storlekar såsom W1/2 och W1) bibehåller sin funktionalitet längre då användarnas vikter är mycket lägre än för de som använder någon av de större storlekarna (W3 eller W4).

STORLEK	GARANTI	LIVSCYKEL
W1/2-RAM	2 år	7 år
W1-RAM	2 år	5 år
W2-RAM	2 år	5 år
W3-RAM	2 år	5 år


STORLEK	GARANTI	LIVSCYKEL
W4L-RAM	1 år	3 år
W4H-RAM	1 år	3 år
W5-RAM	1 år	3 år
ALLA HJUL	1 år	1 år

RMS rekommenderar att rullatorer som tilldelats större barn med ataxi eller utmanande beteende måste behandlas som att de har livstid för en enda användare och kasseras efter användning då det inte är lätt att bedöma skador från oregelbundna påfrestningar på utrustningen i dessa fall. Rullatorer där man har kunskap om att de använts för aktiviteter som ligger utanför de parametrar som rullatorn är avsedd för skall också kasseras efter användning.


SÄKERHETSINFORMATION


 Använd inte produkten över steg eller i trappor. Rullatorn kan användas i svaga sluttningar, men hänsyn skall då tas till användarens förmåga och nivån av övervakning.


RMS rekommenderar att riskbedömning utförs av terapeuten och/eller vårdnadshavare för att bedöma lämpligheten på tilltänkta vägar och terräng innan en övervakad användare tillåts använda rullatorn ute i samhället (t.ex. utanför gymnasikhall).

 Använd inte på oregelbunden mark. Om Kaye Walker används utomhus i våt väderlek, torka av all smuts och torka ramen omedelbart efter användning. Det finns tillbehör speciellt konstruerade för gång utomhus.


Se "aktivitetshjul" på sidan 8.

 Var varsam när rullatorn används omkring lägre möbler då utbuktningar i extrema undantagsfall kan trycka in benens fästhållare och orsaka att ett ben/hjul faller av inuti ramen.

 Förvara inte produkten där den blockerar dörrar, gångvägar eller nödutgångar.

 Produkten har testats och kontrollerats av RMS personal. Justeringar eller modifieringar som inte behandlas i denna manual skall inte utföras utan givet tillstånd från RMS då sådana modifieringar inverkar på produktens garanti, och än viktigare, kan äventyra användarens säkerhet.

RMS påtar sig inget ansvar för produkter som modifierats, anpassats eller blivit föremål för åtgärder som inte beskrivs i dessa instruktioner då detta görs av individer som inte auktoriserats av RMS.

 Låt inte användaren använda rullatorns bakre rör som ett säte eller för att vila sig mot då detta orsakar otillbörliga påfrestningar som ramen inte är konstruerad för. Användare kan avstyras från att sitta på rören genom montering av en sitthindrande bygel.

Se "sitthindrande bygel" på sidan 1.

Ytterligare uppgifter om produktens säkerhet, underhåll och rengöring hittas på sidorna 18–20.

UPPACKNING

Detta avsnitt beskriver förfarandet som krävs för justering och uppackning och första montering av produkten.

Ta varsamt bort innehållet från förpackningen då produkten mottagits. Var varsam så att innehållet inte repas eller rispas då skyddande kartong och bubbelplast tas bort.



Låt inte små barn eller spädbarn vara närvarande då plastpåsar och bubbelplast tas bort då dessa kan ge upphov till kvävning.



Se till att alla delar har avlägsnats från förpackningen innan denna kasseras.


Om möjligt, lägg samman förpackningen och förvara den under en kortare tidsrymd (två veckor) för att underlätta retursändning av produkten om den skulle visa sig vara felaktigt förskriven eller på annat sätt är olämplig. Betalning av avgifter kan komma att krävas för felaktigt beställd utrustning.

RETURER

Leverantören av utrustningen har sina egna förfaranden för retur, så det är viktigt att leverantören kontaktas innan produkten returneras.



Vid misstanke om att någon del eller något tillbehör saknas, kontakta den lokala leverantören av utrustningen eller RMS så snart som möjligt.

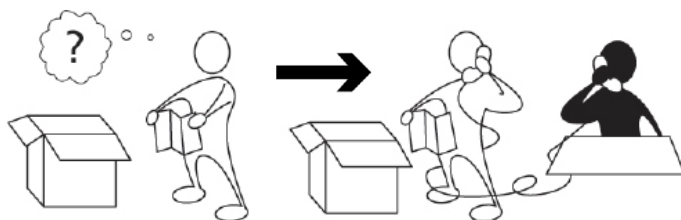



Vid eventuella frågor om montering av produkten, var god kontakta 01795 477280 och välj "teknisk support" eller kontakta den lokala serviceleverantören.

HOPFÄLLNING OCH FÖRVAR

UTVECKLANDE AV RULLATORN

För att veckla ut rullatorn, lägg den på sidan så att den liknar ett "C" på golvet. Håll i leden framför handgreppet och änden av det bakre benets rör och dra isär dessa punkter så kommer rullatorn att börja öppna sig.


Dra isär dessa punkter till dess att fästpinnarna i teleskoprören i fram- och bakben klickar på plats i hålen i den yttre teleskopdelen. Om rullatorn visar sig svår att veckla ut, tvinga inte ut ramen.

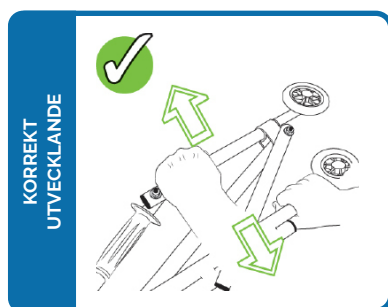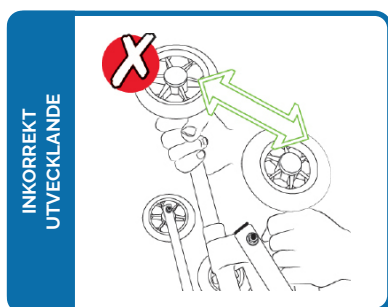

HOPFÄLLNING AV RULLATORN

För att fälla ihop Kaye Walker, sitt på huk bakom rullatorn och låt de bakre hjulen vila mot golvet. Tryck samtidigt in teleskoprörens fästhållare på vardera sidan av ramen. När fästhållarna frigjorts, tryck på de främre benen och fäll ihop ramen.

Om rullatorn behöver fällas ihop för transport kan det vara önskvärt att minska på benens höjd och göra rullatorn mer kompakt. Anteckna hålets position innan detta görs.

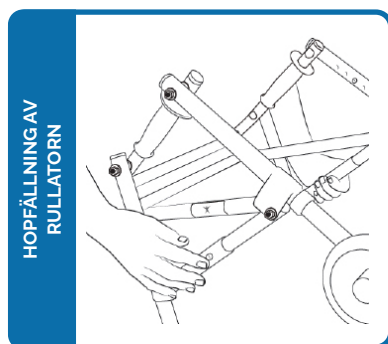

Varsamhet skall iakttagas under användning, transport och förvaring så att produkten inte tappas eller utsätts för stötar. Förvara inte annan utrustning ovanpå produkten eller dess tillbehör.

HJULALTERNATIV

Benen reglerar rullatorns stabilitet och gång. Benen kommer alltid i par och skall alltid hänvisas till som de på vänster och höger hand när rullatorn används, dvs. då man står i rullatorn med korsstagen bakom sig. Vänster hands aluminiumben har en gul etikett fäst vid sig. Benen passar in benrören och hålls på plats med fjäderhållarna monterade i benen.

Rullatorerna W4L och W4H:



W4L är för lättare användning av ungdomar och vuxna och har aluminiumben. W4H är för tyngre tjänst och har stålben och förstärkta leder för ytterligare styrka. Se tabellen på sidan 9 för storlek på rullator och viktgränser.

BAKRE STANDARDHJUL (W#OR)

Dessa hjul är räfflade och ett tyst enväglager inbyggt i hjulets nav för att förhindra att det rullar baklänges.

De kan användas inomhus och utomhus på ytor som asfalt och betong, även om regelbunden användning på dessa ytor orsakar att räfflingen slits fortare jämfört med användning enbart inomhus.

Dessa hjul kräver mer noggrann vård efter användning i våt väderlek och kan behöva smörjas från tid till annan. Kaye bakre hjul förhindrar baklänges rullning.

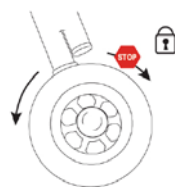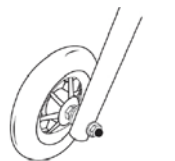

BAKRE BEN MED GUMMIHYLSOR (W#L)



Dessa passar enbart för användning inomhus och får inte användas tillsammans med riktningsslåsta främre svänghjul.

De är det grundläggande alternativet för dem med tillräcklig kontroll för att kunna plocka upp eller lätt dra rullatorn för att ändra riktning. De är monterade så att vecket i botten på benet pekar nedåt och håller hylsan jämnt mot golvet.




Inte tillgänglig på rullator av typ W4H. Hjuldämpare kan användas som alternativ.

HJULALTERNATIV

FIXERADE FRONTHJUL (W#OF)

Hjulen har en slät hård slityta utan räffling, och är ideala för "glidstyrning" av rullatorn när användaren inte kan använda svängbara hjul.

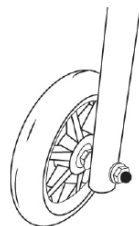


FRÄMRE SVÄNGHJUL MED LÅSBAR RIKTNING (W#DLS)

Dessa har två användningar:

1) Svänghjulens riktning kan låsas i klinik under bedömning, eller då rullatorn används av flera användare, så att de rullar i rullatorns riktning och betar sig som standardmässiga framhjul. Låsen kan snabbt tas bort för "sambhällsgångare".

2) Enskilda användare som vill ha manövrerbarhet inomhus men som vill ha låst hjulriktning när de går större avstånd.

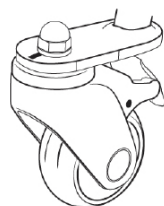

AKTIVITETSHJUL (STORLEKAR W1-W5)

Kaye Walkers framgångar i gymnastikanläggningar har resulterat i en mer utbredd användning av rullatorn utomhus och på ytor som gräs och grusgångar.

De är utrustade med ett par överdimensionerade framhjul och ett slags "växel"-system för bromsning av de bakre hjulen. De bakre hjulen kan därför lättare rengöras från smuts.

De främre aktivitetshjulen är 6 tum i diameter och konstruerade för att rulla över stenflis och trösklar utan att störas.

Trots sin höjd rekommenderas det att man torkar och smörjer de främre

hjulen med WD40 (eller liknande) om de blir våta på navets nivå.

De bakre aktivitetshjulen har en liknande diameter för att bibehålla rullatorns stabilitet och minska på svajet.



Kaye aktivitetshjul är inte en inbjudan till att använda Kaye Walker för extrema sporter, de är dock konstruerade för att minska på obehaget och ansträngningen som krävs för att gå över grova ytor.



DIMENSIONER

För att fastställa korrekt storlek på produkten, mät från golvet till vecket i användarens handflata när armarna är placerade längs sidan. Ta höjd för några graders flexion (eller böjning) vid armbågen. Mätvärdena kan sedan jämföras med intervallen i tabellen. Det är viktigt att ha marginal för tillväxt.


Alla dimensioner är baserade på rullatorer med fyra hjul. Ramens vikt är beräknad baserad på ramen med hjul men utan tillbehör. Aktivitetshjul påverkar justeringsintervallet på rullatorerna.

Storlekar är beräknade i centimeter (cm), vikt i kilogram (kg).

STORLEK	STANDARDHJUL	AKTIVITETSHJUL	HANDGREPPETS VIDD	RAMENS VIDD	RAMENS LÅNGD	ANVÄNDARENS LÅNGD	MAX VIKT PÅANVÄNDARE	RAMENS VIKT
W1/2	37-46	N/A	34	58-60	52-59	upp till 95	27 kg	3,00 kg
W1	41-55	45-59	34	60-62	56-62	91-122	27 kg	3,00 kg
W2	48-64	52-68	34	58-60	69-83	107-137	39 kg	3,85 kg
W3	59-78	63-82	38	62-64	77-89	129-152	60 kg	4,85 kg
W4L	72-92	76-96	40	65-67	84-97	150-179	82 kg	5,50 kg
W4H	81-100	N/A	40	67-69	90-102	150-185	95 kg	7,00 kg
W5	90-105	94-109	47	65-67	102-108	175-192	113 kg	9,75 kg



Figur 1 > Det finns två olika storlekar på hjul, så vissa mått är specifika per hjultyp.

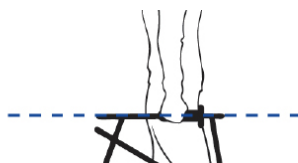

Figur 2 > visar händerna på samma höjd som höfterna (konsekvent för båda hjultyperna).

JUSTERINGAR

HÖJDJUSTERINGAR

Justering av höjden kontrolleras genom att man skjuter benen upp eller ned i ramens benrör. Rullatorns höjd justeras i steg om 25 mm (två fingerbredder). Mät vilken nödvändig justering som krävs. Rullatorer för tyngre tjänst kan ha två uppsättningar fästhållare i varje ben.

Rullatorerna har konstruerats så att användaren står med ryggen mot korsstagen och tittar ut över den öppna fronten. Alla referenser till rullatorns vänstra och högra sida är med hänseende till denna position. Rullatorn skall användas för att utveckla en standardmässig hållning och rörelseschema vid gång.

Detta inbegriper upprätt kropp och begränsad flexion (böjning) vid höfterna. Händernas och armarnas position är också en viktig faktor. Händerna skall

vara i samma höjd som höfterna med en lätt flexion (böjning) vid armbågarna. Det övre korsstaget är utformat för att driva på stegen, så att när användaren flyttar rullatorn framåt puffar korsstaget milt på skinkorna för att uppmuntra till nästa steg. Men detta i åtanke skall rullatorns höjd ställs in så att det övre korsstaget är placerat i höjd med mitten på användarens skinkor. Detta skall också ge korrekt höjd för handgreppen.

För att kontrollera detta, låt användaren stå i rullatorn med ryggen mot korsstagen och jämför höjden på korsstaget med mitten på användarens skinkor.



Se till att alla ben är justerade till samma höjd och att fästpinnarna fäster helt genom hålen i benrören före användning.

VIKTER OCH FÖRSTÄRKNINGAR

Vikter används ibland för att motverka och stabilisera tendenser från användaren att lyfta rullatorn. Montering av vikter bromsar inte rullatorns rörelser. Mängden vikt som kan monteras på rullatorn är begränsad (4 kg maximum)

Andra tillvägagångssätt, såsom användning av vertikala handgrepp kan förhindra lyftning av rullatorn. Att öka

rullatorns höjd är inte en hållbar lösning på detta problem.



Benvikter ökar rullatorns vikt med 2 kg (beroende på storlek) Sätts vikter i "U"-rören ökar vikten med ytterligare 2 kg.

Instruktioner för montering av benvikter visar på nästa sida.

TILLBEHÖR

MONTERING AV BENVIKTER

En tång med lång spets behövs för att montera vikter på rullatorns ben. Ta bort benen från rullatorn och tryck in fjäderhållaren som håller benen på plats i rullatorn.

Med användning av tången med lång spets, dra ut fjäderhållaren ur benet såsom visas i Steg 1 och förvara fjäderhållaren på en säker plats. Sätt en liten bit bubbelplast i benröret och tryck ned den med användning av vikten.

Tryck ned en annan bit bubbelplast i röret och tryck ned den ordentligt så att den håller vikten på plats och hindrar den från att skramla.


Ersätt fjäderhållaren genom att hålla ihop de två benen på fästhållaren så som visas i Steg 3, och skjut in den i röret. Tryck ned fästhållaren tills knappen på fästhållaren passar genom hålet på benets topp, vänd i motsatt riktning mot benets hjul.

Upprepa förfarandet för de andra benen. Ytterligare vikt kan monteras

på rullatorns "U"-rör. Detta är en mer komplicerad process och kräver att lederna längst ned på rullatorns främre ben demonteras.

Vikterna skjuts upp i det diagonala "U"-röret och hålls på plats på samma sätt som vikterna i benen. Lederna återmonteras sedan.

TA BORT
FÄSTHÅLLARE

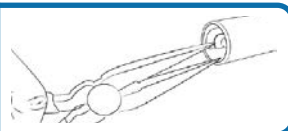

FÖR IN
VIKT




SÄKRA
FÄSTHÅLLARE



SITTHINDRANDE BYGEL

Den sitthindrande bygeln är utformad för att hindra barn från att sitta på rullatorns bakre rör. Att sitta på rullatorn på det viset orsakar påfrestningar på rullatorns ram. Man kan, om ett säte krävs, inhandla en enhet med ett nedfällbart säte.

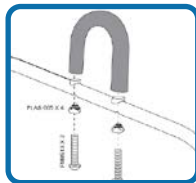

TILLBEHÖR

SÄTESSATS

Från 2008 har Seated Kaye Walker, som fanns som en speciell ram, ersatts av ett system med säte som eftermonteras på den konventionella Kaye Walker-designen (med undantag för W5).

Den kan enkelt monteras hos tillverkaren. Om en befintlig rullator skall uppgraderas krävs att RMS besöker platsen och monterar sätesystemet.



SÄKERHETSGUIDE FÖR SÄTE



Använd inte sätet i sluttningar eller på mjuk eller ojämn mark.



Se till att framhjulen har bromsarna aktiverade innan sätet används för att sitta.



Obromsade framhjul kan användas under vissa omständigheter. Informera RMS om särskilda krav och säkerställ att adekvat övervakning alltid förekommer.



Rullatorns ram kan behöva stödas av en terapeut/förälder/ vårdnadshavare när användaren sätter sig och reser sig upp.



Rullatorns säte är inte konstruerat för att användas istället för ett säte eller stol utan för att ge användaren möjlighet att vila. Kom ihåg – fäll alltid upp sätet vid gång.



Låt inte någon stå på sätet och hörsamma maxvikten såsom angiven på sidan 10 i denna manual. Hörsamma också varningsskyltar. Om det råder några betänkligheter ifråga om sätets funktion och/eller stabilitet, upphör använda rullatorn och kontakta RMS och aktuell hälsopersonal.

TILLBEHÖR


HÖFTGUIDE/SYMMETRIKUDDAR


Rullatorer för hållningskontroll som tillhandahålls från januari 2002 har två hål i handräckets "U"-rör. Dessa hål gör det möjligt att montera den nya satsen med höftkuddar.


Denna sats består av två höftguider, guideplåten och beslag. För att fästa guideplåten vid handräckets "U"-rör, för in två gängade stänger genom hålen i handräckets "U"-rör.

Montera brickor och muttrar på stängerna och dra åt muttrarna tills guideplåten sitter stadigt i sin position. Varje höftguide fästs vid guideplåten med en skruv och ett vred.

När höftkuddarna är i önskad position, dra åt vreden för att hålla höftkuddarna på plats. Dra inte åt för hårt!

 **OBSERVERA:** Sträva efter att placera höftkuddarna symmetriskt. Lämna ett gap på två fingrar mellan användaren och höftkuddarna så att rörelser inte begränsas alltför mycket. Guidade höftkuddar lämpar sig inte för användare med okontrollerade rörelser på grund av taxi.

 Vid misstanke om att någon del eller något tillbehör saknas, kontakta den lokala leverantören av utrustningen eller RMS så snart som möjligt.

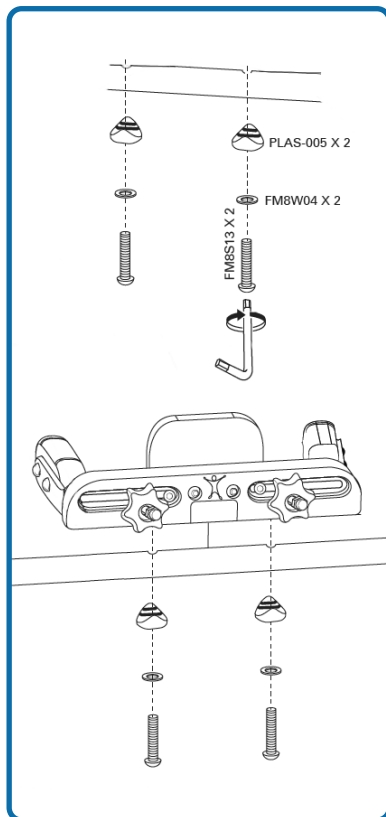

OM DET RÅDER BETÄNKLIGHETER BETRÄFFANDE OM DESSA DELAR MONTERATS KORREKT, KONTAKTA RMS LIMITED PÅ 01795 477280

TILLBEHÖR

BESLAG FÖR BÄCKENBÄLTE SOM MONTERAS PÅ HÖFTGUIDER

Följ dessa instruktioner om tillvalet med bäckenbälte har inhandlats för höftplaceringskuddarna. Skruvarna som tillhandahålls ersätter de befintliga skruvarna för justering av höftplaceringskuddarnas bredd.

! **OBSERVERA:** Bäckerbältet är inte ett tillbehör för begränsning, utan skall endast föreskrivas för gymnastikbetonad träning.


! **OBSERVERA:** Kom ihåg att återmontera alla skruvar, brickor och knoppar.

Testa alla funktioner genom att justera höftkuddarnas bredd och åtdragningsknopparna. Säkerställ att åtdragningsknopparna tillfredsställande håller höftkuddarna i önskad position. Dra varje sida av bäckenbältet mot de nyligen monterade beslagen för bäckenbältet och säkerställ att de är säkrade.

Nedan är etikett som sitter på bäckenbältet. Kom ihåg att bältet endast är avsett att användas för positionering vid gångträning.



This device is
NOT for use as a
safety restraint.

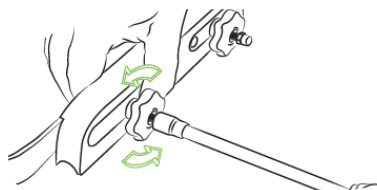

1. Lossa alla skruvar och knoppar på baksidan av höftguiden med en 10 mm skiftnyckel eller skruvdragare.



2. Ta vara på befintliga höftkuddar med justeringsskruvar och förvara dem på en säker plats ifall det skulle hända att man längre fram har önskemål om att ta bort beslagen för bäckenbältet.



3. Sätt i skruvar med längre vidd genom beslaget för bältet, säkerställ att skruvskuldran kommer på plats i de fyrkantiga hålen på beslaget.

TILLBEHÖR

UNDERARMSTÖD FÖR UNDERARMAR

Dessa lämpar sig för användare som inte kan sträcka ut underarmen (vid t.ex. ensidig förlamning eller reumatism) De kan användas om användaren inte kan bära vikten genom armarna, då armbågarna låses i kröken.

Rullatorns ram skall inte ställas in så att toppstaget är högre än centrum på bäckenet för att rännorna skall hamna i armbågshöjd.

Rännor för underarmar till rullatorer av storlek W3, W4 och W5 har ytterligare ett stödjande beslag i bakänden av anordningen, vilket kan justeras för att vila på handracket bakom handgreppet. (se fig.1)

ÅTERHÅLLANDE REMMAR FÖR UNDERARMAR



Rännor för underarmar kan användas enskilt eller i par.

Remmar för underarmar finns tillgängliga som ett tillval från RMS. Avsikten med dem är att vara behjälpliga för att få användarens armar på plats i rännorna och hålla dem kvar där. I effekt så fäster de användaren vid rullatorn, så övervakningen måste utökas i motsvarande grad för att undvika olyckor.

Remmarna passar in ni gapet mellan rännan och fyrkantståvet som stöder den. Dra remmarna genom detta gap. När användaren har positionerats i rullatorn, passa in den lösa änden av

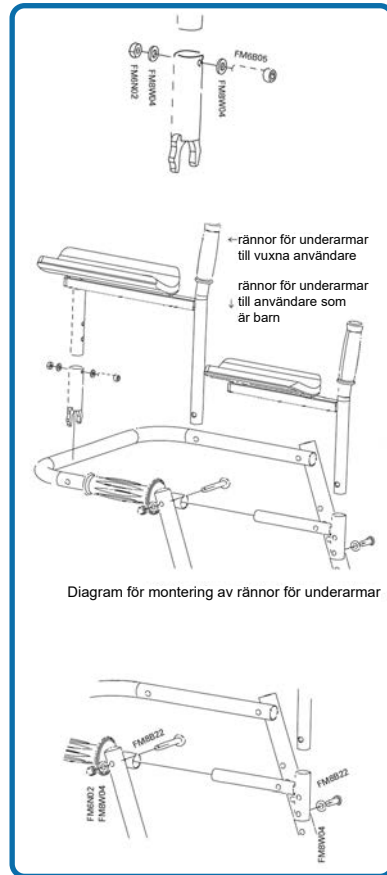


Diagram för montering av rännor för underarmar



remmen genom "D"-ringen och tillbaka över sig själv så att de två olika typen av kardborreband passar ihop med varandra.

TILLBEHÖR

VINKLINGSBARA UNDERARMSTÖD FÖR UNDERARMAR

Detta helt nya tillbehör är designat för att ge terapeuten och användaren en mångfald av justeringsalternativ.

Handgreppet kan justeras i en vinkel och ett avstånd från själva rännan. Detta tillbehör kan också justeras i höjd, och rännan i sig kan också roteras.

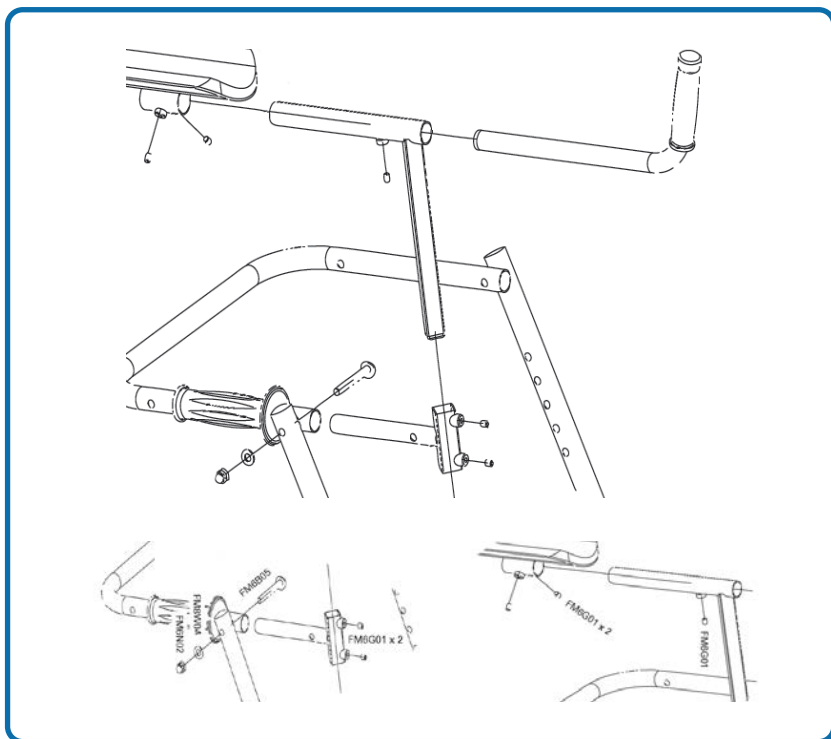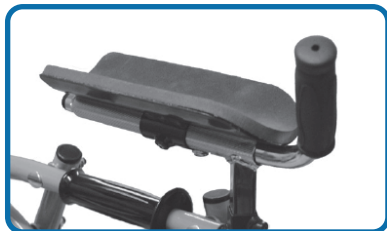


TILLBEHÖR

JUSTERING AV VINKLINGSBARA UNDERARMSTÖD FÖR UNDERARMAR

Höjjustering av rännan

För att justera höjden för både rännan och handgreppet tillsammans, använd en 3 mm sexkantsnyckel för att lossa de två låsskruvarna i rännans mottagning (ta inte bort skruvarna). Dra enheten upp eller ned till den höjd som behövs och dra sedan åt skruvarna.

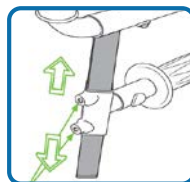

Justering av rännans vinkel och djup

Rännan med stoppning kan justeras på två sätt: 1) rotera rännan genom att lossa 3 mm låsskruven på rännans undersida. 2) använd samma metod för att justera rännans avstånd på tillbehöret. Säkra låsskruven vid önskad position.



Justering av vinkel och djup på rännans grepp



Tillbehörets del med handgreppet kan justeras på liknande sätt genom att man lossar 3 mm låsskruven närmast handgreppet. Handgreppet kan sedan roteras eller flyttas bort från rännan så som behövs och därefter låses man med låsskruven när man har den önskade positionen.



ASSISTENTS STAV

Staven för assistenten och begränsning kläms fast på det lägsta eller andra "U"-röret på storlekarna W1/2 och W1 och det mellersta eller andra "U"-röret på alla andra storlekar. När klämman fästs, se till att inte dra åt skruvarna för hårt då det kan deformera rullatorns rör

Denna artikel är utformad för guidning och träning, och för att minska påfrestningarna på ryggen för vårdnadshavare och hälsovårdspersonal.

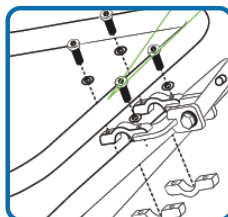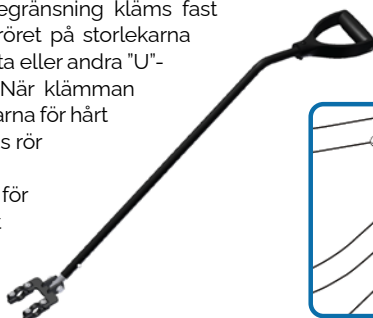

UNDERHÅLL

INSPEKTION

Terapeuter som har använt Kaye Walker många år kommer att vara familjära med ett antal förbättringar som kan: 1) förbättra produktens funktionalitet för en specifik användare, 2) förlänga produktens användbara liv.


Detta inbegriper: inläggsvikter, dubbla fästhållare i benförlängningar, svetsade ramar eller fixerade/bultade ramar (dvs.


de kan inte fällas ihop), förstärkta leder och andra hjul. Produkter som används av tyngre eller mer nyckfulla användare behöver kontrolleras mycket oftare.


Vi föreslår därför att man som minimum följer detta schema. Se nedan för underhållskontroller och sidan 22 för ytterligare råd om säkerhet (för mer detaljerade uppgifter).

SÄKERHETSKONTROLLER AV KAYE WALKER	VECKOVIS	MÅNADSVIS	FORTLÖPANDE
Kontrollera justeringshål på ben och hopfällningsrör.	X		
Kontrollera/byt ut slitna hjul, kontrollera också för ojämn slitning.		X	X
Kontrollera att storleken fortfarande lämpar sig för användaren.			X
Kontrollera att bultar och muttrar inte är lösa eller saknas.		X	
Kontrollera hopfällningsfunktionen och rullatorns stabilitet. (Är den vinglig)		X	
Kontrollera att rullatorn följer en rak bana om den rullas utan belastning.		X	X
Kontrollera för NÅGRA SOM HELST skador och rapportera om det finns något som ger skäl för oro.	X		X
Kontrollera att alla 4 hjul/ben är inställda på samma höjd.		X	
Kontrollera RMS webbsajt för uppdateringar och säkerhetsbulletiner.			X

UNDERHÅLLSKONTROLLER

 Kontrollera hålen för höjjustering och hålen på teleskoprören för tecken på slitage. Om fästhållare är deformerade eller skadade, eller om hålen utvidgats eller deformerats mer än 1,5 gånger sin ursprungliga storlek, ta genast rullatorn ur bruk och kontakta RMS för byte.

 Gummihylsor (doppskor på kryckor) skall bytas ut om edelbart om de är genomslitna.

 Byt ut skadade eller slitna hjul parvis så snart så möjligt. Låt inte mönstret på hjulen slitas ned fullständigt. Att montera nya hjul är lätt.

RENGÖRING OCH HYGIEN

! Rengör inte någon del av rullatorn med blekmedel eller lösningsmedel för rengöring. Rengör metalledar med en lätt fuktad trasa eller antibakteriella våtservetter av engångstyp. Tillbehör i tyg kan rengöras med en trasa fuktad med tvålatten och torkas/sköljas med rent vatten. En mjuk borste kan användas vid kraftig nedsmutsning. De flesta material har egenskaper mot slitning och smuts, men skulle slitning och smuts vara alltför riklig kan tygartiklar för byte inhandlas från RMS

! Använd inte lösningsmedel, blekmedel, syntetiska tvättmedel eller polermedel med vax för produkten. Desinfekterande medel kan användas utspädda såsom specificeras av deras tillverkare. Dessa inbegriper Haz-Tabs och andra desinfekterande medel som ofta används i sjukhus program för att kontrollera infektionsrisiker.

Om det råder någon osäkerhet om instruktionerna ovan för rengöring, kontakta RMS på 01795 477280.

YTTERLIGARE RÅD FÖR SÄKERHET

Använd följande diagram för att stimulera diskussioner om nivå av övervakning som krävs för en användare. Nivå av övervakning för en användare kan variera beroende på omgivning och/eller väder.



YTTERLIGARE RÅD FÖR SÄKERHET



Kontrollera regelbundet muttrar och bultar och dra åt efter behov. Med undantag för bultar som markerats med en gul etikett, dra åt muttrar så att brickorna mellan tuberna inte roterar.



RMS rekommenderar med eftertryck att produkten inspekteras varje år och till och med ännu oftare i enlighet med användarens vikt och gångstil. (SE SIDAN 18 FÖR MINIMALA KRAV PÅ INSPEKTION)



Inspektioner måste utföras av en tekniskt kompetent person som fått utbildning i produktens användning. Om det råder någon osäkerhet om produktens fortsatta lämplighet för en person på grund av att personen växer eller personens förmågor försämras, kontakta oss då det kan finnas lämpliga tillbehör tillgängliga.



Innan produkter återutges föreslår RMS att de som föreskriver utrustningen säkerställer att produkten inte har specialanpassade artiklar anslutna och att den är till fullo lämplig för den nya mottagaren/användaren. Kontakta vårt kontor om det önskas att RMS gör en kontroll mot produktens serienummer och dess ursprungliga specifikation.



Varken ursprungliga bedömningar av produkten eller användarmanualer negerar behovet av noggranna överväganden när produkten föreskrivs eller att man gör en riskbedömning, särskilt i en situation när en återutgivning av produkten föreligger.




Om det råder några farhågor gällande en produkts lämplighet för en särskilt utmanande individ med en väldigt tung eller oregelbunden gång, kontakta RMS då vi kan ha lämpliga tillbehör eller en skraddarsydd lösning.



Under inga förhållanden skall produktens ram utrustas med eller användas tillsammans med tredje parts komponenter eller tillbehör. Detta gäller särskilt utvidgningar av hjul. Alla produkter är konstruerade och tillverkade enligt exakta standarder och specifikationer och är CE/UKCA-märkta i enlighet med det. Användning av komponenter från tredje part ogiltigförklarar produktens garanti och, än viktigare, äventyrar användarens säkerhet.

PRODUKTIDENTIFIERING

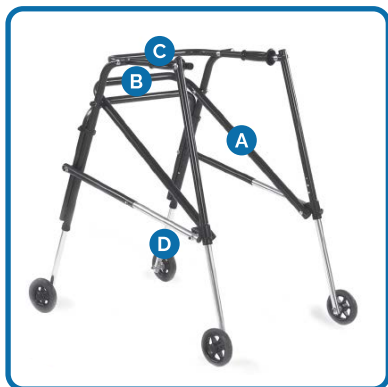

A) Skylt med serienummer

RMS seriebeteckning och serienummer är viktiga för identifiering av produkten och spårbarhet och skall inte tas bort. Om serienumret har blekts genom rengöring, kontakta RMS omedelbart för att få numret ersatt, då avsaknad av ett serienummer kan komplicera eller ogiltigförklara garantikrav.



B) Skylt med rullatorns storlek

Skylten med rullatorns storlek visar klart och tydligt rullatorns storlek och maximal vikt på användaren för att



enkelt kunna refereras till.


C) "Sitt inte"-skylt

Denna varningsskylt från RMS anger klart och tydligt att rullatorns bakre stänger inte skall användas för att sitta. Den visar också vår e-postadress och vårt telefonnummer ifall det finns behov att kontakta oss.




D) Hjulskylt

Denna skylt hittas på ett av de bifogade hjulen och anger att hjulet med skylten skall vara på rullatorns vänstra sida.

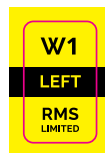

ALLA SLITNA OCH SKADADE SKYLTLAR KAN BEGÄRAS FRÅN RMS OCH FÅS KOSTNADSFRETT. LÅT INTE SKYLTLARNA BLI UTSLITNA!

FELSÖKNING

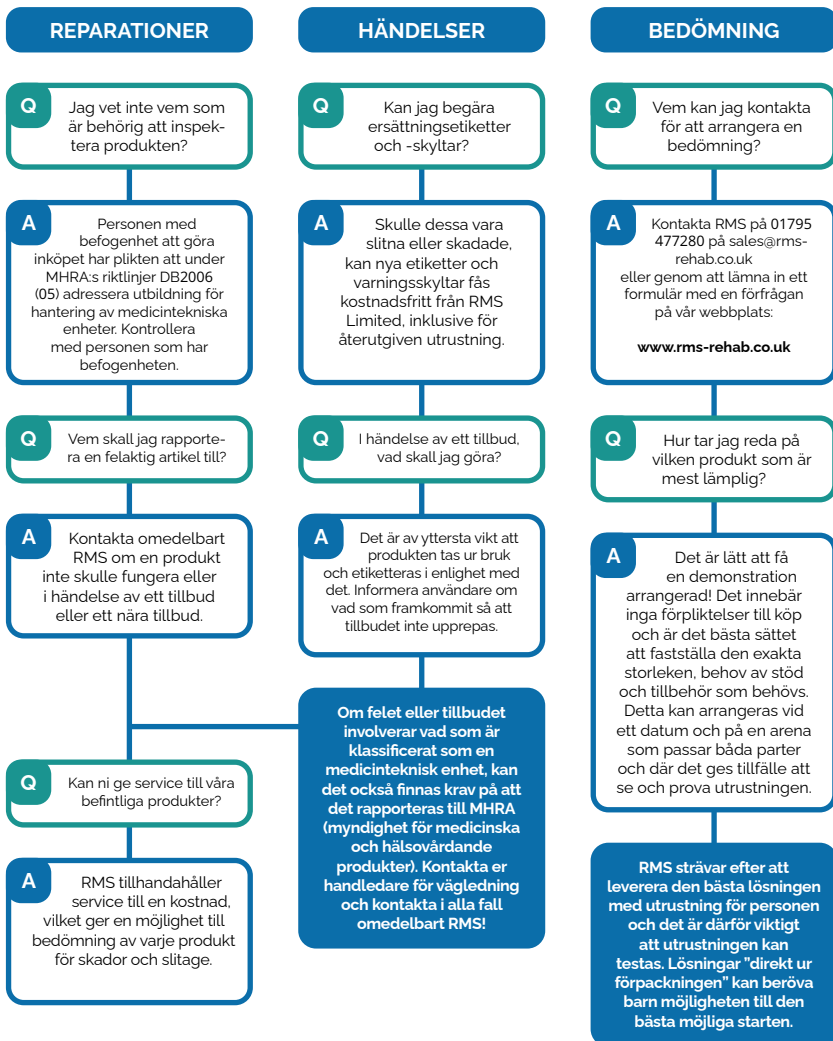

Distributör i Sverige och Norge:

Eurovema

Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38, 332 35 Gislaved
Tel: 0371-390 100

eurovema.se info@eurovema.se

Tillverkare:

Thompson House, Unit 10, Styles Close,
Sittingbourne, Kent, ME10 3BF.

Tel: +44 (0) 1795 477280

Fax: +44 (0) 1795 229692

Email: sales@rms-rehab.co.uk

www.rms-rehab.co.uk