



Viktig information för användare av:

Miniflex SitRite, Flexbase SitRite, Flexbase Forma.

Med sittkryss, enligt bilden.

Under perioden 2023-08-10 till 2024-10-15 kan sittkrysset levererats med en bristfällig svets som medför att den främre fästtappen till anordning som håller fast samt justerar sitslutningen kan lossna från sitt fäste. Detta kan medföra att brukaren kan falla ur sitsen och detta kan medföra en fara.

Vänligen meddela berörda inom er organisation.

Eurovema Mobility AB har spårbarhet och kommer kontakta berörda kunder under november-december månad för att diskutera genomförandet av åtgärden.

Åtgärden kommer att utföras av personal från Eurovema eller av Eurovema anlitad tekniker, som kommer att demontera sittkrysset och ersätta med ett korrekt utformat sittkryss. Planen är att åtgärderna av chassit ska vara genomförda under 2025.

Vid frågor kontakta Kundtjänst på Eurovema, via e-post: info@eurovema.se eller telefon 0371 39 01 00

Kvalitetsansvarig: peter.kjell@eurovema.se

Viktigt säkerhetsmeddelanden till marknaden

Säkerhetsmeddelande: FSN 104122

2024-11-18

Berörda serienummer:

1040425848	1040430065	1040430691	1040431187	1040431496
1040429309	1040430066	1040430692	1040431189	1040431571
1040429310	1040430127	1040430711	1040431190	1040431572
1040429346	1040430137	1040430712	1040431196	1040431600
1040429349	1040430180	1040430714	1040431197	1040431608
1040429352	1040430197	1040430773	1040431198	1040431609
1040429466	1040430201	1040430781	1040431199	1040431610
1040429471	1040430213	1040430786	1040431204	1040431611
1040429474	1040430215	1040430791	1040431206	1040431612
1040429484	1040430220	1040430847	1040431253	1040431613
1040429494	1040430226	1040430849	1040431254	1040431630
1040429495	1040430227	1040430853	1040431261	1040431671
1040429497	1040430288	1040430854	1040431262	1040431672
1040429507	1040430289	1040430856	1040431265	1040431780
1040429509	1040430293	1040430860	1040431267	1040431781
1040429510	1040430294	1040430861	1040431268	1040431782
1040429546	1040430295	1040430869	1040431321	1040431801
1040429549	1040430298	1040430871	1040431322	1040431830
1040429550	1040430301	1040430872	1040431324	1040431837
1040429636	1040430303	1040430875	1040431325	1040431838
1040429651	1040430319	1040430896	1040431326	1040431839
1040429652	1040430488	1040430897	1040431327	1040431840
1040429663	1040430492	1040430898	1040431328	1040431841
1040429664	1040430500	1040430905	1040431333	1040431866
1040429666	1040430501	1040430908	1040431356	1040431867
1040429667	1040430502	1040430909	1040431359	1040431868
1040429702	1040430503	1040430910	1040431403	1040431871
1040429703	1040430504	1040430911	1040431408	1040431872
1040429704	1040430535	1040430930	1040431409	1040431874
1040429745	1040430537	1040430932	1040431413	1040431875
1040429937	1040430550	1040430934	1040431428	1040431879
1040429940	1040430604	1040430940	1040431449	1040431880
1040429942	1040430605	1040430992	1040431459	1040431881
1040429946	1040430609	1040430994	1040431460	1040431888
1040429957	1040430611	1040431101	1040431481	1040431889
1040429958	1040430620	1040431102	1040431490	1040431891
1040430050	1040430622	1040431103	1040431491	1040431892
1040430051	1040430671	1040431104	1040431492	1040432041
1040430056	1040430676	1040431144	1040431493	1040432042
1040430060	1040430677	1040431148	1040431494	1040432043
1040430063	1040430689	1040431164	1040431495	1040432045

Viktigt säkerhetsmeddelanden till marknaden

Säkerhetsmeddelande: FSN 104122

2024-11-18

1040432047	1040433003	1040433446	1040433922	1040434479
1040432111	1040433042	1040433471	1040433934	1040434481
1040432114	1040433057	1040433473	1040433941	1040434482
1040432115	1040433059	1040433474	1040433950	1040434483
1040432116	1040433071	1040433475	1040433952	1040434484
1040432119	1040433072	1040433476	1040433957	1040434485
1040432121	1040433087	1040433477	1040433958	1040434486
1040432133	1040433092	1040433478	1040434023	1040434487
1040432135	1040433102	1040433479	1040434050	1040434488
1040432143	1040433103	1040433480	1040434051	1040434489
1040432150	1040433104	1040433483	1040434054	1040434490
1040432179	1040433106	1040433570	1040434059	1040434491
1040432191	1040433128	1040433577	1040434076	1040434494
1040432194	1040433130	1040433578	1040434083	1040434495
1040432223	1040433134	1040433587	1040434084	1040434496
1040432224	1040433135	1040433588	1040434085	1040434497
1040432227	1040433136	1040433589	1040434088	1040434499
1040432234	1040433137	1040433629	1040434089	1040434512
1040432235	1040433138	1040433654	1040434103	1040434515
1040432236	1040433139	1040433655	1040434104	1040434516
1040432237	1040433140	1040433656	1040434107	1040434519
1040432238	1040433141	1040433657	1040434143	1040434520
1040432241	1040433142	1040433662	1040434150	1040434521
1040432242	1040433153	1040433679	1040434159	1040434522
1040432243	1040433156	1040433692	1040434160	1040434523
1040432251	1040433215	1040433697	1040434163	1040434524
1040432252	1040433221	1040433745	1040434174	1040434525
1040432254	1040433228	1040433751	1040434183	1040434526
1040432271	1040433266	1040433757	1040434189	1040434566
1040432272	1040433276	1040433758	1040434268	1040434567
1040432284	1040433286	1040433761	1040434312	1040434571
1040432295	1040433287	1040433765	1040434313	1040434572
1040432303	1040433290	1040433789	1040434314	1040434585
1040432304	1040433298	1040433796	1040434327	1040434586
1040432306	1040433350	1040433801	1040434348	1040434587
1040432396	1040433351	1040433804	1040434372	1040434588
1040432397	1040433355	1040433807	1040434388	1040434589
1040432398	1040433416	1040433818	1040434392	1040434590
1040432403	1040433417	1040433820	1040434393	1040434591
1040432405	1040433418	1040433832	1040434420	1040434594
1040432406	1040433419	1040433834	1040434422	1040434625
1040432445	1040433420	1040433870	1040434424	1040434632
1040432447	1040433429	1040433900	1040434429	1040434944
1040432515	1040433442	1040433902	1040434430	1040434946
1040433001	1040433444	1040433903	1040434455	1040434957
1040433002	1040433445	1040433915	1040434475	1040434961

Viktigt säkerhetsmeddelanden till marknaden

Säkerhetsmeddelande: FSN 104122

2024-11-18

1040434962	1040435667	1040436016	1040436825	1040437314
1040434963	1040435668	1040436017	1040436826	1040437316
1040434978	1040435669	1040436031	1040436827	1040437318
1040434997	1040435670	1040436032	1040436828	1040437319
1040435032	1040435671	1040436038	1040436829	1040437321
1040435033	1040435672	1040436039	1040436830	1040437322
1040435064	1040435674	1040436061	1040436831	1040437323
1040435067	1040435675	1040436066	1040436832	1040437324
1040435068	1040435676	1040436078	1040436857	1040437366
1040435121	1040435677	1040436107	1040436858	1040437375
1040435123	1040435678	1040436113	1040436859	1040437376
1040435126	1040435679	1040436115	1040436860	1040437377
1040435127	1040435680	1040436116	1040436885	1040437378
1040435132	1040435681	1040436121	1040436916	1040437379
1040435134	1040435722	1040436135	1040436940	1040437380
1040435146	1040435773	1040436153	1040436943	1040437381
1040435195	1040435796	1040436154	1040436944	1040437396
1040435240	1040435798	1040436165	1040436945	1040437448
1040435243	1040435800	1040436174	1040436946	1040437455
1040435244	1040435803	1040436175	1040436947	1040437456
1040435245	1040435810	1040436176	1040437007	1040437457
1040435246	1040435813	1040436177	1040437014	1040437458
1040435274	1040435814	1040436178	1040437028	1040437459
1040435462	1040435824	1040436179	1040437029	1040437460
1040435534	1040435847	1040436188	1040437030	1040437461
1040435535	1040435874	1040436189	1040437031	1040437462
1040435594	1040435875	1040436190	1040437050	1040437486
1040435595	1040435886	1040436193	1040437102	1040437492
1040435596	1040435887	1040436209	1040437106	1040437499
1040435603	1040435889	1040436641	1040437183	1040437511
1040435604	1040435909	1040436664	1040437197	1040437531
1040435605	1040435916	1040436665	1040437209	1040437532
1040435608	1040435917	1040436666	1040437225	1040437544
1040435609	1040435943	1040436667	1040437226	1040437545
1040435617	1040435944	1040436700	1040437271	1040437546
1040435618	1040435945	1040436702	1040437273	1040437547
1040435630	1040435946	1040436725	1040437274	1040437548
1040435630	1040435947	1040436753	1040437275	1040437549
1040435662	1040435948	1040436756	1040437276	1040437550
1040435663	1040435949	1040436791	1040437277	1040437651
1040435664	1040435950	1040436801	1040437284	1040437652
1040435665	1040436000	1040436818	1040437285	1040437688
1040435666	1040436011	1040436824	1040437295	